

採血台（昇降式）TSD-02

（商品コード：8-8954-01）

お買い上げ有り難うございます。



この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知らするために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

注意


- 天板の上に腰掛けたり、上がったたりしないで下さい、転倒してケガをすることがあります。
- 天板に耐荷重（60kg）以上の物を載せないで下さい、天板のたわみにより落下することがあります。
- 火気や暖房器具に近づけて使わないで下さい、火災になることがあります。
- ボルトやネジがゆるんだままでは使わないで下さい、本体が壊れてケガをすることがあります。
- 異常を発見したままでは使わないで下さい、本体が壊れてケガをすることがあります。
- 用途以外では使わないで下さい、ケガをすることがあります。
- 分解や改造をしないで下さい、破損やケガをすることがあります。
- 子供に操作させないで下さい、事故でケガをすることがあります。

高さ調整方法


- 採血台の脚部を足で踏みながら、2人で同時に天板をゆっくり持ち上げます。
  - 20mm間隔で、カチッと音がしますのでそれを目安に高さを調整して下さい。
- ※20mm間隔で10段階の調整ができます。  
下げる場合は、一旦最上段（920mm以上）まで上げるとロックが解除され、最下段（720mm）までゆっくりと下ります。少し押さえながら下げて下さい。

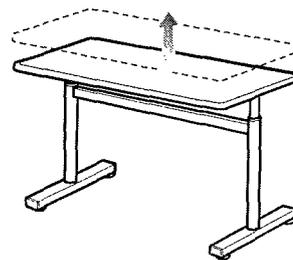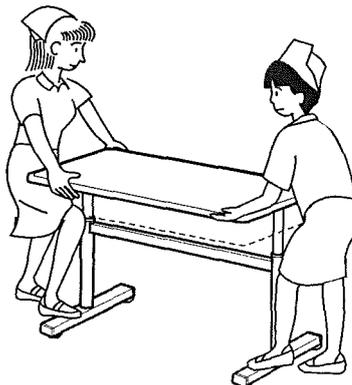

必ず2人で同時に操作して下さい、1人で操作すると採血台が壊れてケガをすることがあります。

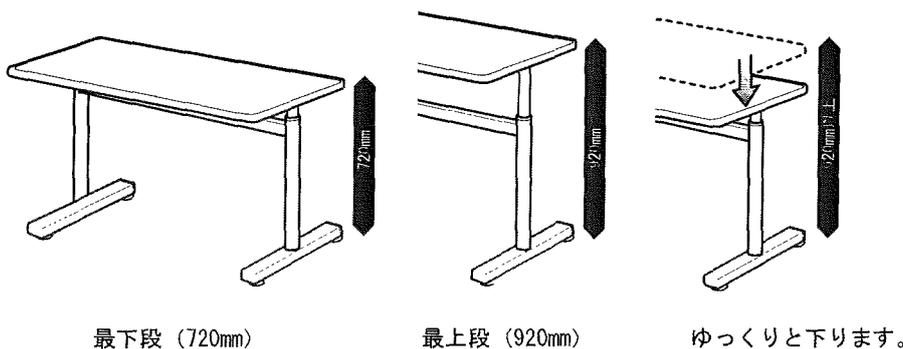

脚部の内パイプには、段数が刻印されています、それを目安に高さを合わせることもできます。

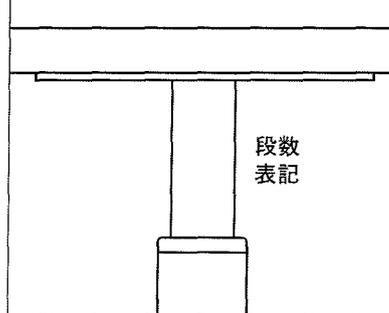

お手入れ方法

通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きして下さい。ひどく汚れた場合は、中性洗剤を薄めた液を、柔らかい布に浸しよく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きして下さい。ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきんは使わないで下さい、変色などの原因になります。



2008年4月 初版

アズワン株式会社

商品についてのお問い合わせは  
カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-711-875  
FAX 0120-700-763  
問合せ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません

# 組立説明書

## 注意

- 組立てる前に、この説明書を良くお読みの上、正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品の数量を確認してください。
- 組立作業は、2人以上で行ってください。
- 本製品はスチール部品がありますので、組立てる際は手袋を必ず着用してください。

### 必要工具




インパクトドライバーは使用しないで下さい、破損することがあります。

### 必要部品

部品名	機種品番	TSD-02
天板		1
脚		2
棧パイプ		1
組立ネジ 天板取付用		12
ナベ頭ビームM6×20+スプリングワッシャー+平ワッシャー		
脚・棧パイプ取付用		8
ナベ頭ビームM6×10+平ワッシャー		

### 組立手順


- 1** 脚を逆さまにして、コの字金具に棧パイプを差し込み、組立ネジ（8箇所）で固定します。

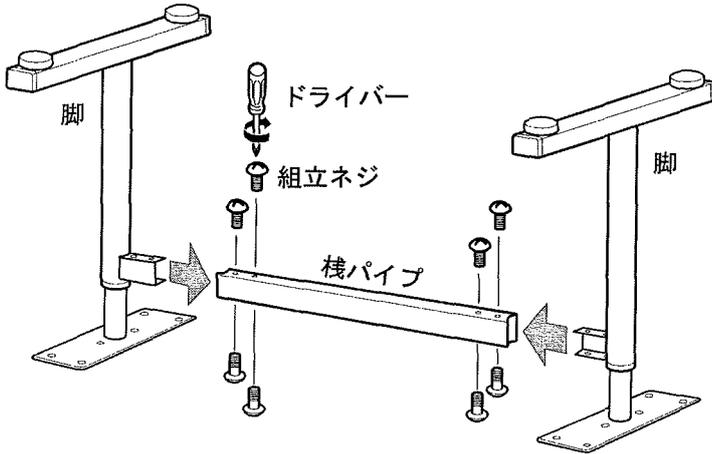


### 仕様

サイズ	W1350×D450×H720~920 mm
材質	脚部/スチール(メラミン焼付塗装) 天板/メラミン化粧合板, 天板エッジ/オレフィン系樹脂

- 2** 梱包用のダンボール等を敷いた上に天板を裏返しに置き、組立てた脚部を、組立ネジ（12箇所）で取り付け固定します。

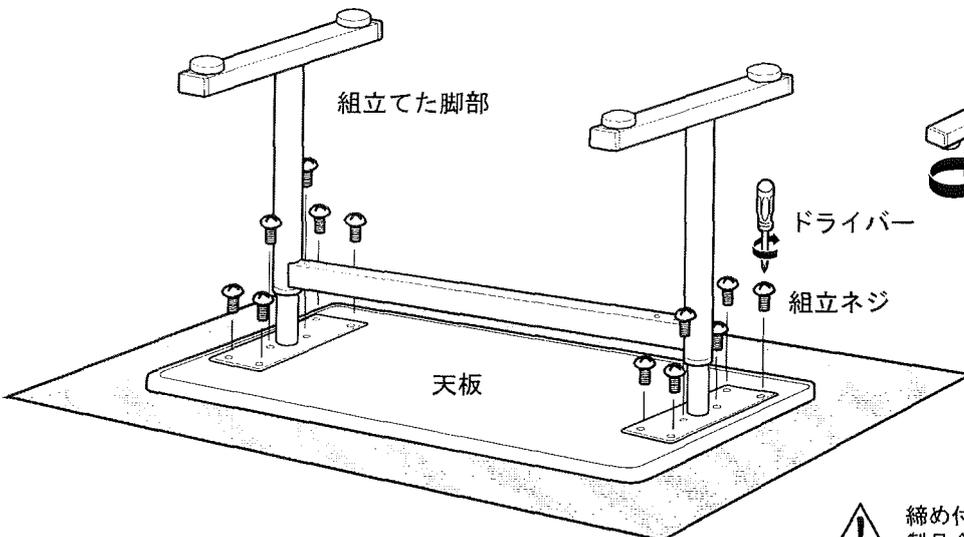

- 3** 2人で、採血台（注射台）を起こした後、アジャスターで水平に調整して下さい。

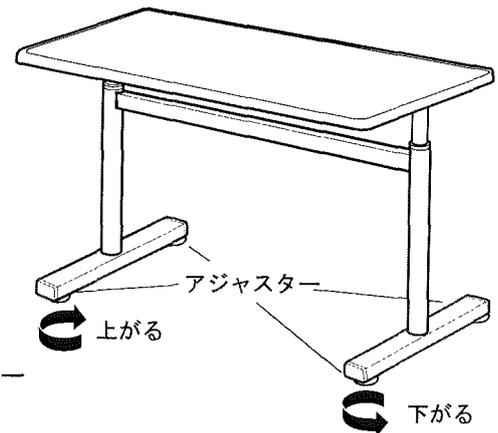

締め付け部品がしっかり締まっているか、製品全体にねじれがないか確認して下さい