


7-7998-01

navis\*

## 針ボックス フタ開閉防止用シリコンバンド

## 装着方法

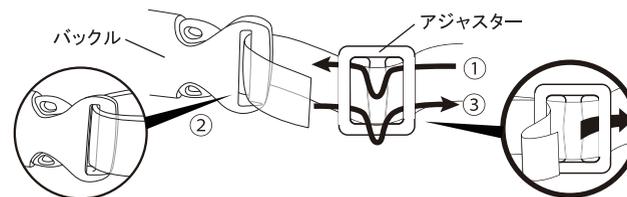

- シリコンバンドの両端に①②③の順でバックルとアジャスターを取り付けてください。
- 針ボックスのフタがあかないように装着し、アジャスターを使って長さを調整してください。
- ※シリコンバンドが長い場合は、適当な長さにカットしてご使用ください。

## 使用上の注意

- ご使用前に破損や亀裂がないことを十分確認してください。
- シリコンバンドに汚れや油などが付着すると、グリップ力が低下することがあります。使用前に汚れがないことを確認してください。
- 極端な低温・高温、および湿気や埃が多いところでのご使用、保管は避けてください。
- 血液などの汚れが付着した場合は、アルコールでお手入れしてください。

## ■仕様

バンド幅 : 20 mm  
 長さ : 850 mm  
 材質 : バンド/シリコン、バックル・アジャスター/ POM (ポリアセタール樹脂)  
 重量 : 50 g  
 セット内容 : シリコンバンド/ 1本、アジャスター/ 2個、バックル/ 1セット  
 耐熱温度 : シリコンバンド/ 180℃、バックル・アジャスター/ 110℃  
 原産国 : 中国



4 589638 289323

商品に関するお問い合わせは

**アズワン株式会社**  
 カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

月曜～金曜 午前9時～午後5時30分まで

※土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。