

取扱説明書

Instruction Manual


車椅子用酸素ボンベキャリアー

HP3040 0-6651-01

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、未永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図と各部名称

構成部品	個数
酸素ボンベキャリアー本体	1個
酸素ボンベ固定ノブ	1個
パイプ用固定ノブ	1個
固定ホルダー[A]	1組
固定ホルダー[B]	1個
固定ホルダー[A]用高さ調節ノブ	1個
面ファスナー	1枚
パイプ用アジャスター Φ19mm用、22mm用	各1組

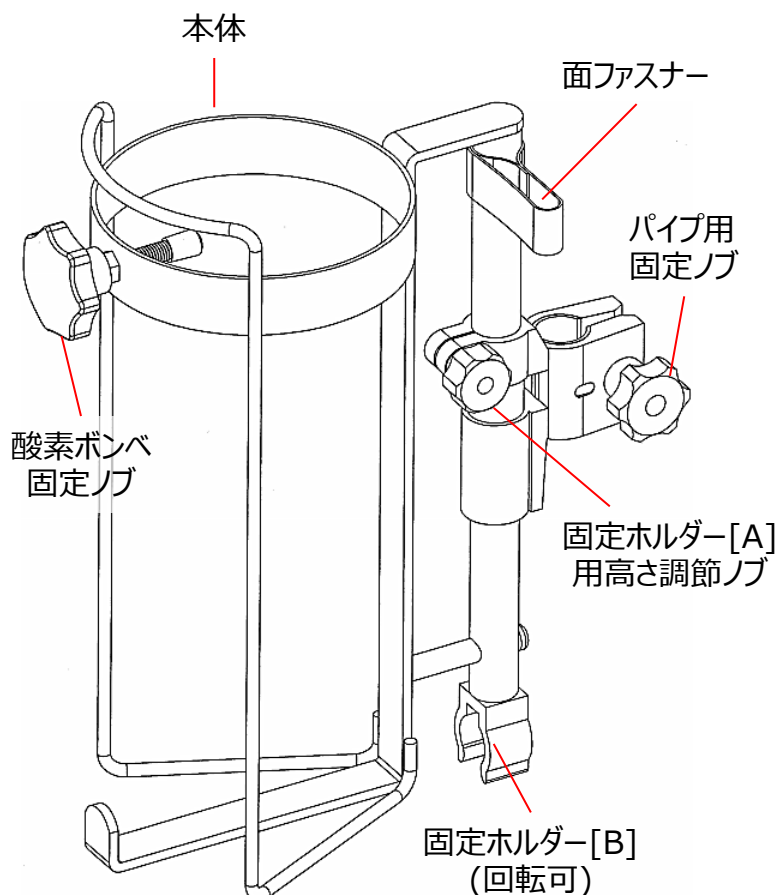

⚠ 注意事項 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となる場合があります。


- 本製品は酸素ボンベ専用のキャリアーです。それ以外の用途では使用しないでください。転倒・落下などにより怪我をする恐れがあります。
- 車椅子には様々な形状がありますので、取付けられない場合もあります。
- 車椅子の転倒にご注意ください。ボンベを車椅子に積載すると、後方に倒れやすくなりますので、充分ご注意ください。
- 使用時は各固定ノブがしっかりと締まっているか、面ファスナーに緩みがないかをご確認ください。また、定期的に（週に1回以上）各部に緩みがないか点検をしてください。緩みがあった場合は増し締めしてください。ノブが緩んだ状態で使用されますと、不意の転倒や破損の原因となり、大変危険です。
- 安全のため、固定ホルダーは[A]と[B]両方とも車椅子に固定してご使用ください。

取付可能 車椅子 条件

- バックレストパイプがφ19mm、φ22mm、φ25mmのいずれかであること。
- テッピングバーがあり、φ18.6mm前後であること。
- テッピングバーの頂点から座面下部まで約113～280mmの間であること。
- テッピングバーの長さがバックレストパイプの後部頂点より最低70mmであること。
- テッピングバーの上部本製品取付スペースに障害物などがないこと。
- 背もたれがリクライニングしないこと。


取付方法

- ① パイプ用固定ノブを緩め、パイプ固定用ノブとボルトを完全に取り外してください。
- ② 固定ホルダー[A]用高さ調節ノブを緩め、固定ホルダー[A]をバックレストパイプの座面に近い位置に移動させ、仮留めします。
- ③ 固定ホルダー[B]（回転可）を車椅子のテッピングバーに上から差し込みます。その際、ボンベキャリアが邪魔になる場合は、本体を振って邪魔にならないようにしてください。
- ④ 固定ホルダー[A]をバックレストパイプに押し込み、取付けます。その後、手順①で取り外したのと逆の順番で、パイプ用固定ノブとボルトを時計回りに締めてしっかりと固定してください。
※ 固定ノブが車椅子の車輪にあたらないよう、車輪より内側に取付けてください。
- ⑤ 面ファスナーをバックレストパイプにしっかりと固定してください。
- ⑥ 固定ホルダー[A]用高さ調節ノブをしっかりと締めてください。
- ⑦ 本体に酸素ポンペを載せ、酸素ポンペ固定ノブを時計回りに締め、固定してください。（日本国内で標準的に使用されている、300ℓまたは500ℓの酸素ポンペが使用できます。）

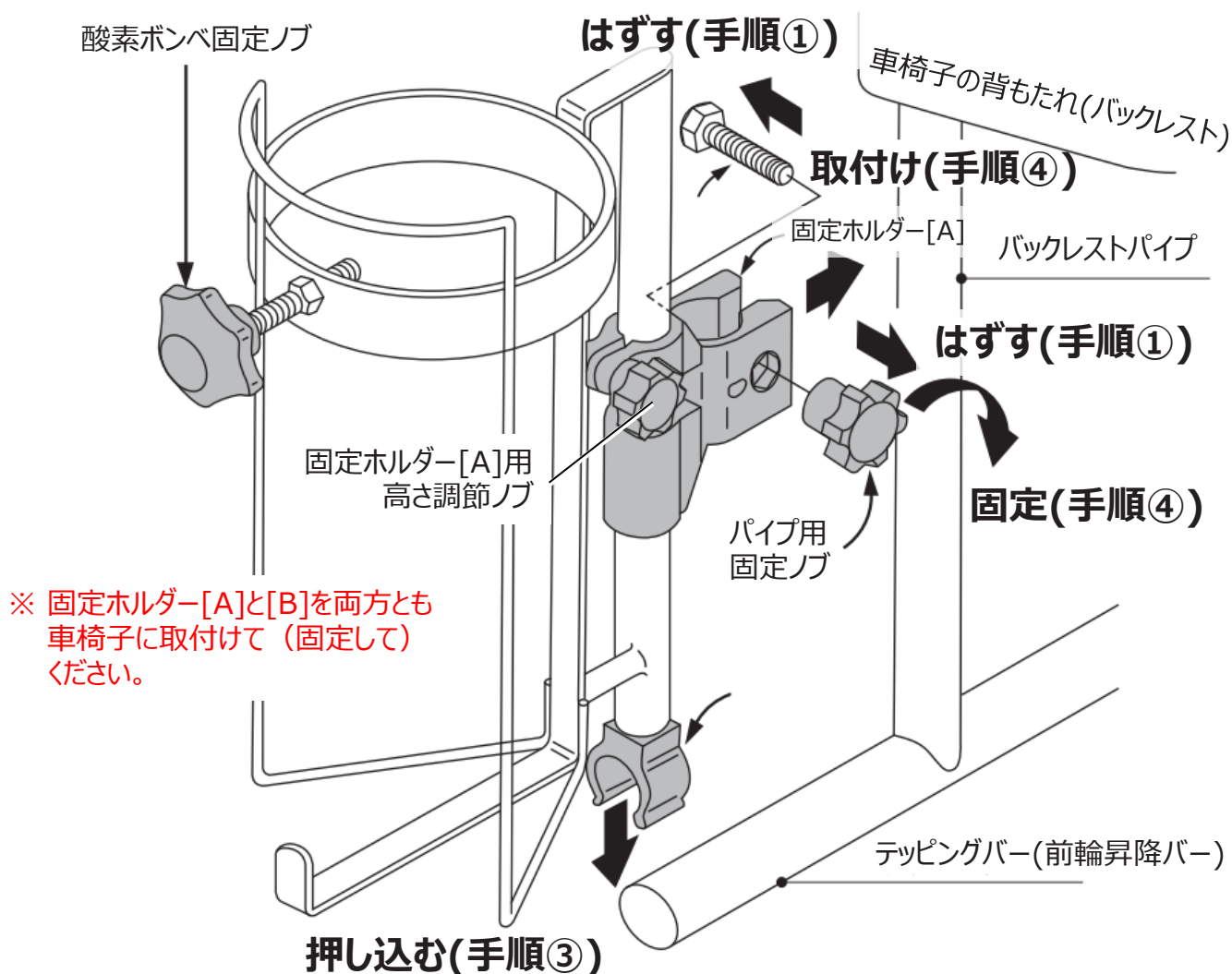

■ バックレストパイプ径が細い場合

- 固定ホルダー[A]は、φ25mmのパイプ用です。
- バックレストパイプ径がφ19mm、φ22mmの場合は、パイプ用アジャスターを固定ホルダー[A]に入れることで径を調節します。
- パイプ用アジャスターを図のようにホルダー[A]にはめ込み、車椅子のバックレストパイプに正しい組合せで取付け、固定ノブで固定します。
- パイプ用アジャスターの突起部を、固定ホルダー[A]内側の嵌合(かんごう)穴にしっかりと合せて固定してください。
- パイプ用アジャスターは、φ19mm用が1組、φ22mm用が1組付属しています。

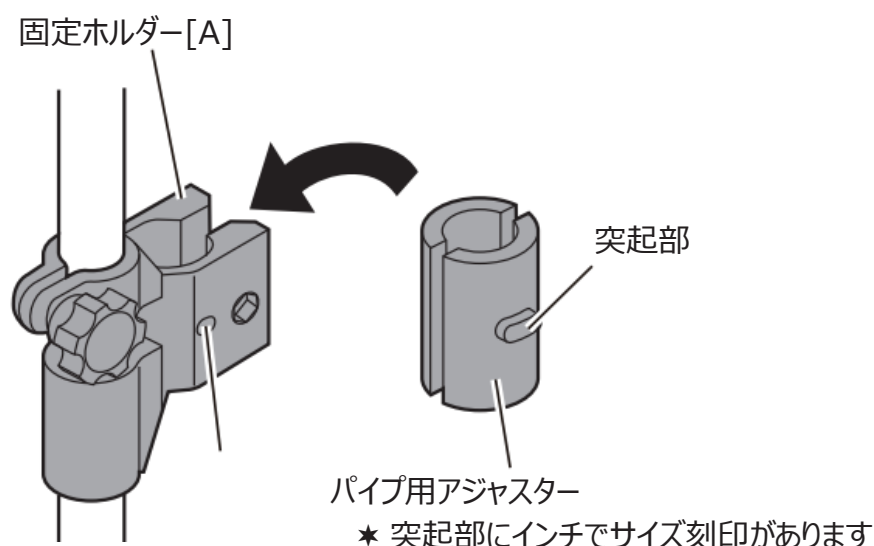

仕様

材質	ガードル棒／スチール、固定ホルダー[A]・各ノブ／ABS樹脂、固定ホルダー[B]／TPEE
本体サイズ	W 130 × D 230 × H 340 mm
ボンベラック 内寸法	酸素ボンベ（固定ノブにて調節）／φ124mm ボンベ使用可能径／φ90～124mm
製品重量	約 900 g
パイプ径	上パイプ／φ16mm、下パイプ／φ19mm
適応パイプ径	固定ホルダー[A] ／ 約 φ25mm（パイプ用アジャスター使用時：φ19mm、φ22mm） 固定ホルダー[B] ／ 約 φ18.6mm（ティッピングバーサイズ）
面ファスナー	W 19 × L 180 mm（固定パイプより）

Made in Taiwan

保証規定

1. 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
2. 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
3. ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定 1 に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品名	車椅子用酸素ボンベキャリアー HP3040
品番	0-6651-01
保証期間	お買い上げ日より 1 年間
お買い上げ日	年 月 日
お名前	様
ご住所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL.

 **アズワン株式会社**

商品についてのお問い合わせは カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875
FAX 0120-700-763
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは 修理窓口

TEL 0120-788-535
FAX 0120-788-763
問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

第4版 2019年 9月 作成