

取扱説明書

Instruction Manual

navis*

与薬カート

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
当社製品をより安全に、正しくお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書をお読みいただきますようお願いいたします。
また、お読みいただきました後も無くさないよう大切に保管してください。

目次


使用上のご注意	P. 1
各部名称	P. 1
お手入れ方法	P. 2
製品仕様・オプション	P. 2
製品保証	P. 3

使用上のご注意

- 本製品を目的以外の用途で使用しないでください。破損や怪我をする恐れがあります。
- 床面が平滑なところで使用してください。凹凸のある床面で使用されますと、本体やキャスターなどの部品が破損したり、転倒の原因になります。
- エレベーター等の乗降の際は、キャスターが隙間に落ちないようにご注意ください。
- 天板や補助天板への無理な荷重は、転倒や破損の原因になりますのでご注意ください。
- 引出しを出した状態で荷重がかかり過ぎますと、バランスを崩して転倒する恐れがあります。引出しを開ける際は、1段ずつ開けるようにしてください。
- 本体に薬品などが付着しましたらすぐに拭き取ってください。長時間放置しますと変色する可能性があります。
- もし使用中に変形や曲がり、ねじの緩みなどによるガタツキや異音が生じた場合には、直ちに使用を中止し、購入された販売店にご相談ください。そのまま使用されますと、本体の破損やキャスターの脱落により怪我をする恐れがあります。
- 絶対に分解や改造はしないでください。

各部名称

《本体》

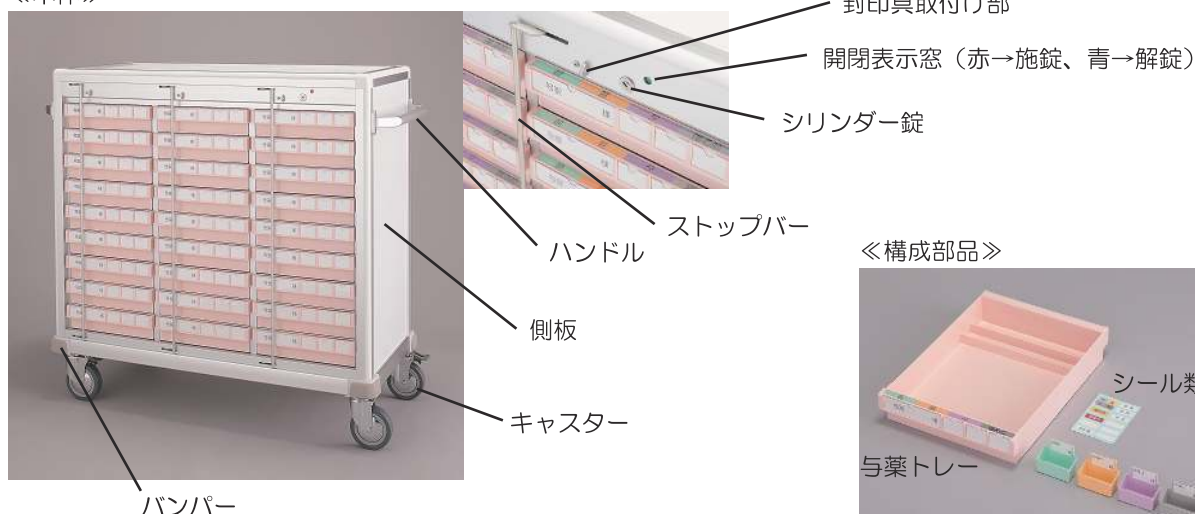

お手入れ方法

- 本製品が汚れた際は、乾拭きするか硬く絞った柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤かOA機器クリーナーを使用してください。
- 漂白剤、クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸類、及びこれに類するものは使用しないでください。変色したり塗装が剥がれる恐れがあります。

製品仕様

品番	7-7764-01	7-4748-01	7-4749-01	7-4750-01
型番	MC-L4DC48P-8	MC-L3DC36P-8	MC-L2DC27P-8	MC-L2DC18P-8
本体寸法	幅	1,545mm	1,223mm	882mm
	奥行	561mm	561mm	561mm
	高さ	1,332mm	1,332mm	1,086mm
対応ベッド数	48床用	36床用	27床数	18床用
キャスター	φ125mmキャスター（対角ストッパー付き）			
付属品	与薬トレー	48個	36個	27個
	個人ケース	1,536個	1,152個	864個
	シール類	必要数	必要数	必要数
別売オプション	封印具（7-7773-01（スタンダード）、7-7772-01（手切りタイプ））			

オプション

	品番	型番	サイズ（mm）	入数
①	7-7551-01	与薬トレー	315×438×80	1個
②	7-7551-02	個人ケース（1日分セット）	74×41×62	1セット（4個入）
③	7-7551-03	与薬トレー情報シール	-	1袋 （各100枚入）
④	7-7551-04	与薬トレー朝昼夕寝る前シール	-	
⑤	7-7551-05	曜日名札セット	-	
⑥	7-7551-06	各曜日名札セット	-	
⑦	7-7551-07	与薬名札セット	-	



保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は下記保証規定により修理いたします。

品 名			
型 式			
保証期間	お買い上げ日より１年間		
お買上日	年	月	日
お 客 様	様		
ご 住 所	TEL.		
取扱店名	担当者印		
住 所	TEL.		

アズワン株式会社

<保証規定>

- （１）弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- （２）次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- （３）ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- （４）本保証書は日本国内においてのみ有効です。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL. 0120-711-875

FAX. 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL. 0120-788-535

FAX. 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間 午前9時～12時、午後1時～5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

made in Japan
2019年9月 第二版作成