

取扱説明書


Instruction Manual

navis*

リクライニング丸型ベンチ

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
当社製品をより安全に、正しくお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書をお読みいただきますようお願いいたします。

また、お読みいただきました後も無くさないよう大切に保管してください。

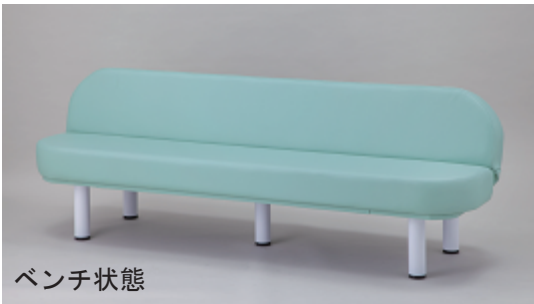

ベンチ状態



ベッド状態

使用上のご注意

下記の注意事項は、ご使用になられる方への安全や、製品の品質に関する重要な項目ですので、必ずお守りください。

警告

この注意事項を守らなければ、死亡または重傷などを負う可能性があります。

- 本製品は、背もたれを倒してフラットにすることで、簡易ベッドや診察台としてもご使用いただけるベンチです。用途以外のご使用はしないでください。怪我や破損の原因になります。
- 本製品の上で立ったり飛び跳ねたりしないでください。
- 乳幼児を一人で寝かさないでください。転落したり、座面や背もたれに顔が埋まり、窒息や怪我をする恐れがあります。
- 設置する際、滑りやすい床面や、段差・凹凸・傾斜のある場所は避けてください。
- 火気の近くで使用しないでください。火災や破損の原因になります。
- 分解や改造をしないでください。

注意

この注意事項を守らなければ、傷害を負うか物的損害が生じる可能性があります。

- 乱暴に扱わないでください。怪我や破損の原因になります。
- 可動部や調節部の隙間に手や指を入れないでください。怪我の原因になります。
- 脚にガタツキがある場合はそのまま使用しないでください。必ず増し締めしてください。
- 張り地の破れやクッションの破損、背もたれの動作不良などの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、購入代理店が弊社までご相談ください。そのまま使用されますと、本製品の破損により怪我の原因になる可能性があります。
- 屋外や水のかかる場所、高温多湿な場所では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所や、ストーブなど加熱機器の近くでは使用しないでください。
- 木質のフローリングや塩化ビニル樹脂など軟らかい床面では、本製品の脚部によってキズや凹みが発生する可能性があります。ご使用の際は、カーペットを敷くなど床面を保護してください。

お手入れ方法

- 本製品が汚れた際は、乾拭きするか硬く絞った柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤かOA機器クリーナーを使用してください。
- 漂白剤、クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸類、及びこれに類するものは使用しないでください。変色したり塗装が剥がれる恐れがあります。
- 次亜塩素酸ナトリウムなどで清拭した後にそのまま放置したり、濃度によっては変色や腐食する可能性があります。水を含ませて硬く絞った柔らかい布で拭いた後、乾拭きしてください。


組立方法

- ①本体座面の裏側に脚部（5本）をガタツキが無いようしっかりねじ込んでください。
- ②床面に設置した際にガタツキがある場合は、脚部先端のアジャスターでレベル調整してください。

使用方法


《ベッド状態にする場合》

右図の㊦の方向に、背もたれを限界まで前方に倒し、背もたれを支えながら後方に倒してください。

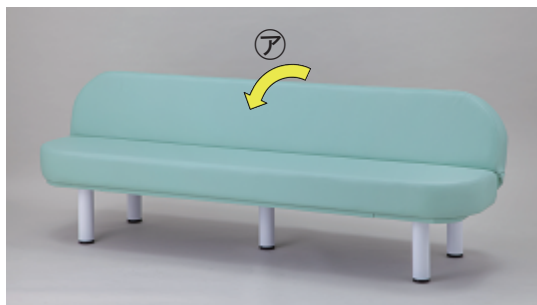

《ベンチ状態にする場合》

右図の㊧の方向に、背もたれを持ち上げ、好みの角度に設定してください。

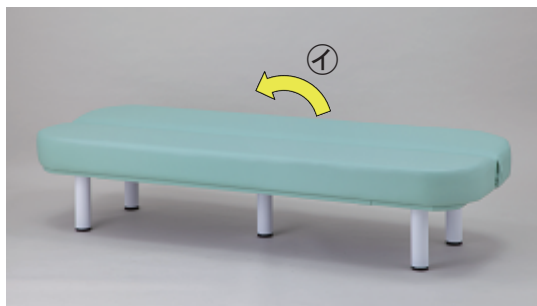

製品仕様

- 材質：フレーム／スチール（メラミン焼付塗装）、マット／抗菌レザー張り
- ベンチ状態サイズ：幅1800×奥行580×座高400/全高700mm
- ベッド状態サイズ：幅1800×奥行650×全高400mm

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は下記保証規定により修理いたします。

品 名			
型 式			
保証期間	お買い上げ日より１年間		
お買上日	年	月	日
お 客 様	様		
ご 住 所	TEL.		
取扱店名	担当者印		
住 所	TEL.		

アズワン株式会社

<保証規定>

- （１）弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- （２）次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- （３）ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- （４）本保証書は日本国内においてのみ有効です。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL. 0120-711-875

FAX. 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL. 0120-788-535

FAX. 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間 午前9時～12時、午後1時～5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

made in Japan
2019年9月 初版作成