

取扱説明書

Instruction Manual

navis* ナビトレ (乳がん触診)

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますよう御願ひ申し上げます。
また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

目次

注意事項	P. 1
概要図	P. 1
使用方法	P. 2
製品保証	P. 2

注意事項


《使用上の注意事項》

- 本製品は、実際の処置に近いトレーニングができるよう忠実に再現した人工モデルですが、まったく同じ効果が得られることを保証するものではありません。
- 本製品を目的以外の用途で使用しないでください。
- 本製品は消耗品です。繰り返し使用されますと、材質の劣化や破損が発生します。目的とするトレーニングの効果が得られない場合は改めてお買い求めください。
- 本製品を改造したりしないでください。保証の対象外となります。
- 本製品は予告なしに仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

《お手入れ・保管時の注意事項》

- 保管する際は、包装されていた袋に戻し、直射日光の当たる場所や、高温多湿な場所は避けて保管してください。


概要図

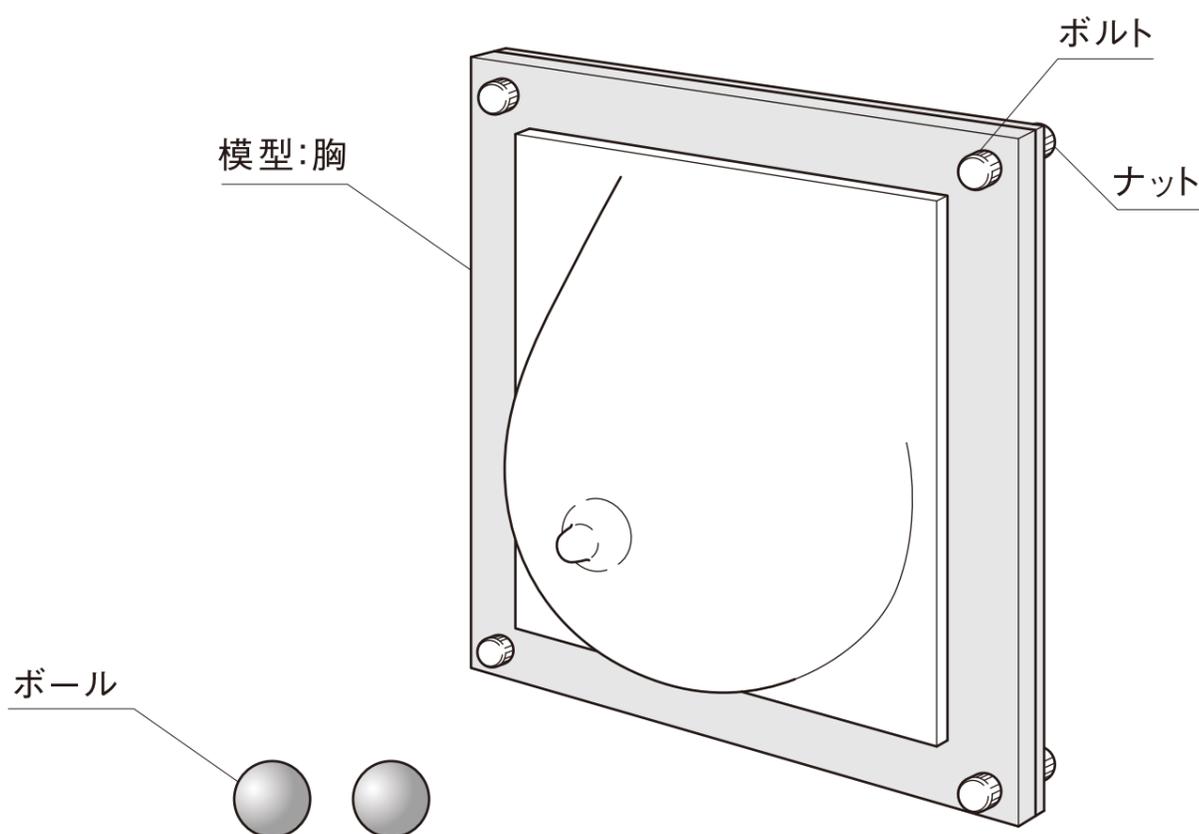

※本製品には、しこり用のボールが2個付属しています。


使用方法

(1) ボール位置変更

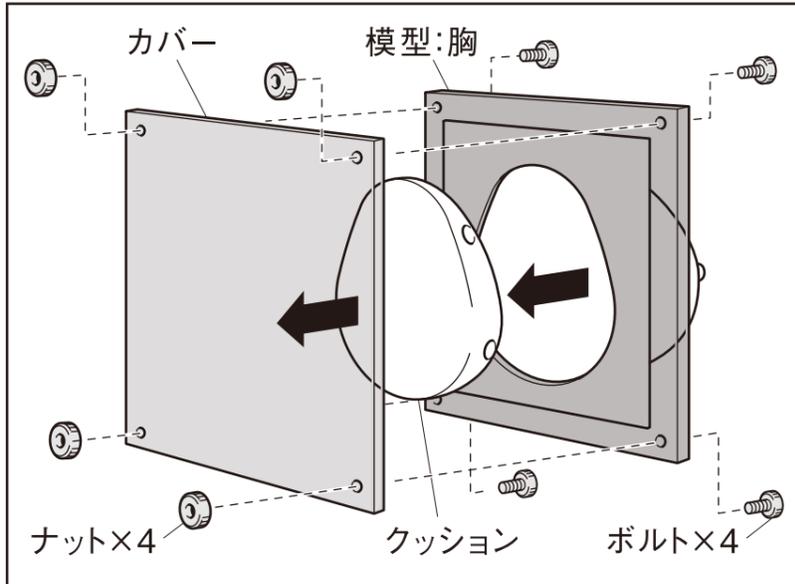

《手順① 解体（組立）》

解体は4ヶ所で留めてあるボルトを外し、乳房モデルの中にあるクッションを取り出します。
※組立は解体と逆の手順で行います。
ボルトは仮留めのあと、均一に増し締めしてください。

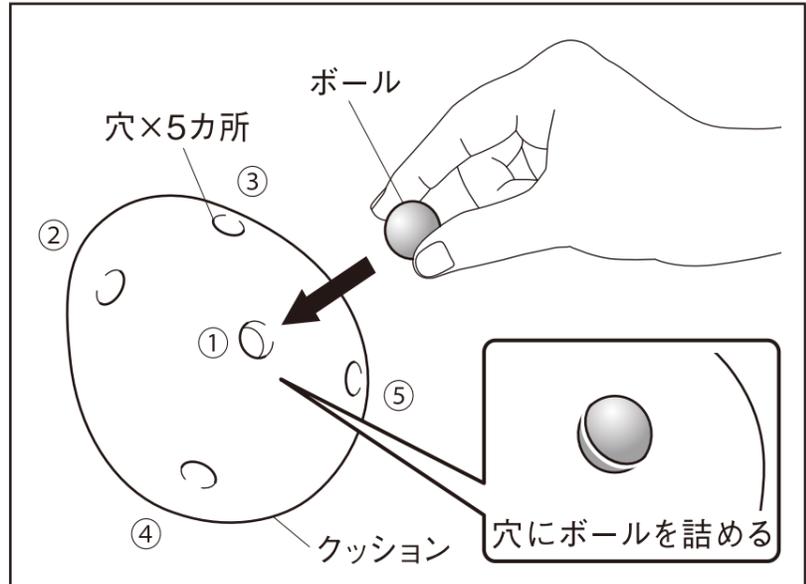

《手順② ボールの位置変更》

クッションには、ボールをセットできる凹部が5ヶ所あります。
お好みの位置にセットしてください。

(2) 触診について

- ・「の」の字を書くように、指の腹で軽くなでるように“しこり”の有無を調べて下さい。
- ・本製品はしこりの有無を確認するトレーニングを目的としており、乳頭からの分泌物を確認するものではありませんので、乳頭部分を引っ張らないで下さい。製品が損傷する恐れがありますのでお止めください。
- ・爪を立てたり、引っ掻くことは製品が損傷する恐れがありますので、お止め下さい。
- ・製品表面にベタツキがでた場合は、市販のベビーパウダーを塗布して下さい。

製品保証

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品名	
型式	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お名前	様
ご住所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875
FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535
FAX 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

MADE IN JAPAN

2018年12月 第二版作成