


取扱説明書

Instruction Manual

診察台・枕用ロールシーツスタンド

ERS-700K

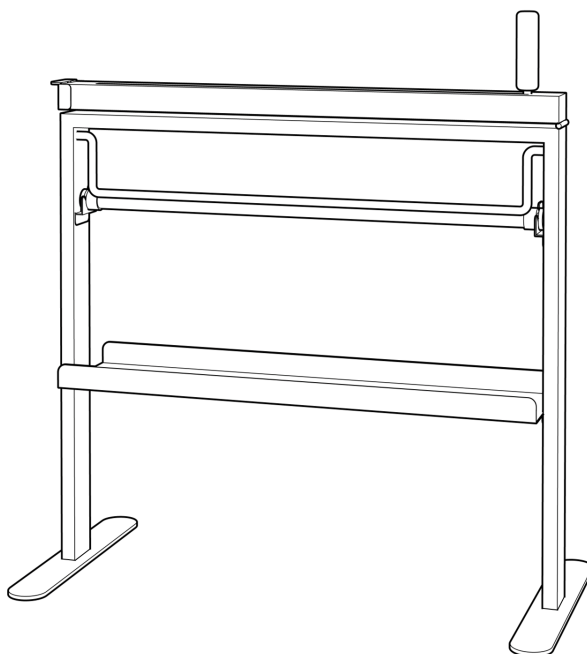

目 次

●安全上のご注意	2
●付属品の確認	2
●組立方法	3~4
●シーツのセット方法	5~7
●シーツのカット方法	8
●カッターユニットの交換方法	9~10
●お手入れ方法	11
●仕様	11
●製品保証	12


お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み
になって、正しくお使い下さい。
『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ
ところに添付して下さい。

安全上のご注意

- 本製品にはカッターの刃が内蔵されています。お取り扱いには十分ご注意ください。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 本製品の上に乗ったり、もたれかかったりしないでください。転倒してケガをしたり、破損する恐れがあります。
- 誤った使用方法や無理な荷重は変形・損傷の原因になりますのでおやめください。
- 使用中に止めネジのゆるみによりガタツキが生じた場合はすぐに止めネジを締め直してください。そのままご使用されますとケガの原因になります。
- 本体や他の部品に、強い衝撃を与えたり無理な力を加えると、ひずみが生じたり、転倒してケガをする恐れがありますので、丁寧に扱ってください。
- 凹凸や傾きのある場所に設置しないでください。転倒してケガや破損の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や高熱を発するものの近くには設置しないでください。
- 製品を第三者に貸すときは、取り扱い方法を十分に説明してください。


付属品の確認

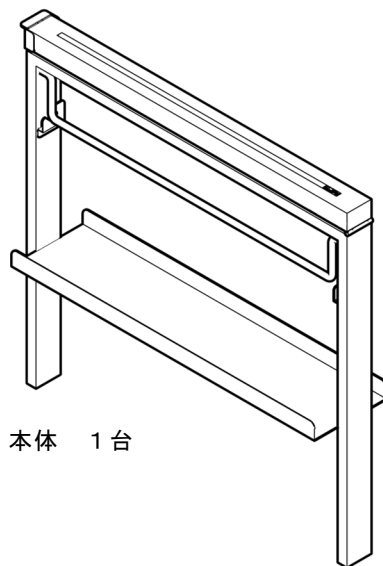


本体 1台




ハンドル 1本

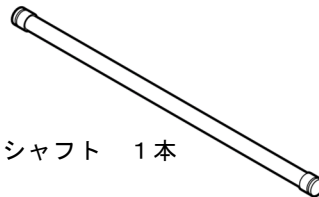

シャフト 1本

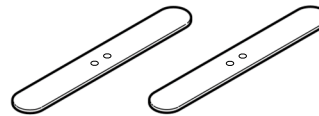

ベース 2本

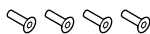

止めネジ 4本



六角レンチ 1本


組立方法

組立時の注意


- 部品や床面にキズが付かないようにダンボール等の上で作業してください。
- 組み立ての際は、電動ドライバー等の電動工具を使用しないでください。ネジ穴を壊す場合があります。

1. 本体にベースを止めネジで取り付けます。


- 六角レンチでしっかりと締め付けてください。

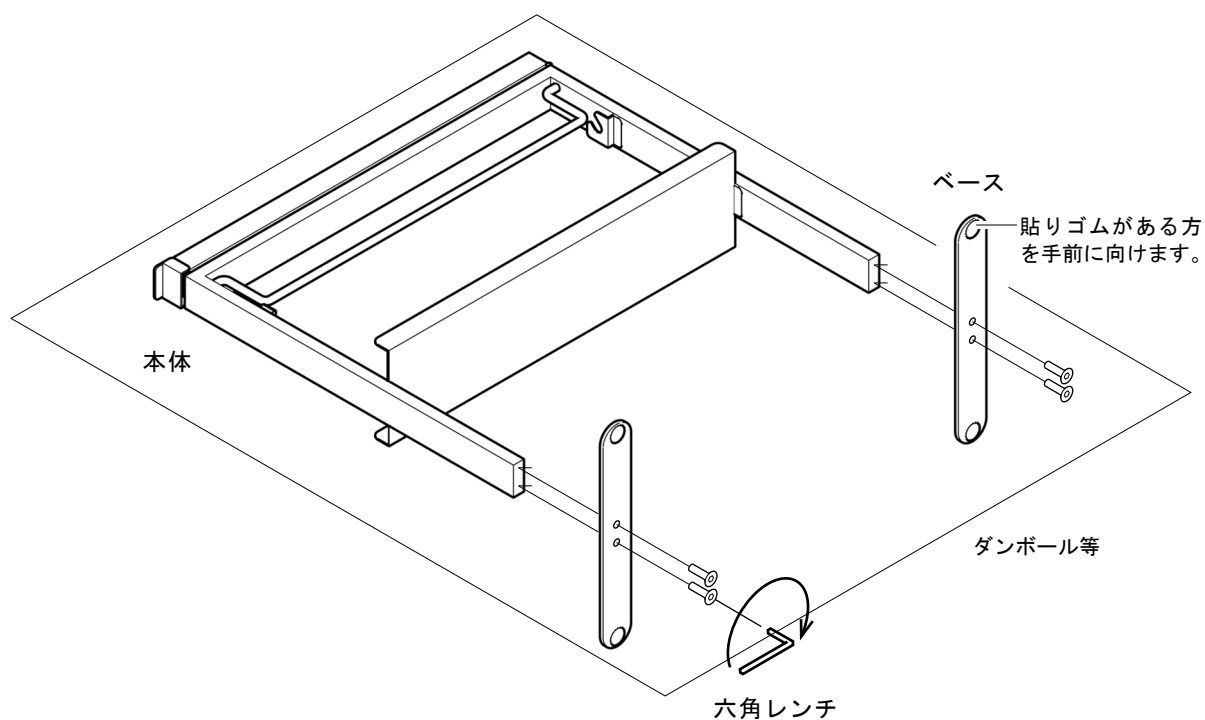

2. 本体各部の固定用テープをはがします。

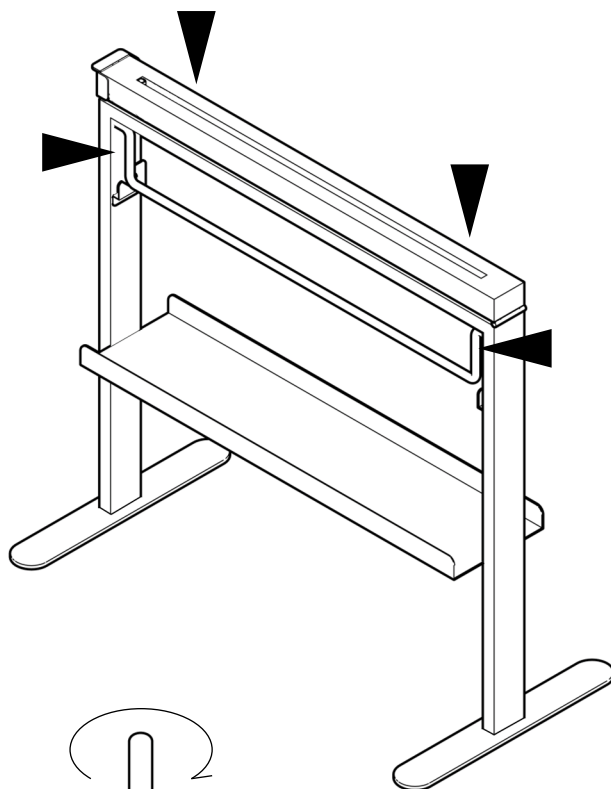


2. ハンドルを取り付けます。
時計方向に手でしっかりと
締め付けます。

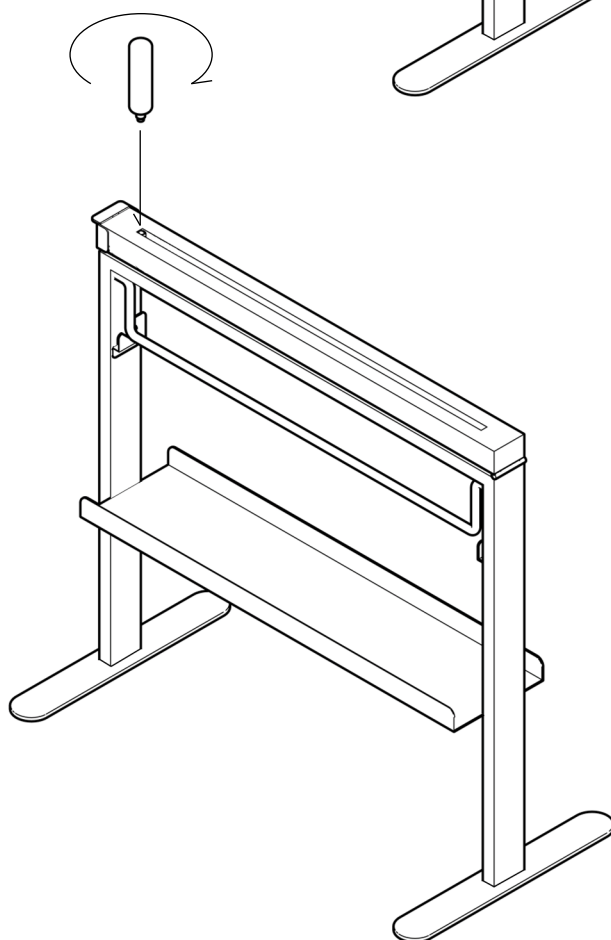


シーツのセット方法

1. ロールシーツにシャフトを差し込みます。

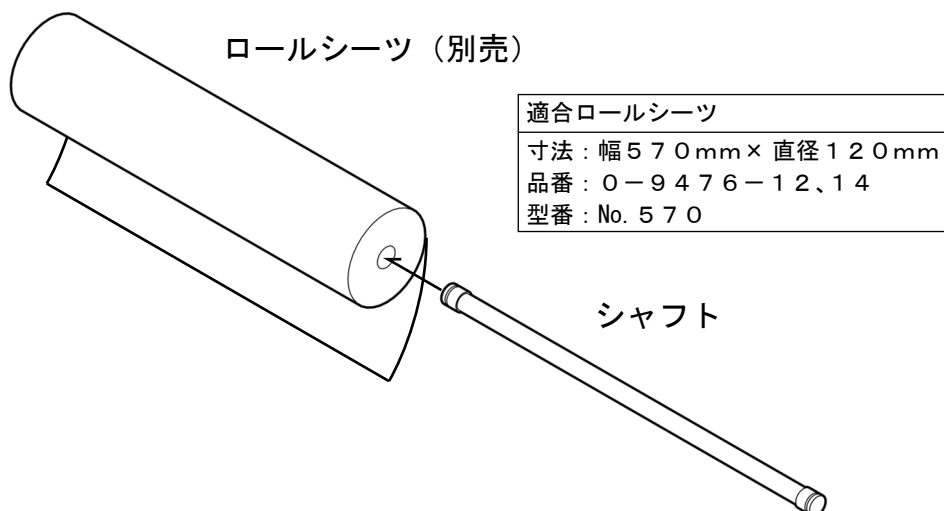


2. シーツおさえを持ち上げ、ロールシーツを本体にセットします。

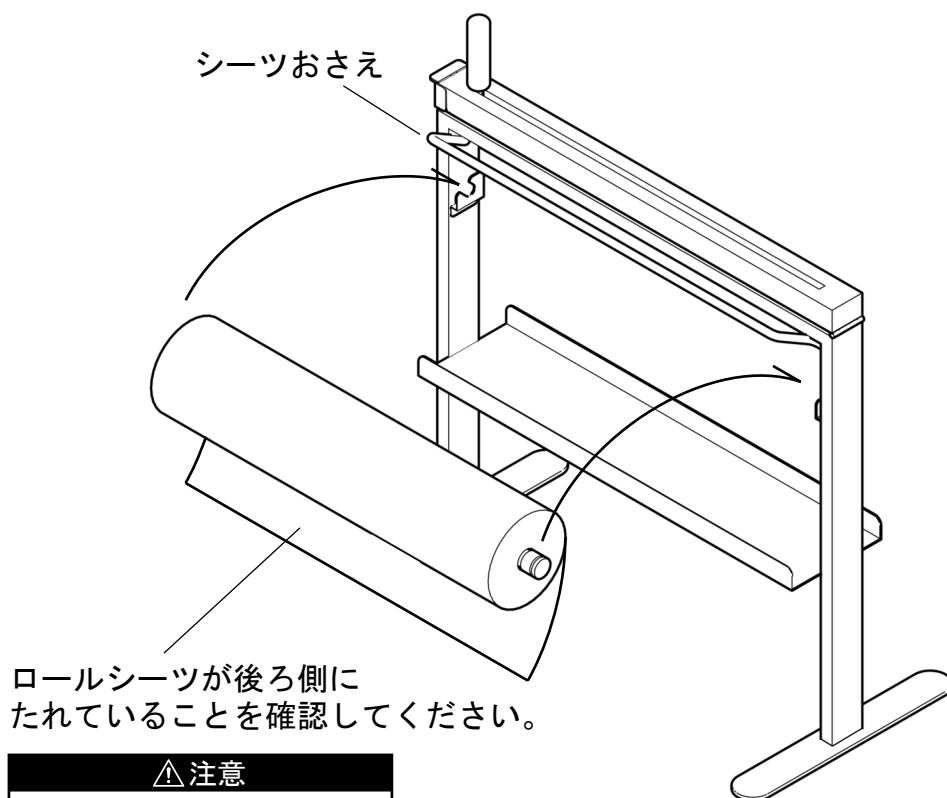


△注意

ロールシーツの巻き方向に注意


3. ハンドルを右側に寄せます。

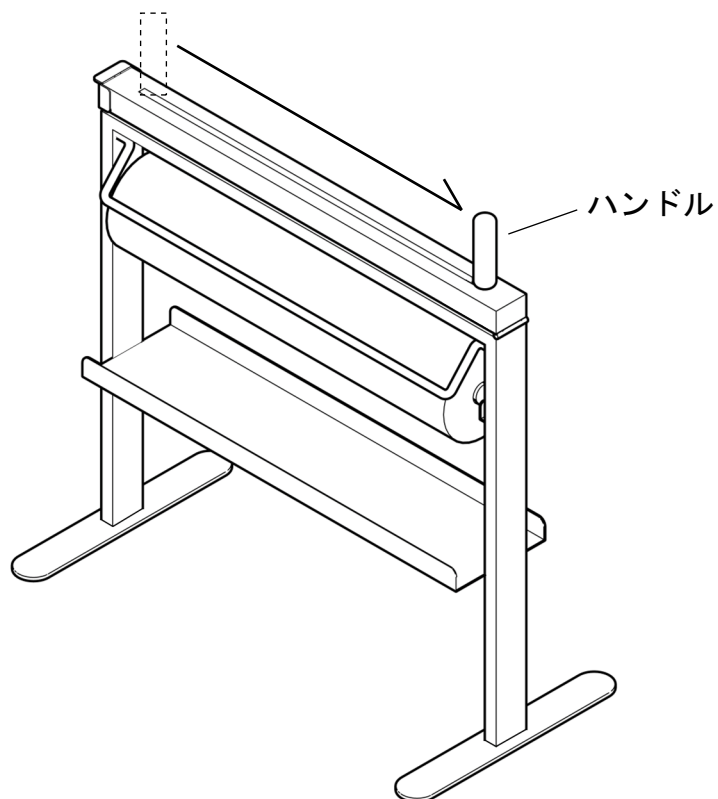


4. ツマミを持ってカッターレールをゆっくりと開きます。

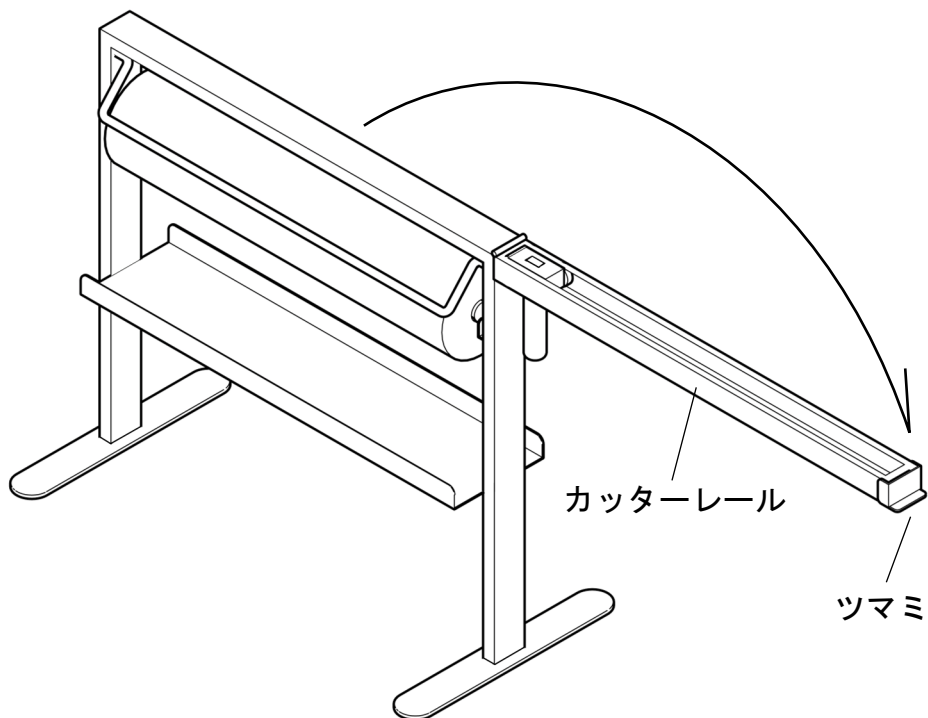

5. 下図のようにロールシートを通します。

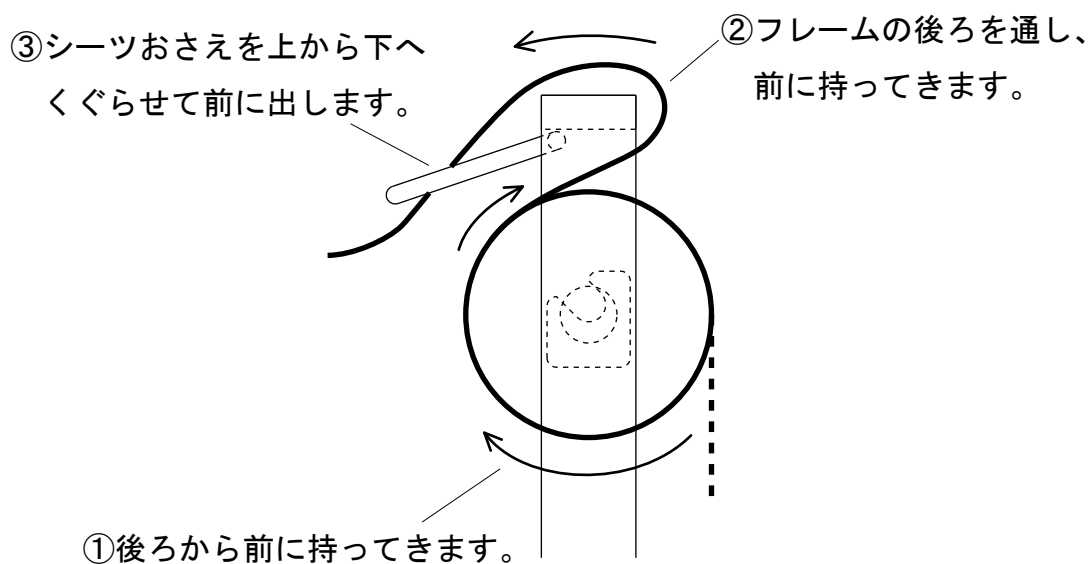


6. ツマミを持ってゆっくりとカッターレールを戻します。

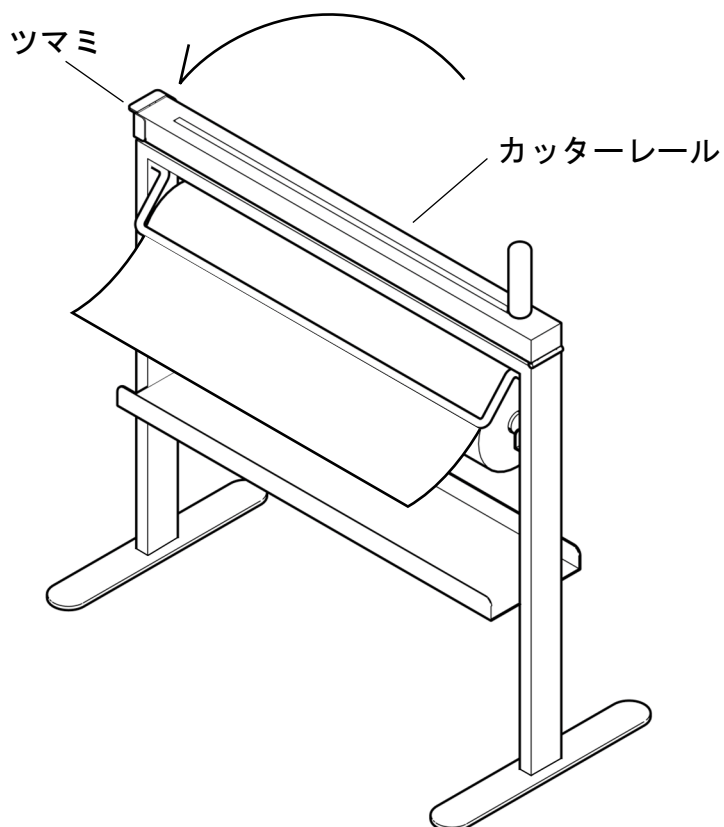


シーツのカット方法


- ①ハンドルを軽く押し下げたまま横にスライドさせます。

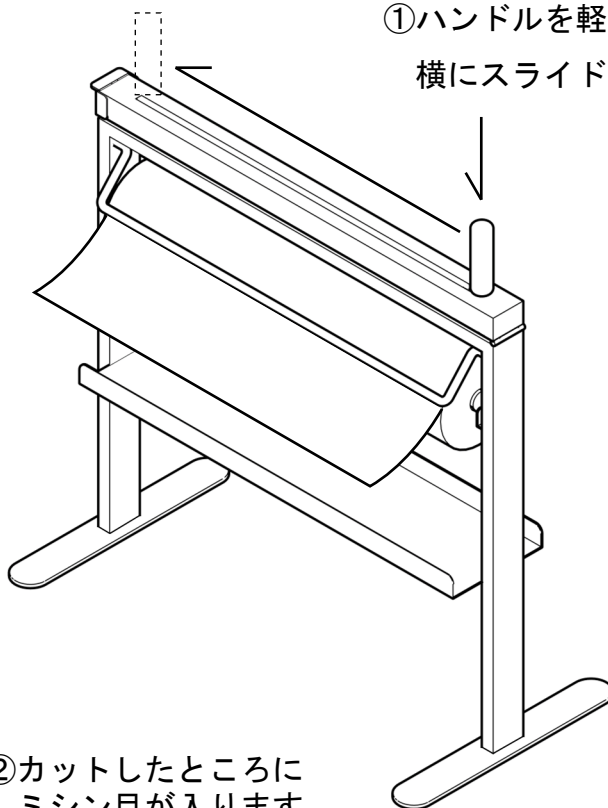

- ②カットしたところにミシン目が入ります。

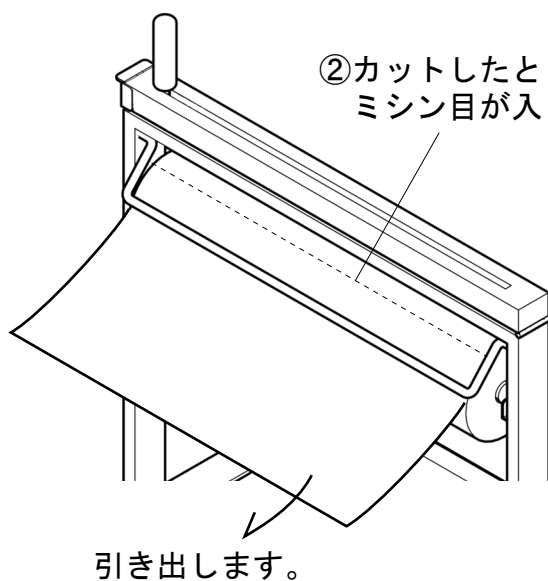

- ③ロールシートを引き出し、ミシン目がシートおさえを超えたところで切り取ります。

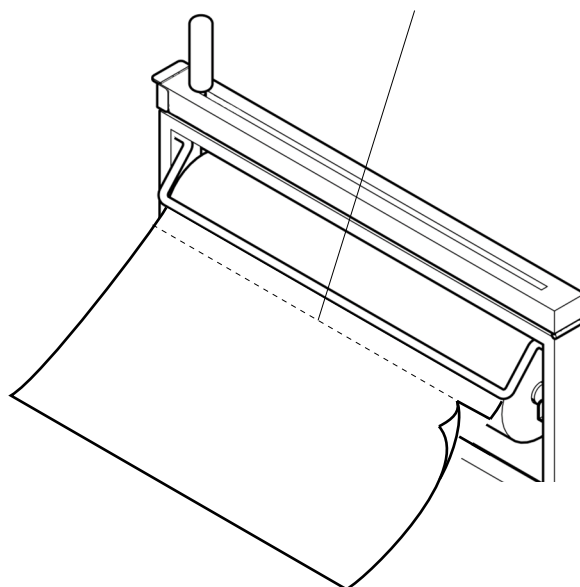

カッターユニットの交換方法


カッターの刃は消耗します。ミシン目に切れなくなった場合は、カッターユニットを交換してください。（別売）

⚠ 安全上のご注意（必ずお守りください）




カッター刃に触らないでください。けがの原因となります。

1. ハンドルをツマミ側に移動させ、ハンドルを手で反時計方向に回して外します。

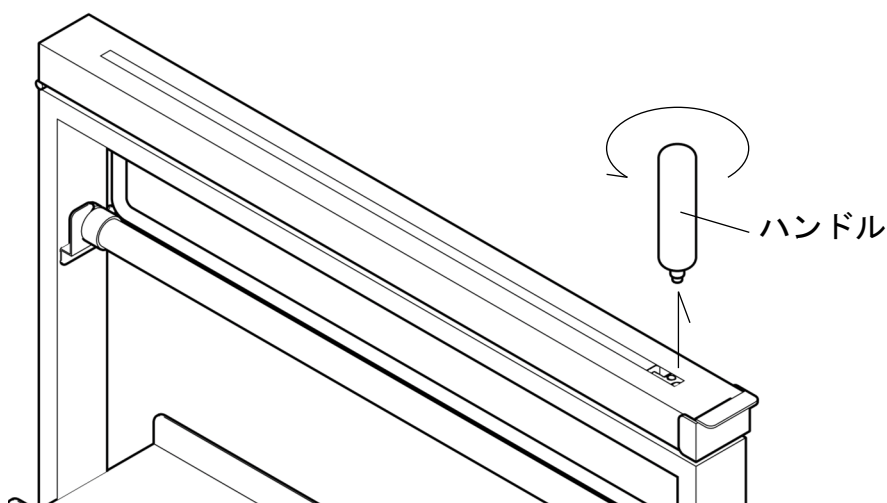

2. ツマミのネジをプラスドライバーで外し、ツマミを外します。

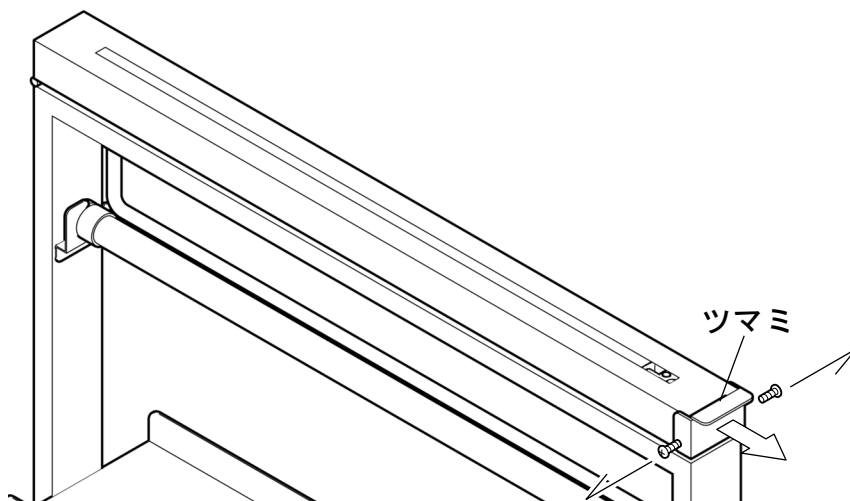


3. カッターユニットを外します。

⚠ 安全上のご注意（必ずお守りください）



カッター刃に触らないでください。けがの原因となります。

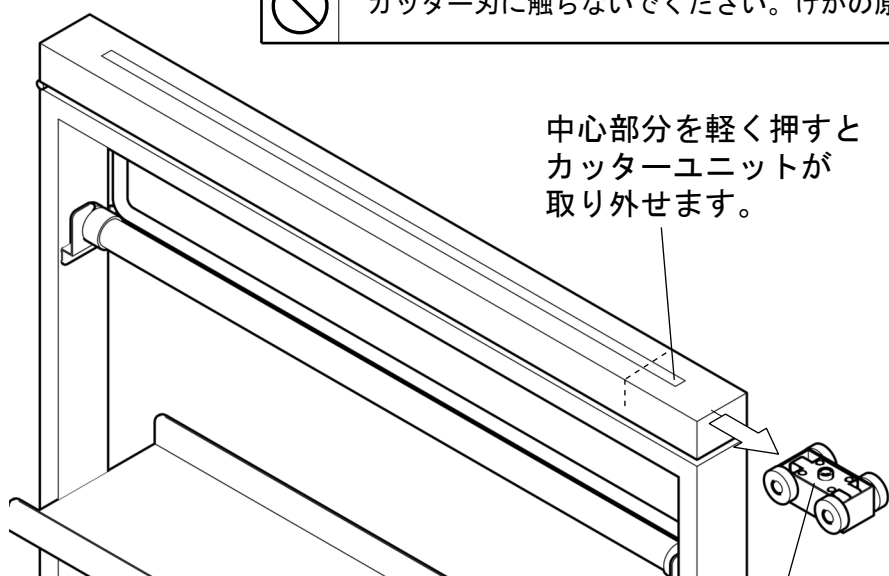


中心部分を軽く押すと
カッターユニットが
取り外せます。

中心部を強く押すと
カッター刃が露出するので、
十分に注意してください。

4. 逆の手順で新しいカッターユニットを取り付けます。

ツマミ、ハンドルを取り付け、正しく動作するか確認してからご使用ください。

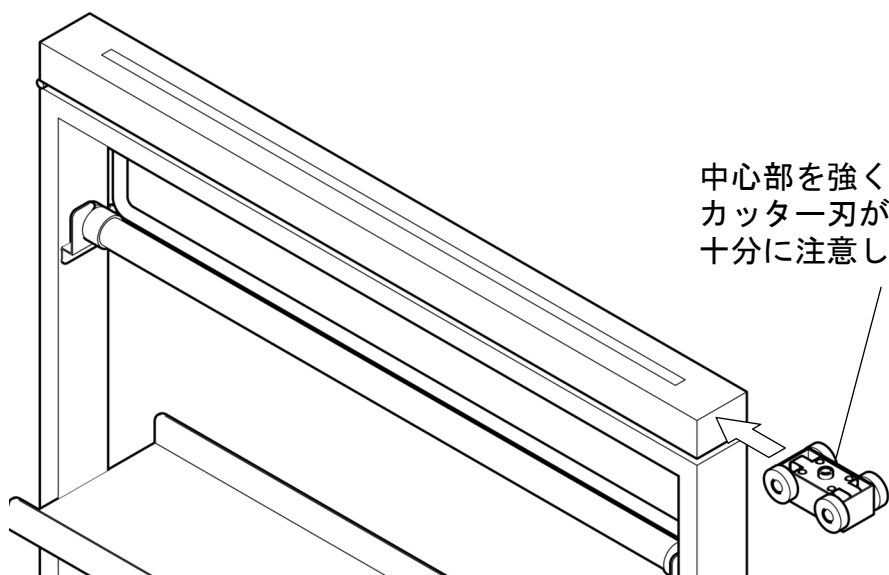

中心部を強く押すと
カッター刃が露出するので、
十分に注意してください。

お手入れ方法

- 汚れがひどい時は薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、水を浸した布で洗剤液をよく拭き取ってください。その後乾いた布で軽く拭き、自然乾燥させてください。
- シンナーやベンジンは絶対に使用しないでください。

仕様

名称	診察台・枕用ロールシーツスタンド	
品番	ERS-700K	
外形寸法	幅	700mm
	奥行き	350mm
	高さ	750mm
質量	8.3kg	
主要材質	スチール(粉体塗装)	
原産国	日本	
適合ロールシーツ	幅570mm×直径120mm 品番：0-9476-12、14 型番：No. 570	

製品保証

保証規定

- (1) 弊社商品を、該当商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より 1 年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・ 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
 - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
 - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここでいう保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証証

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定（1）に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品名	
型式	
保証期間	お買い上げ日より 1 年間
お買い上げ日	年 月 日
お名前	様
ご住所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL.

アズワン株式会社

商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

TEL 0120 - 711 - 875

FAX 0120 - 700 - 763

問い合わせ専用 URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは
修理窓口

TEL 0120 - 788 - 535

FAX 0120 - 788 - 763

問い合わせ専用 E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前 9 時～12 時、午後 1 時～5 時 30 分 土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません。