

取扱説明書

かどまる訓練台（電動昇降）

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。


区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

 警告	電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。差し込みが不完全だとショートや発熱により発火の原因となります。
	使用しないときは電源プラグを抜いてください。不用意な操作で思わぬ事故が起きたり、絶縁劣化による漏電火災の原因となります。
	電源コードやプラグは傷んだ状態で使用しないでください。感電や発火の原因となります。
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに、電源プラグを持って引き抜いてください。電源コードが破損し感電や発火の原因となります。
	本製品を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますと転倒する恐れがあります。
	本製品の作動前、及び作動中は、まわりの人の身体や手足、障害物が無いか十分注意してください。本製品に挟まれ、人身事故や物損事故の原因となります。
	本製品は電気機器を使用していますので、水をかけたりしないでください。故障や感電の恐れがあります。
本製品を移動させるときは、高さを最下限まで下げてから移動させてください。転倒して人身事故や物損事故等の原因となります。	

 注意	モーター稼働最大耐荷重150kg。最大耐荷重以上の負荷をかけると、モーター故障の原因となります。（静止時耐荷重300kg）
	電源コードやフットスイッチのコードの上に物を置かないでください。コードが傷ついて、断線、ショートによる感電や発火の原因となります。
	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	ゆりみ、がたつき、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。
	コードで脚を引っかかないようご注意ください。
	昇降を連続して使用するとモーターが加熱してきます。2分以上連続で作動させないでください。
	フットスイッチは押し間違いの無いように、十分注意して操作を行ってください。操作を行う人は回りに十分注意を払い、言葉を掛けてから操作を行ってください。
	ぐらつきが発生する場合は、アジャスターで微調整してからご使用ください。故障や破損の恐れがあります。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店、または当社にご相談ください。
	通常、キャスターは常温、構内で使用される事を想定しております。高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品等の影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化が進む恐れがあります。やむをえず、ご使用になる場合は個々の用途に合わせた金具、車輪、グリスが必要です。尚、材質により床面に汚染の恐れがあります。
キャスターは消耗品のため、劣化、破損等の不具合が生じた場合は、ただちに交換してください。	
アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。ようお願いいたします。	


設置方法

● 使用方法と注意事項

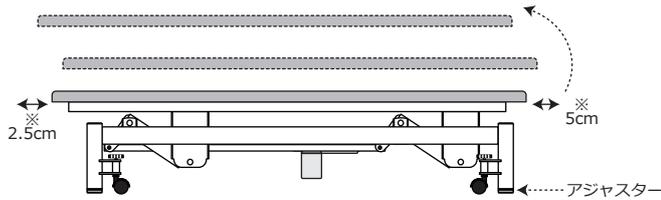

- **本製品は垂直に昇降しません。**前後に円弧を描きながら昇降しますので、左記可動図の作動範囲（※印）以上を壁、または人から離して設置してください。
- 本製品の設置後、床との隙間により安定しない場合は、アジャスターで微調整して安定させてください。

フットスイッチの操作方法及びモーターの仕様

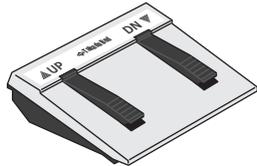


▲UP：上昇 DN▼：下降
踏んでいる間作動し、離すと停止します。

【使用上のご注意】

※本製品内部に手足を挟まれる危険性があります。高さを操作中には、周辺に挟まれる危険性のある物、または患者さまなどの人が近づかないよう十分ご注意ください。

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力（6000N 負荷時）	MAX 84W / 3.5A
昇降速度（100kg 荷重時）	上昇：約 29 秒 下降：約 23 秒
最大耐荷重	昇降時：150kg 静止時：300kg
フットスイッチコードの長さ	2.5m
電源コードの長さ	3.2m

レベルキャスターの操作方法

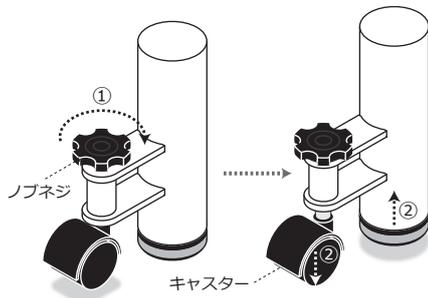


- ①ノブネジ（4ヶ所）を時計回りに回します。
- ②キャスターが伸び、脚部が浮き上がりますので、本製品が移動可能な状態になります。
- ③本製品移動後は、脚部アジャスターが床面にしっかりと設置するよう、ノブネジを反時計回りに回してください。脚部が床面に設置しているのを確認後、本製品をご使用ください。

定期メンテナンスのお願い

● 快適にお使いいただくために

- 付属のグリーススプレーで3ヶ月を目安に可動部分に適量吹き付けてください。給油を怠ると、がたつきや摩擦音の原因となります。

※回転部分またはボルト部分にグリーススプレーを吹き付けてください。
 ※グリースを吹き付けた際にグリースの飛散や、垂れて床を汚すおそれがありますので布等をあててご使用ください。
 ※付属のグリーススプレーは記載の使用方法をよく読んでから取り扱ってください。
 ※万一摩擦音が発生した場合、給油により軽減しますが、浸透するまでに2、3日かかります。軽減されない場合は、ご購入代理店、または当社にお申し付けください。

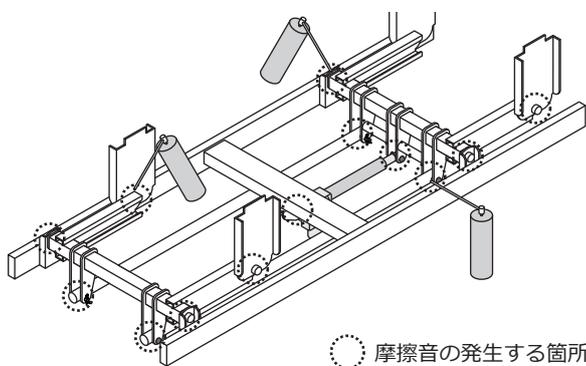

○ 摩擦音の発生する箇所

修理を依頼する前に

●「故障かな？」と考える前に次の点をお調べください。

症状	ここをお調べください	処 置
ベッドが動かない	入電源がない 電源プラグがコンセントからはずれていませんか？	確実に差し込んでください。
	電源コードが断線していませんか？	ご購入代理店、または当社にご連絡ください。
	入電源がある フットスイッチが断線していませんか？	フットスイッチの交換が必要です。ご購入代理店、または当社にご連絡ください。
	連続して昇降操作をしていませんか？	ご購入代理店、または当社にご連絡ください。
がたつき・傾きがある	アジャスターの調節がされていますか？	アジャスターを回転させて微調整してください。

仕様

- 材 質：マットカバー／抗菌・防汚レザー（耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃）、マット中身／ウレタン、脚部／スチール（粉体塗装）
- 耐荷重：300kg
- 電 源：AC100V 50/60Hz（ACコード長／3.2m、フットスイッチコード長／2.5m）
- サイズ：1200×2000×400～750mm
- 重 量：約 87kg
- 脚 部：アジャスター・キャスター付き

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の際は下記保証規定により修理いたします。

品名	_____
型式	_____
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買上日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL. _____
取扱店名	担当者印
住所	TEL. _____

アズワン株式会社

<保証規定>

- （１）弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- （２）次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- （３）ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- （４）本保証書は日本国内においてのみ有効です。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL. 0120-711-875

FAX. 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL. 0120-788-535

FAX. 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間 午前9時～12時、午後1時～5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

made in Japan
2019年 9月 初版作成