


# 取扱説明書

Instruction Manual

## 与薬カート「メディロックシステム」

### 目 次

安全上のご注意	・ P. 2
安全のために必ずお守りいただく項目	・ P. 3
製品概要「KY-20」	・ P. 4
製品概要「KY-30」	・ P. 5
製品概要「KY-40」	・ P. 6
組立方法	・ P. 7
ご使用方法	・ P. 8-12
お手入れ方法（末永くお使いいただくために）	・ P. 12
製品保証について	・ P. 13

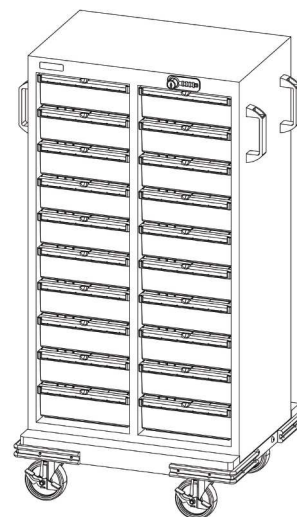

### お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み  
になって、正しくお使い下さい。





『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ  
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用  
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ  
ところに添付して下さい。

**アズワン株式会社**




## 安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上、特に注意すべき事項についての情報をその重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って安全にご使用願います。

### 表示とその意味

 <b>危険</b>	誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる事が想定される場合。
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が生じる事が想定される場合。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、傷害を負う危険および物的損害のみが生じる事が想定される場合。
 <b>お願い</b>	安全を確保するために注意が必要な事項

### 安全確保の図記号

	△記号は注意（危険・警告を含む）を示します。具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“感電注意”を示します。
	⊘記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“分解禁止”を示します。
	●記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な強制内容は●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は“差込プラグを抜くこと”を示します。


## 安全のために必ずお守りいただく項目

⚠ 警告	
⊘	<ul style="list-style-type: none"> <li>●書類や小物の収納の用途以外には使用しないでください。転倒の恐れがあります。</li> <li>●耐荷重以上の荷物を置かないでください。変形し転倒する恐れがあります。</li> <li>●製品の上に乗らないでください。転倒の恐れがあります。</li> </ul>
⚠ 警告	
⊘	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品の分解、改造はしないでください。けが、故障の原因になります。</li> <li>●すきまに指をいれしないでください。けがの原因になります。</li> <li>●トレーには許容積載量以上のものを入れしないでください。 破損や変形によりけがの原因になります。</li> <li>●鍵を差し込んだままの状態にしないでください。 けがや衣服の損傷の原因になります。</li> <li>●鍵をかけた状態で、必要以上の力でトレーを引っ張らないでください。 破損や変形によりけがの原因になります。</li> <li>●変形、破損したまま使用しないでください。 転倒、落下によりけがをする恐れがあります。</li> <li>●取付ビスがゆるんだり、はずれたままで使用しないでください。</li> <li>●平らな場所で使用してください。それ以外の場所で使用すると、転倒、けが、破損の原因となります。</li> </ul>

## 製品概要

### 「与薬カート KY-20」

#### ■製品全体図

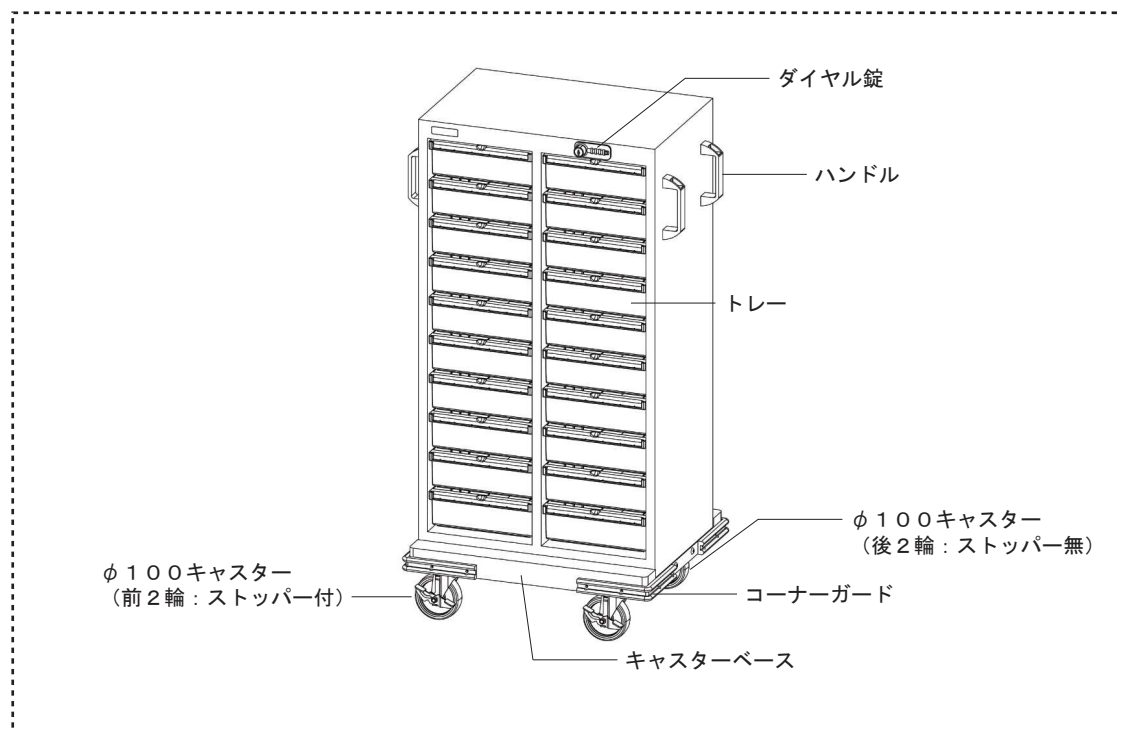


#### ■仕様

本体寸法(mm)		W622×D486×H1121
トレー内寸(mm)		W224×D311×H79
トレー許容積載量(kg)		2
色	キャビネット本体	ホワイト
	トレー	クリア
材質	キャスターベース	ホワイト
	キャビネット本体	SECC
	レール	HIPS
	トレー	GPPS
	キャスターベース	SPCC
付属品		取扱説明書、非常解錠キー、見出紙×20

## 製品概要

### 「与薬カート KY-30」

#### ■製品全体図

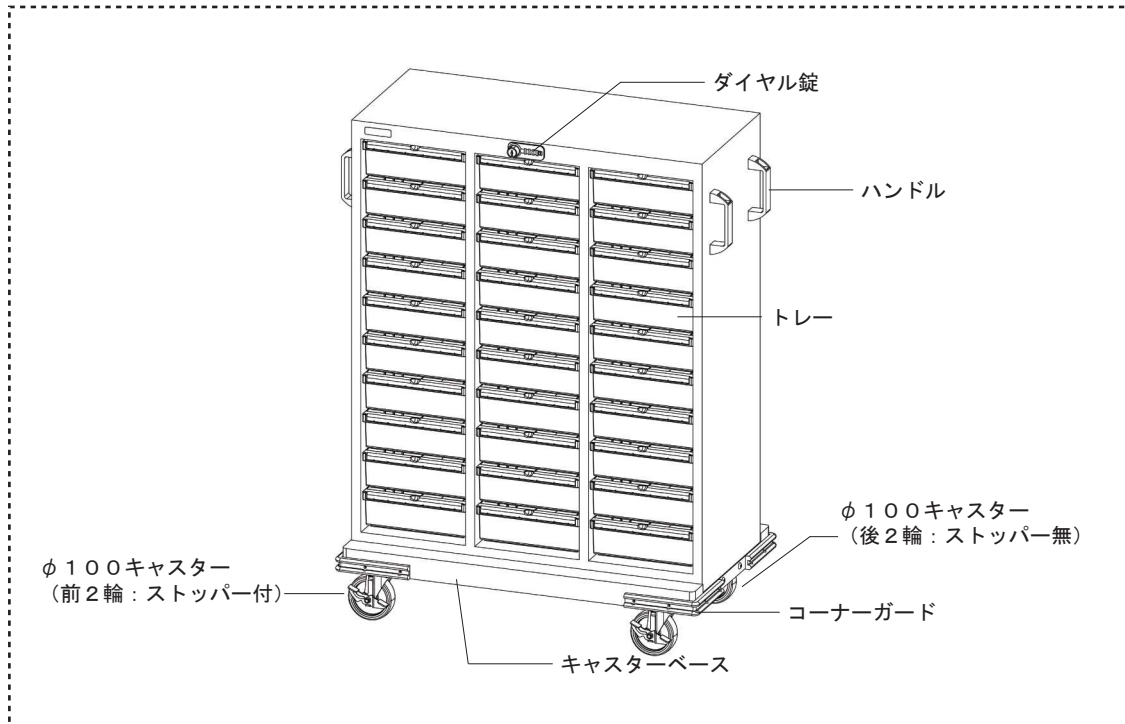


#### ■仕様

本体寸法(mm)		W830×D486×H1121
トレー内寸(mm)		W224×D311×H79
トレー許容積載量(kg)		2
色	キャビネット本体	ホワイト
	トレー	クリア
	キャスターベース	ホワイト
材質	キャビネット本体	SECC
	レール	HIPS
	トレー	GPPS
	キャスターベース	SPCC
付属品		取扱説明書、非常解錠キー、見出紙×30

## 製品概要

### 「与薬カート KY-40」

#### ■製品全体図

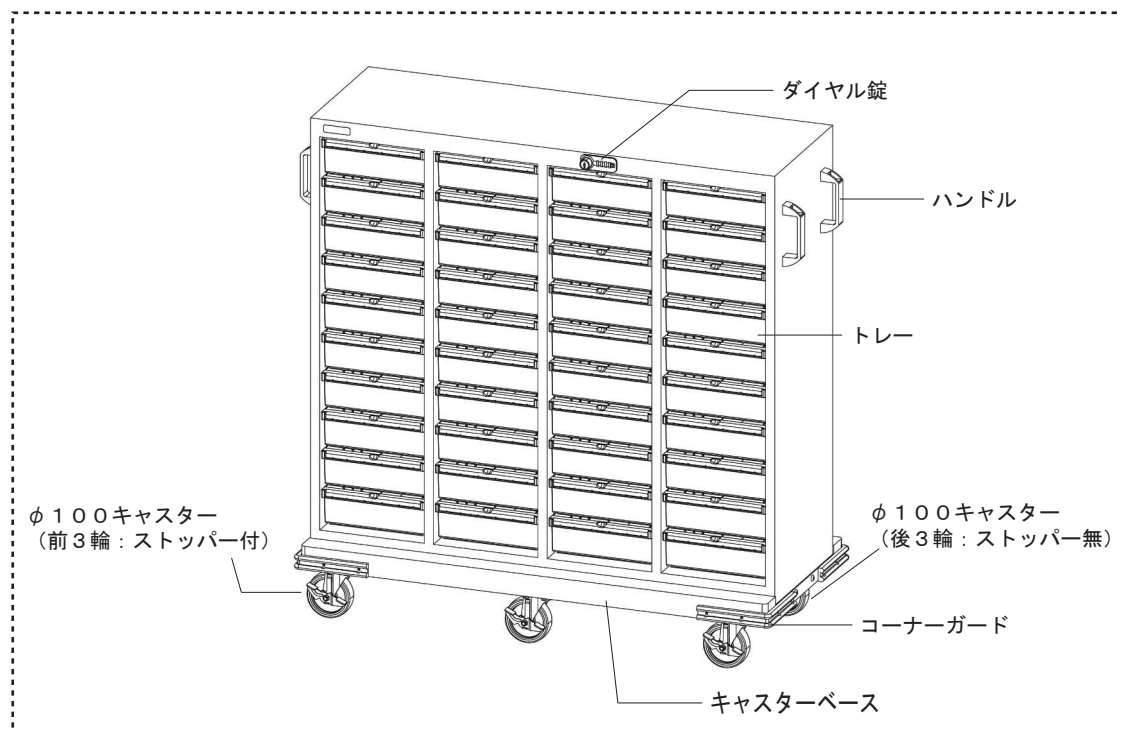

#### ■仕様

本体寸法(mm)		W1090×D486×H1121
トレイ内寸(mm)		W224×D311×H79
トレイ許容積載量(kg)		2
色	キャビネット本体	ホワイト
	トレイ	クリア
材質	キャスターベース	ホワイト
	キャビネット本体	SECC
	レール	HIPS
	トレイ	GPPS
	キャスターベース	SPCC
付属品		取扱説明書、非常解錠キー、見出紙×40

## 組立方法

### ■組立に必要な付属品

部品名	色	数量
樹脂ハンドル	白	4
六角穴付ボルト(M8×16)	－	8


### ■組立に必要な工具類

- ・六角レンチ（6mm用）

### ■組立時の注意事項

- ・梱包を開く時は、刃物や梱包材でけがをしないように注意してください。
- ・梱包を開く時は、刃物で製品を傷つけないように注意してください。

### ■組立方法

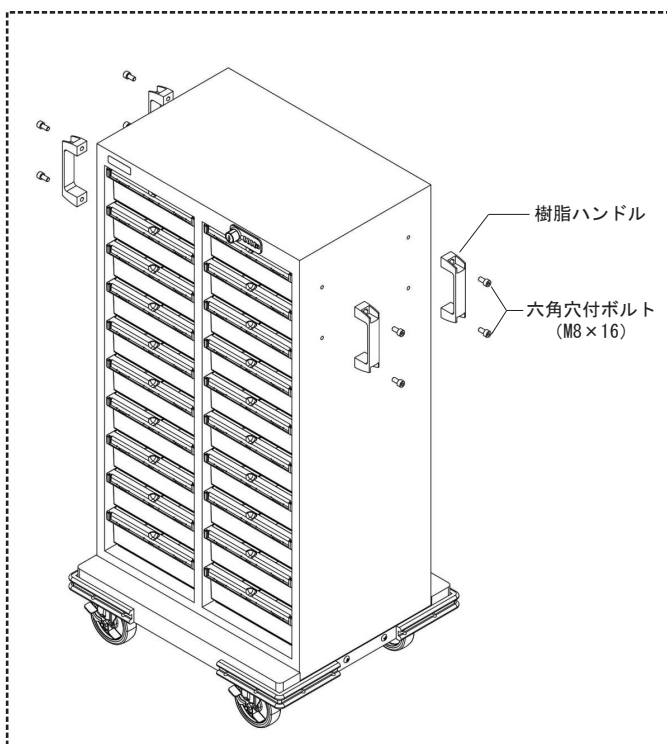


- ① キャビネット部側板の取付穴に、樹脂ハンドル（白）を縦に六角穴付ボルト（M8×16）で取り付けます。前面側、背面側の2箇所に取り付けてください。
- ② 反対側の側板にも、同様に取り付けてください。

## ご使用方法（ダイヤル錠の操作方法）




～ご使用の前に～

- ・工場出荷時は、ダイヤル錠は施錠されています。また、暗証番号は「0000」に設定されています。
- ・ご使用前に必ず動作確認を行ってください。
- ・動作確認後に必ず任意の暗証番号を設定してください。
- ・付属のシールをダイヤル錠の左側に貼っていただくと、操作がわかりやすくなります。

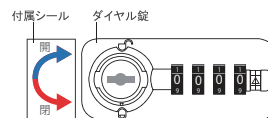

### 1. 動作確認




- ① ダイヤルが「0000」であることを確認します。
- ② ツマミを右（開）へ回しきります（約180度）。
- ③ ロックが解除されトレイが引き出せることを確認します。  
確認できたらトレイを戻し、必ず任意の暗証番号の設定を行ってください。（→「2. 任意の暗証番号の設定」へ）。

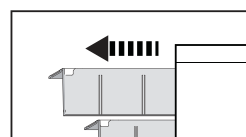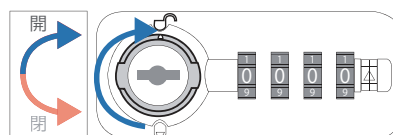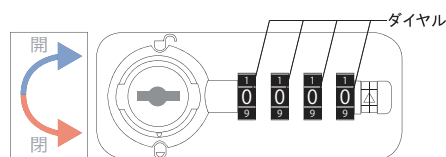

### 2. 任意の暗証番号の設定


例：現行番号 0000 から 新番号 1234 に変更する場合など

- ① ダイヤルが「0000」であることを確認します。
- ② スライドを「パチッ」と音がするまで上にずらします。  
※スライドは誤作動防止のため、やや力を入れないと動きません。
- ③ ダイヤルを「1234」に合わせます。

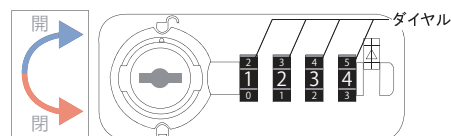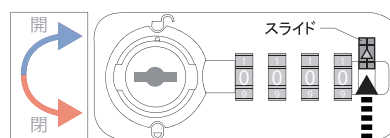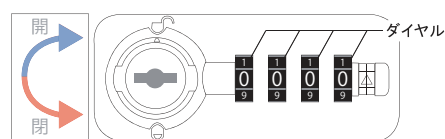

## ご使用方法（ダイヤル錠の操作方法）


- ④ スライドを戻します。  
これで設定は完了です。  
続けて、必ず番号が正しく設定された  
かどうかの確認を行います。

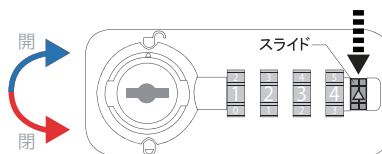


- ⑤ ツマミを左（閉）へ回しきり  
（約180度）ロックします。




施錠時にダイヤルは「0000」にリセットされます。  
変更した新しい暗証番号は、施錠前に必ずメモに控える  
などしてください。

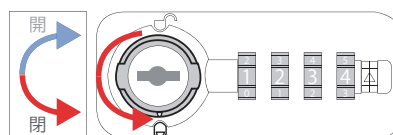


- ⑥ ダイヤルが「0000」に  
なっていることを確認します。

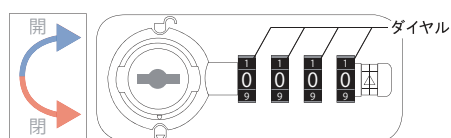


- ⑦ ダイヤルを「1234」に  
合わせます。

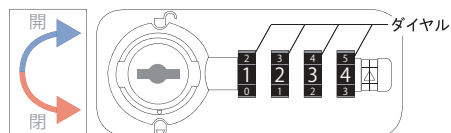


- ⑧ ツマミを右（開）へ回しきり  
（約180度）、解錠します。  
ダイヤルは「0000」にリセット  
されます。

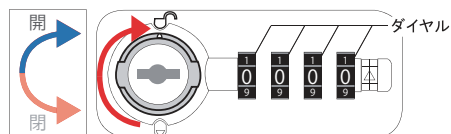

- ⑨ ダイヤルが「0000」で  
あることを確認します。

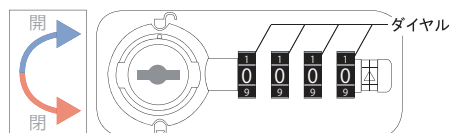

- ⑩ ロックが解除されトレーが引き出せる  
ことを確認します。  
これで新しい暗証番号が正常に設定  
されました。

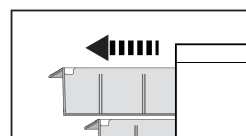


## ご使用方法（ダイヤル錠の操作方法）

### ～通常時の使い方～

#### 1. 解錠する


例：現行番号 1234 の場合

- ① ダイヤルを「1234」にあわせて、ツマミを右（開）へ回しきります（約180度）。
- ② ロックが解除され、ダイヤルは「0000」にリセットされます。

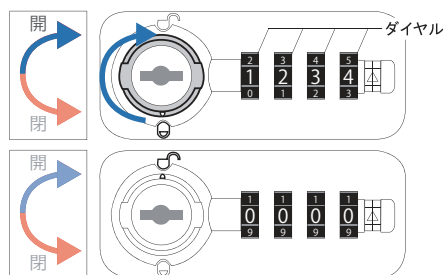

#### 2. 施錠する

- ① ツマミを左（閉）へ回しきります（約180度）。
- ② ロックされます。

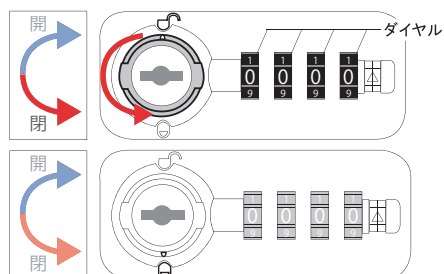


### ～特殊な操作～

#### 1. 暗証番号の変更

⚠ 暗証番号の変更は必ず解錠状態で行ってください。


例：現行番号 1234 から 新番号 5678 に変更する場合など


- ① ダイヤルを「1234」に合わせ、ツマミを右（開）へ回しきり解錠します。
- ② 再度「1234」に合わせ、スライドを「パチッ」と音がするまで上にずらします。  
※スライドは誤作動防止のため、やや力を入れないと動きません。
- ③ ダイヤルを「5678」に合わせます。
- ④ スライドを戻して設定完了です。続けて、必ず番号が正しく設定されたかどうかの確認を行います。

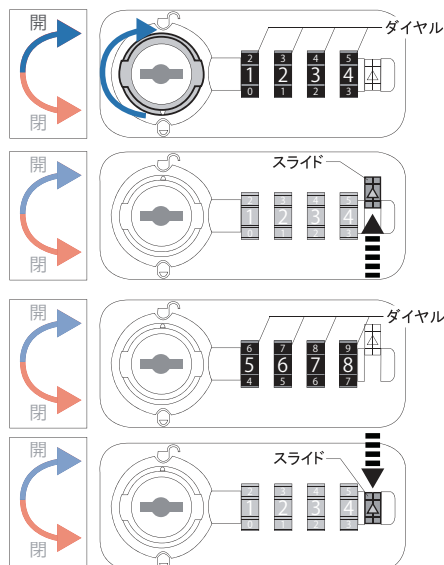

## ご使用方法（ダイヤル錠の操作方法）

- ⑤ ツマミを左へ回しきり（約180度）、ロックします。  


 施錠時にダイヤルは「0000」にリセットされます。変更した新しい暗証番号は、施錠前に必ずメモに控えるなどしてください。
- ⑥ ダイヤルが「0000」になっていることを確認します。
- ⑦ ダイヤルを「5678」に合わせます。
- ⑧ ツマミを右（開）へ回しきり（約180度）、解錠します。ダイヤルは「0000」にリセットされます。
- ⑨ ダイヤルが「0000」であることを確認します。
- ⑩ ロックが解除されトレイが引き出せることを確認します。これで新しい暗証番号に変更されました。

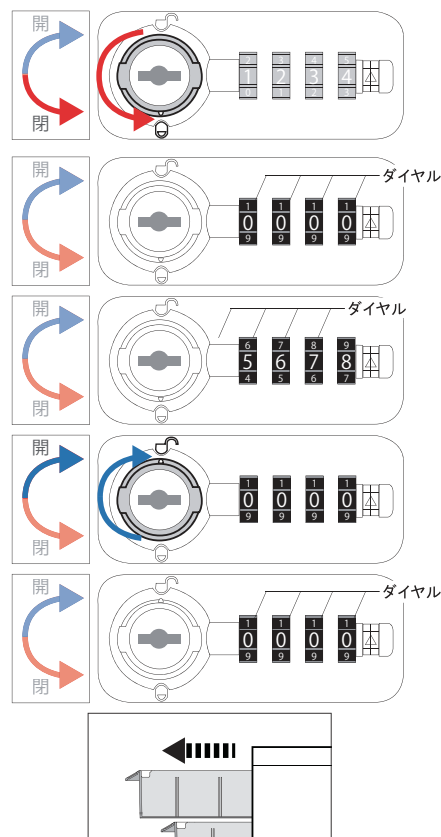

### 2. 非常解錠

暗証番号を忘れた時は、付属の非常開錠キーで開錠してください。

- ① 付属の非常開錠キーを鍵穴に差し込み、右へ回しきってください（約360度）。
- ② ツマミも一緒に回り、ロックが解除されます。

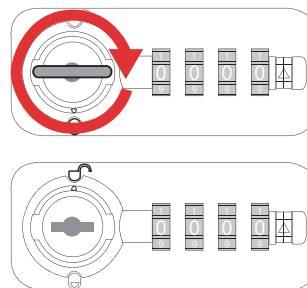

※非常開錠キーでの暗証番号検索はできません。  
暗証番号のお問い合わせは下記を参照ください。



非常キーの紛失や暗証番号をお忘れの際は右記までお問い合わせ下さい。  
 ※暗証番号の検索は有償対応となります。  
 番号の保管につきましては、十分ご注意くださいようお願い申し上げます。

**アズワン株式会社**

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>


受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分  
 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

## ご使用方法（見出紙、トレイ）

### ■ 見出紙の脱着


#### 「見出紙の入れ方」

見出しカバーとトレイ本体との隙間に、紙の中央部分を押し込むように差し込んでください。

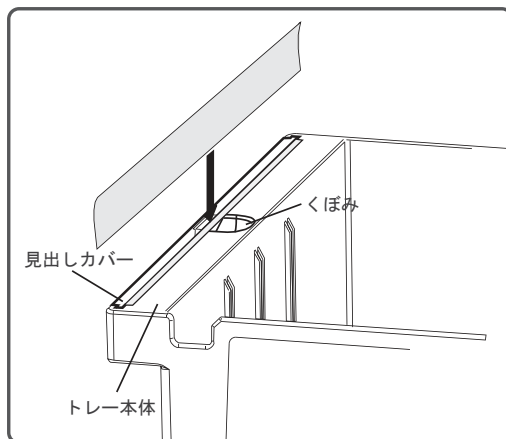


#### 「見出紙の取り出し方」

トレイ中央のくぼみから指を入れ、紙をつまんで取り出してください。

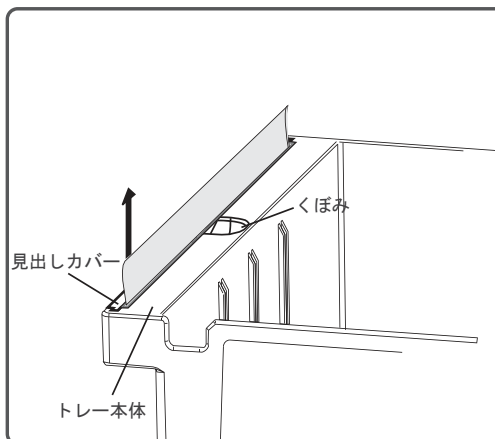


### ■ トレーの取り外し方法と取付方法

#### トレーの外し方

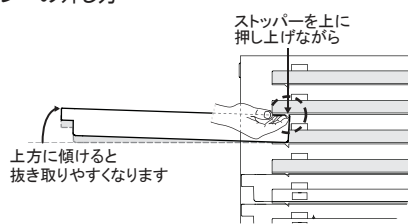

- ① トレーがストッパーに当たる位置まで引く。
  - ② トレーをやや上方に傾け、ストッパーを上へ押し上げながら引き抜く。
- ※ トレーを無理に引き抜くとトレーやストッパーが破損するおそれがあります。

#### トレーの入れ方

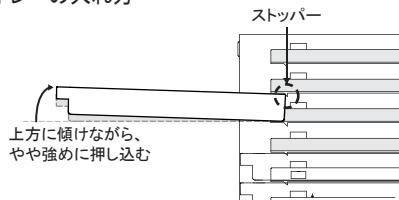

- ① トレーがストッパーに当たる位置まで押し込む。
  - ② トレーをやや上方に傾け、ストッパーを越えるまでやや強めに押し込む。
  - ③ ストッパーを越えたら、一番奥まで押し込む。
- ※ トレーを水平にしたまま無理に押し込むと、トレーやストッパーが破損するおそれがあります。

## お手入れ方法

- ・ 日常のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布でおこなってください。
- ・ 製品が著しく汚れた場合は、薄めた中性洗剤溶液（1～3%）で柔らかい布を濡らし、固く絞って汚れを拭き取ってください。
- ・ 液体などをこぼした場合は、すばやく拭き取ってください。
- ※ アルコール・シンナー・ベンジン・油などをこぼすと、変色・変質・破損の原因となることがあります。
- ・ 内部のレールに、一般機械用潤滑油やグリース等は絶対に塗布しないでください。
- ・ 製品を直接水洗いしたり、ベンジン・シンナー・アルコール類・化学雑巾等を使用すると、表面の塗装が劣化したり、樹脂部分が変形・変色する場合があります。
- ・ 市販のクリーナー等をご使用の際は、目立たない部分で変色が無いことを確認してから使用してください。

## 製品保証について

### 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に製造上の不備による欠陥又は正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	
型式	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL :
取扱店名	担当者印
住所	TEL :

**アズワン株式会社**

#### 〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・ 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
  - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
  - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
  - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
  - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

**アズワン株式会社**

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ  
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ  
専用E-mail

[repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

made in Japan  
2019年10月初版作成