

# ナビキャッチ嘔吐袋 かぶせるだけグレー

## 【特徴】

- カラー袋に、水溶性フィルムに包まれた凝固剤を入れるだけで、嘔吐物をすぐに吸収・凝固できます。
- 中身が見えにくいカラー袋ですので、プライバシーにも配慮しています。

## 【セット内容】

- ・ カラー手提げ袋グレー（20 枚入り）…………… 2 袋
- ・ 水溶性フィルム入り凝固剤（40 個入り）…… 1 袋
- ・ 取扱説明書（本書）…………… 1 枚



## 【使い方】

- 手提げ袋を開き、アルミパウチの中から凝固剤を 1 個取り出し、袋の中に入れます。ガーグルベース等に装着する場合は、手提げ袋をかぶせてセットし、その中に凝固剤を 1 個入れてください。
- 凝固剤をセットした袋の中に嘔吐物が入るよう、袋で受けてください。

## 【注意事項】

- 凝固剤は食べられません。誤って口に入れないようして下さい。
- 使用中に袋が破れないように、尖ったものに接触させないで下さい。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 湿気のある場所での保管は避けてください。
- 濡らさないように保管してください。
- 本製品は使用前、使用後にかかわらず、トイレ等には流さないで下さい。
- 処分する場合は各自治体の廃棄区分に従ってください。
- 開封後は早めにお使いください。
- 凝固剤のチャック袋の口は使用後必ず閉めてください。
- 凝固剤に関する注意書きは、凝固剤のパックにも記載しています。必ずお読みください。

原産国：凝固剤（アクリル系高吸水性ポリマー）/中国、手提げ袋（HDPE）/インドネシア

## ■ 商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間 午前 9 時～午後 5 時 3 0 分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

**アズワン株式会社**