

取扱説明書

Instruction Manual


折りたたみ担架（四つ折タイプ）

7-7696-01 RA-1A7

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用頂くために「取扱説明書」をお読みになって正しくお使い下さい。
「取扱説明書」をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見れる場所に大切に保管して下さい。また本製品を譲渡、あるいは貸与されるときには新しく使用される方が安全で正しい使用方法を知るために本書を製品本体の目立つ場所に添付して下さい。

製品概要

■各部名称

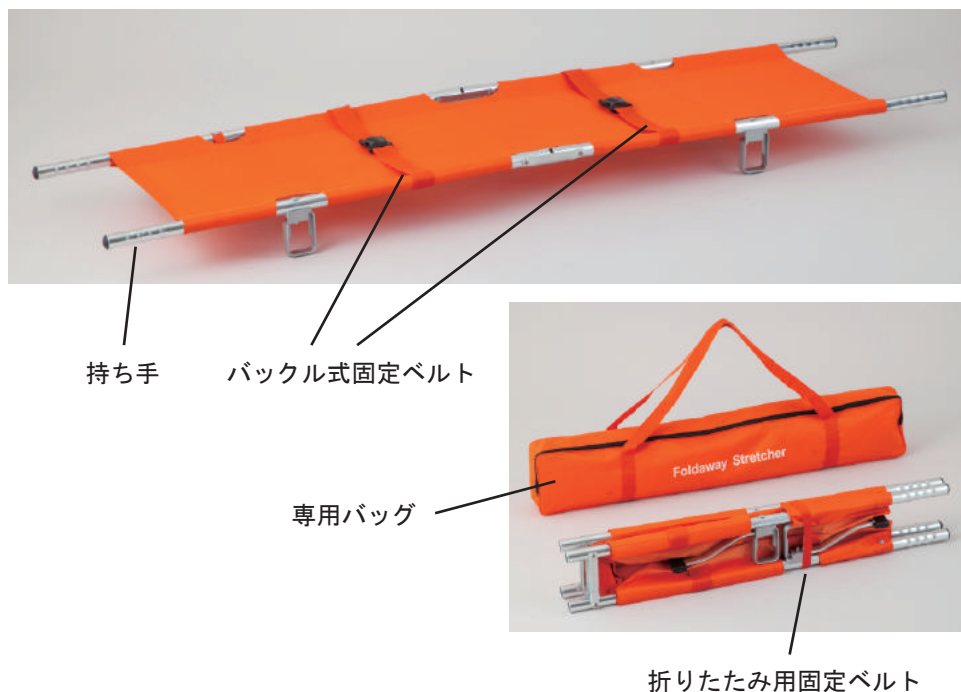

■仕様

- サイズ：幅 530mm × 長さ 2170mm × 高さ 140mm
(折りたたみ時：幅 170mm × 長さ 1080mm × 高さ 100mm)
- 材質：フレーム／アルミニウム、ベッド面／ビニールレザー
- 耐荷重：約 100kg
- 重量：約 6kg
- 付属品：バックル式固定ベルト × 2 個、専用バッグ

※改良のため仕様や外観を予告なく変更する場合があります。

ご使用上の注意

この取扱説明書では製品を安全に正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を記載しています。
これらの指示に従って安全にご使用頂くようお願い致します。




注意

- 本製品を決して分解、改造しないで下さい。故障やケガの原因となる恐れがあります。また、分解、改造を行われた場合は保証の対象外となります。
- 本製品は傷病者を搬送するための担架として設計されていますので、荷物の運搬など、使用目的以外で使用しないで下さい。
- 折りたたんだ状態から展開する際、安全な搬送のため担架面がフラットになるようにしてからご使用下さい。
- フレームの展開時、折りたたみ時に可動部に手を挟まないようご注意ください。
- 傷病者はシート部中央に乗せて下さい。片寄るとバランスを崩すなどの恐れがあります。
- 傷病者を搬送する際には、傷病者が転落しないようにバックル式固定ベルトを2本とも傷病者に合わせて長さを調節し、しっかりと固定して下さい。
- バックル式固定ベルトや各部に緩みやガタツキが無いことを確認して下さい。緩みやガタツキがあった場合、違和感を感じた場合は使用を中止して下さい。
- 傷病者を搬送する時は必ず2名以上で搬送して下さい。
- ご使用後は折りたたんで収納することができます。折りたたみ用固定ベルトで留めて保管して下さい。

使用方法

1. 専用バッグから本体を取り出して下さい。
2. 折りたたみ用固定ベルトを外して広げて下さい。
3. 裏側の連結バーを下記写真のように真っ直ぐ伸ばして下さい。

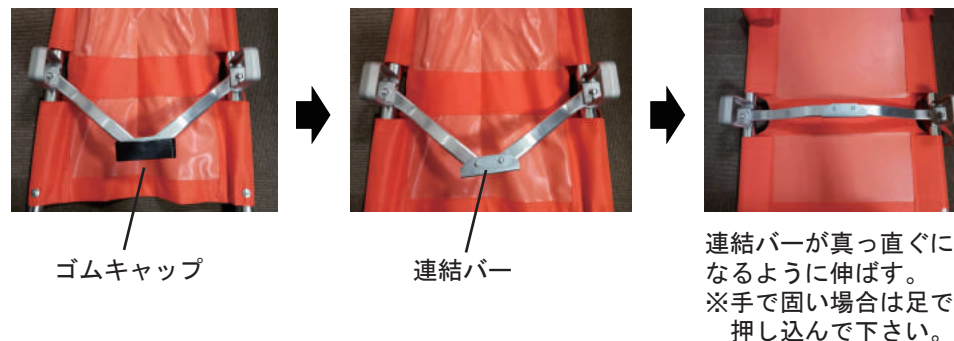

4. 折りたたむ際には連結バーを上記3と逆の順番で曲げて下さい。
尚、この際にも手で固い場合は足で蹴るなどして下さい。

■注意：連結バーで手を挟まないようご注意ください。

使用方法

- 3 ヶ月に一度は下記の定期点検をして下さい。
 - ・各連結部のピン、ボルト、ナット等の緩みや脱落
 - ・シート部のキズ、破損
 - ・フレームの歪み

お手入れ方法

- 薄めた中性洗剤をスポンジややわらかい布にしみ込ませて汚れを取り、乾いた布で乾拭きして下さい。
- 強い酸性・アルカリ性洗剤、塩素系、シンナー、およびクレンザーなどの使用は製品の変色や傷みの原因となりますので使用しないで下さい。
- 長期間使用しない場合は、汚れを落とし直射日光の当たらない場所で保管して下さい。

お問合せ先

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間: 午前9時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

アズワン株式会社

2019年11月 第1版

Made in China