

# 取扱説明書


Instruction Manual

## 折りたたみテーブル(車いす用)

HP1072 8-1559-01

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

### 外観と各部名称

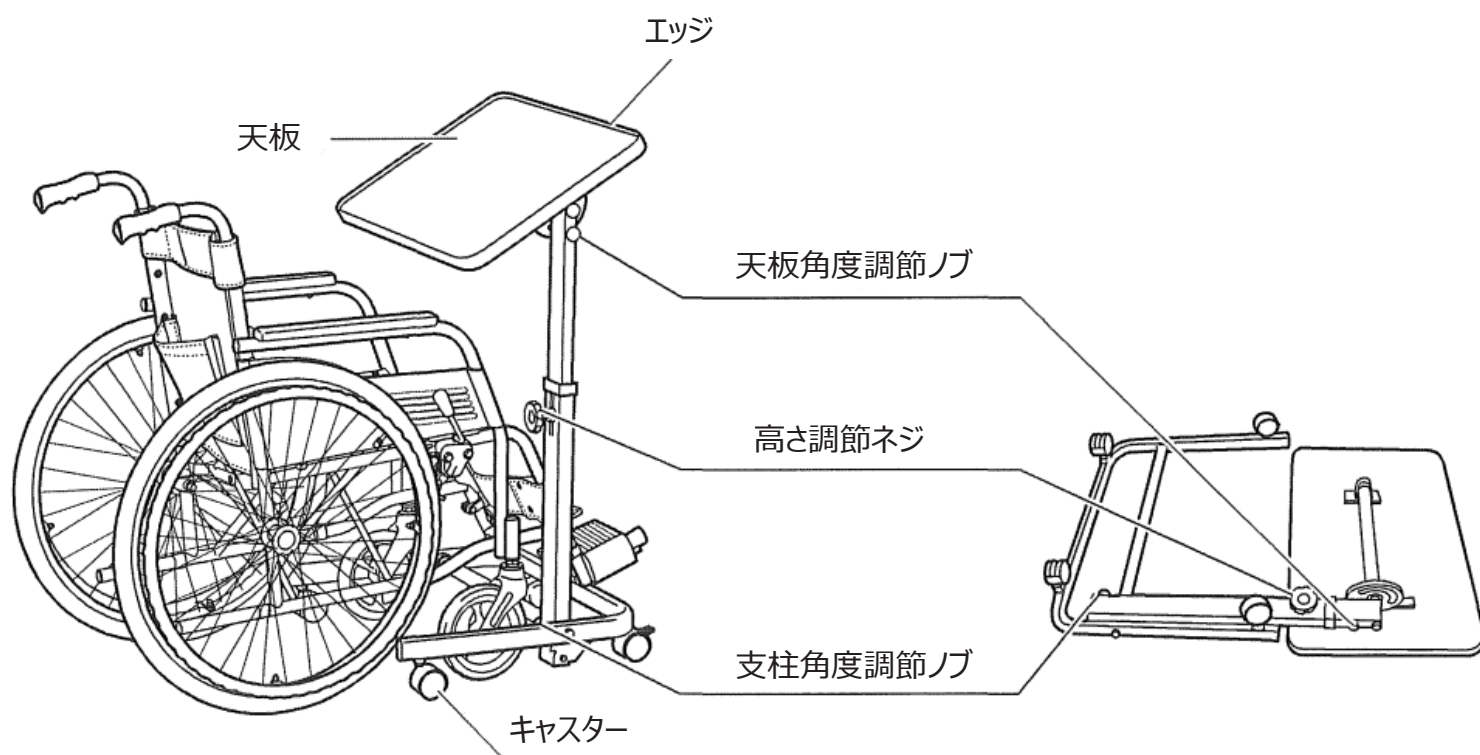

#### 【車いす使用例】

※車いすは付属していません。

#### 【折りたたみ時】



### 注意事項

取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となる場合があります。

- 平坦な床でご使用ください。
- ご使用になる際は、不用意に動かないようにキャスターのストッパーを2輪ともロックしてください。
- 移動する際には、ロックしていたストッパーを解除して（外して）から移動してください。ロックを外さず移動しようとしますと、キャスターのロック機能が破損する場合があります。
- エレベーターに載せる際には、キャスターが隙間に落ちないようにご注意ください。
- 荷重がかかりすぎた状態で使用されますと、バランスを崩して転倒し怪我をする恐れがあります。
- 天板の上に重量物を載せたり、座ったり、寄りかかったりしないでください。転倒や天板破損の原因になります。
- 天板や支柱に薬品などが付着した場合、すぐに拭き取ってください。長時間放置すると変色する恐れがあります。

## 特長

- 車いすでも使いやすい、工具不要な天板角度調節タイプのテーブルです。
- 天板角度は0～180°で、45°刻みに7段階の調節が可能です。手前にも奥にも傾けられます。
- 支柱は0°、70°、90°の3段階で角度調節できます。
- 天板の縁にはエッジが付いており、天板の上に置いたペンなどが落下しにくくなっています。
- 使用しない時には、コンパクトに折りたたむことができます。
- キャスターは2輪にストッパーがついています。

## 使用方法

- ① 脚部支柱の根本にある「支柱角度調節ノブ」を引き、角度を調節してください。安全のため、ノブがしっかりと根本まで入っていることをご確認ください。
- ② 支柱中央にある「高さ調節ノブ」を引き、任意の角度でノブを放して固定してください。安全のため、ノブがしっかりと根本まで入っていることをご確認ください。
- ③ 支柱上部にある「天板角度調節ノブ」を引き、任意の角度でノブを放して固定してください。安全のため、ノブがしっかりと根本まで入っていることをご確認ください。
- ④ 食事の際などには天板を水平にしたり、読書や書き物をする際には角度をつけるなど、お使いになる方の状況に応じ、天板や支柱の角度を調節できます。
- ⑤ 安全のため、使用する際にはキャスターについているストッパー（2輪）を踏み込んでご使用ください。移動する際には、踏み込んだストッパーを2輪とも上にあげてロックを解除してから移動してください。

## 折りたたみ方法

- ① 「高さ調節ネジ」を緩めて、支柱を一番低い高さまで下げて、「高さ調節ネジ」を締めます。
- ② 天板下の「天板角度調節ノブ」を引き、「高さ調節ネジ」のついている方向と逆側（奥側）に天板を完全に倒し、「天板角度調節ノブ」を放してロックしてください。
- ③ 脚部支柱の根本にある「支柱角度調節ノブ」を引き、支柱をベースと同じ角度（フラット）まで倒して、「支柱角度調節ノブ」を放します。隙間などにコンパクトに収納しておくことができます。

## お手入れ方法

- 柔らかい布やスポンジに、水で薄めた中性洗剤を含ませて絞り、汚れを拭き取ってください。その後、水拭きして洗剤を拭き取った後に、乾拭きして表面に水滴が残らないようにします。
- 漂白剤やクレンザーは使用しないでください。製品の劣化に繋がります。
- 次亜塩素酸ナトリウムなどの漂白剤で清拭した後にそのまま放置すると、表面を侵食することがありますのでご注意ください。

# 仕様

材質	フレーム／スチール（ハンマーネット塗装）、天板／合板、キャスター／ナイロン、エッジ／PVC
本体外寸	W 596 × D 480 × H 550 ～ 980 mm
天板有効寸法	W 596 × D 395 mm
天板エッジ高	8 mm
ベース部サイズ	W 570 × D 480 × H 110 mm
折りたたみ時サイズ	W 905 × D 125 × H 600 mm
キャスター径	Φ 50 mm （2輪ストッパー付き・首振りストッパー無し）
本体重量	約 12 kg
耐荷重	約 10 kg （平均荷重）

Made in Taiwan

## 保証規定

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・接続している他の機器が原因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

## 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定 1 に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品名	折りたたみテーブル（車いす用） HP1072
品番	<b>8-1559-01</b>
保証期間	お買い上げ日より 1 年間
お買い上げ日	年            月            日
お名前	様
ご住所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL.

 **アズワン株式会社**

### 商品についてのお問い合わせは カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875  
FAX 0120-700-763  
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

### 修理・校正についてのお問い合わせは 修理窓口

TEL 0120-788-535  
FAX 0120-788-763  
問合せ専用E-mail [repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間：午前9時～午後5時30分まで  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

第3版 2019年 10月 作成