

取扱説明書

Instruction Manual

担 架

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、未永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

MS-MB

使用上のご注意



警告 この注意事項を守らなければ、死亡または重傷などを負う可能性があります。

- ・シート面やベルトに破れや縫い目のほつれなど、異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・担架使用時は十分に搬送する人員を確保し、無理な体勢では使用しないでください。
- ・ショルダーベルトは、必ずタスキ掛けにしてご使用ください。
- ・無理な体制での搬送作業は、搬送者に極度の負担がかかる場合がありますのでおやめください。

名 称

ショルダーベルト

表面:メッシュ仕様

水抜き口

水抜き口

ショルダーベルト

肩当てパット



<収納時>

- ショルダーベルト×2か所
- 水抜き口×2か所
- 持ち手×10か所（★印部）

特 徴

- ・表面がメッシュ仕様、裏面が防水仕様（ナイロンとPVC）の二層構造になっています。
- ・水抜き口が2か所あるので、水場でご使用いただくこともできます。
- ・ショルダーベルトが付いているので、肩に掛けて搬送することもできます。
- ・収納時は小さくなり場所を取りません。

ご 使 用 方 法

- ・メッシュ面を上にご使用ください。
- ・人を乗せて搬送する時は、搬送者は頭側と足側の持ち手をしっかり持ってご使用ください。
- ・必要時、ショルダーベルトはタスキ掛けにしてご使用ください。（ショルダーベルトは長さ調整不可）
- ・成人を搬送する場合は2人以上で搬送してください。状況によっては更に搬送人員を増やしてください。

お手入れ方法

- ・汚れた際は、硬く絞った柔らかい布で拭き取るか、水で洗い流してください。
- ・水洗いの後は、風通しのよいところでよく乾かしてから収納してください。
- ・持ち手やショルダーベルトを内側にして、丸めて収納袋に入れてください。

仕 様

材質：表面／フュージョン（ナイロン74%、ポリエステル26%）
裏面／ナイロン100%、PVC貼り、
持ち手／PP（ポリプロピレン）、肩当て／PVC
付属品：収納袋1つ
サイズ：全長／約180cm×約48cm、
ショルダーベルト／約155cm、持ち手／約22cm
収納時／φ約14cm×約52cm
本体重量：約1.4kg 耐荷重：約100kg

■商品に関するお問い合わせ
カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

MADE IN JAPAN
2019年10月初版作成