

取扱説明書

Instruction Manual

navis*

ナビトレ

(脊椎モデル L2～L5)

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
当社製品をより安全に、正しくお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書をお読みいただきますようお願いいたします。

また、お読みいただきました後も無くさないよう大切に保管してください。

注意事項


《使用上の注意事項》

- 本製品は、実際の処置に近いトレーニングができるよう忠実に再現した人工モデルですが、まったく同じ効果が得られることを保証するものではありません。
- 本製品を目的以外の用途で使用しないでください。
- 本製品は消耗品です。繰り返し使用されますと、材質の劣化や破損が発生しますので、目的とするトレーニングの効果が得られない場合があります。
- 本製品を改造したりしないでください。保証の対象外となります。
- 使用中に何らかの異常がございましたら、直ちにトレーニングを中止し、購入された販売代理店までご連絡ください。
- 本製品は予告なしに仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

《お手入れ・保管時の注意事項》

- 保管する際は、包装されていた袋に戻し、直射日光の当たる場所や、高温多湿な場所は避けて保管してください。

製品仕様

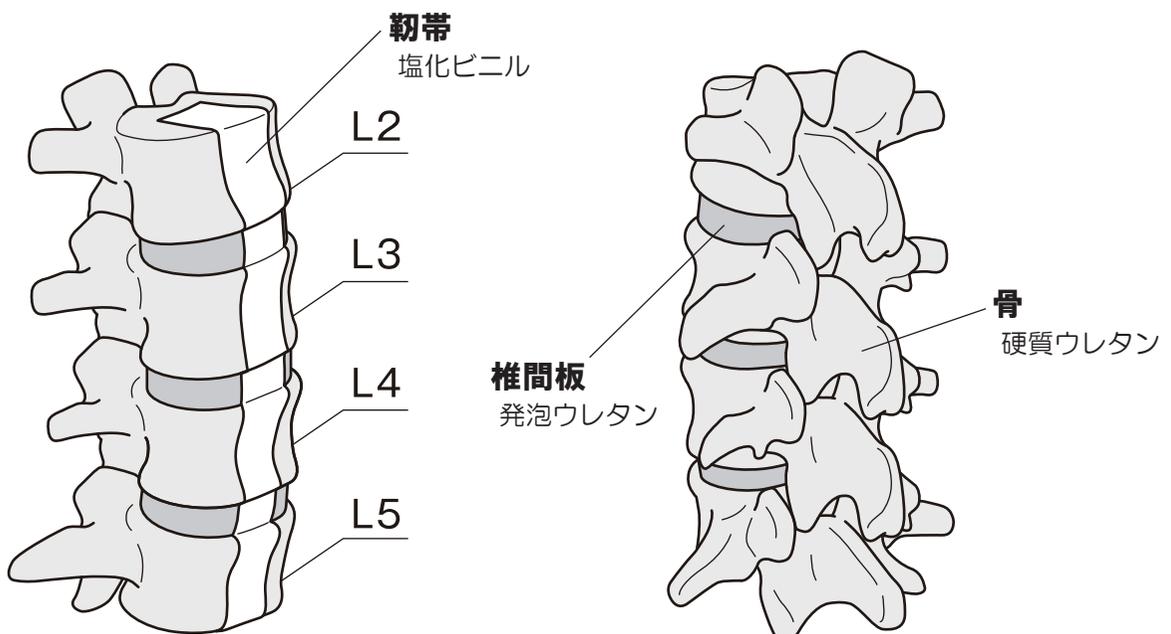


トレーニング例

一般的な整形外科用の手術器具で切断、穿孔などが可能です。

腰椎に対する整形外科手技（椎弓切除術・脊椎固定術 等）の練習にお使い頂けます。

コーティカル（皮質骨）とキャンセラス（海綿骨）の2層構造の為、臨床に近い感覚での練習が可能です。

トレーニング例① 椎弓根へのスクリューの設置、及びロッドでの連結。

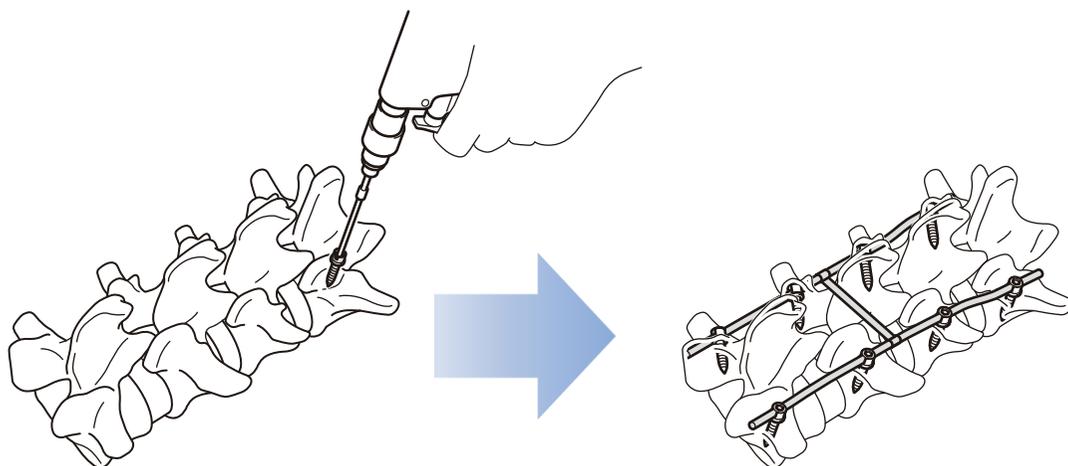

トレーニング例② 骨ノミなどでの除圧練習。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL. 0120-711-875

FAX. 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間 午前9時～午後5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

made in Japan

2019年10月 初版作成