


取扱説明書

ナースカート（昇降タイプ）

- この度は、ナースカートをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
- お使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読み頂き、正しく安全な取扱方法をお守り下さい。
また、お読み頂いた後もお使いになられる方に見て頂けるよう常にお手元に保管下さい。
- この製品は医療施設などで、電子カルテシステムで使用するノートPCへの入力や、医療用具などの運搬作業用のカートとして使用することを目的に作られています。

1. 各部の名称

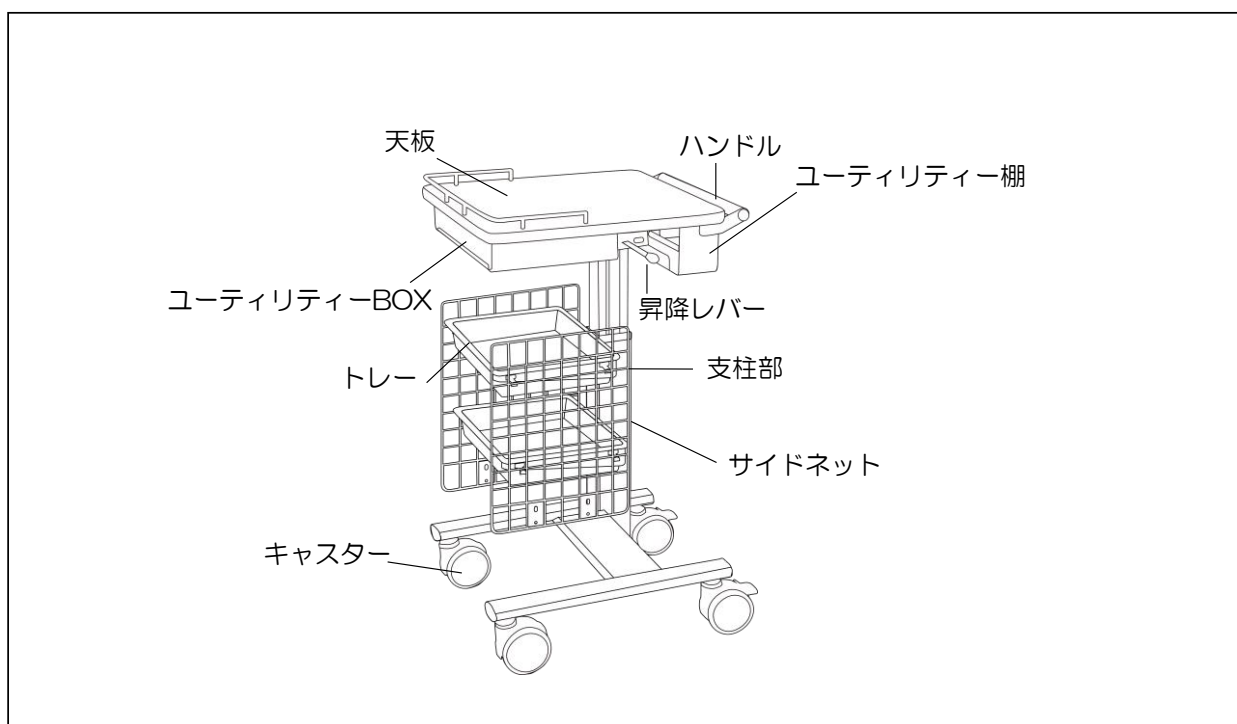

*可動部の使い方


■キャスターのロック方法

レバーを下げると「ロック」、上げると「ロック解除」されます。



■昇降機能の使用方法

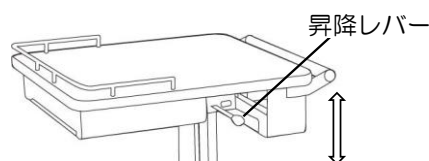

昇降レバーを上げながら、天板を上下させます。
レバーをはなすとロックします。



2. 安全に関する取扱い注意事項

本書の注意事項は、ご自身や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐための注意喚起を目的としております。

製品を安全に正しくお使い頂くためのものですので、必ずお守り下さい。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重大な傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人の負傷や物的損害が生じる可能性が想定される内容を示しています。

警告

- 支柱部内のガスダンパーは、絶対に分解しないで下さい
高圧ガスが封入されていますので吹き出して思わぬケガをするおそれがあります。
- カート廃棄時、絶対に焼却しないで下さい
有害ガスが発生するなど、周囲に危険を及ぼすおそれがあります。
- ガスダンパー廃棄時、絶対に火中に投入しないで下さい
爆発により大ケガをするおそれがあります。

注意

- 目的以外の用途に使用しないで下さい
歩行器や手すり、荷物を運搬する台車などの目的で使用しないで下さい。転倒してケガやカートが破損・変形するおそれがあります。
- カートを叩いたり乱暴に扱わないで下さい
破損・変形した部分で思わぬケガをするおそれがあります。
- カートに寄り掛かったり、乗ったりしないで下さい
カートが転倒してケガや、破損・変形するおそれがあります。
- カートに下記の重量を超えるものを載せたり、入れたりしないで下さい
 - ・天板の上に10kgを超えるもの。
 - ・トレーの中に5kgを超えるもの。
 - ・ユーティリティーBOXの中に3.5kgを超えるもの。
 - ・サイドネット(オプション)に3kgを超えるもの。カートが転倒してケガや、破損・変形するおそれがあります。

注意

- 滑りやすい床では使用しないで下さい
 - ・水分・油分がある床や滑りやすい場所では使用しないで下さい。
 - ・カートが動きやすくなり、転倒してケガをするおそれがあります。
- カートを移動させる際は、キャスターのロックを解除して下さい
ロック状態で無理に動かすと、転倒してケガをしたり、床を傷付けるおそれがあります。また、キャスターが破損するおそれがあります。
- 載せるものが天板やトレーからはみ出さないようにして下さい
ものが落下して思わぬケガや、落下したものが破損・変形するおそれがあります。
- カートを移動させる際は、天板やトレー上のものが落下しないように注意して下さい
落下したもので思わぬケガや、落下したものが破損・変形するおそれがあります。
- 傾斜や段差のある場所では注意して下さい
カートが転倒してケガや、破損・変形するおそれがあります。
- 移動する際は周囲に気を付け、歩く速度で使用し注意して下さい
安全のため、走ったり急ぎ足で使用しないでください。
人や物に当たりケガや破損の原因となります。
- 昇降機能を使用する場合、静止状態で昇降レバーを上げながら調整して下さい
使用方法を間違えると天板昇降によるケガや、レバー及び本体が破損するおそれがあります。
- 移動しないときは、キャスターをロックして下さい
カートが不意に動き、人や物などにぶつかって、ケガや破損するおそれがあります。

注意

- トレーの上に、熱したやかん・鍋などを直接置かないで下さい
熱いものを直接載せないで下さい。
破損・変形の原因となります。
- カートに薬品などが付着した場合は、すぐに拭き取って下さい
薬品・飲み物・洗剤などの付着や、こぼした場合は、すぐに乾いた布で拭き取って下さい。
カートが変質・変形するおそれがあります。
- スプレータイプの殺虫剤をカートに直接噴射しないで下さい
殺虫剤に含まれる溶剤によって、カートのキャスターや他の樹脂部分が破損・変色・溶解するおそれがあります。
また、破損・溶解した部分で思わぬケガをするおそれがあります。
- 熱器具（ストーブなど）の近くや直射日光の当たる場所では使用しないで下さい
変質・変形・やけど・発火などの原因となります。
- 可動部に注油しないで下さい
油がたれて床や衣類を汚すおそれがあります。
- 独自に修理・改造はしないで下さい
予期できない不具合、安定性の低下などによりケガやカートが破損・変形するおそれがあります。
- 天板との相性によって、光学マウスの一部に、反応しにくい物があります。
その際は、光学マウス専用パット等をお使い下さい。
- この製品は医療施設などの屋内用です。
屋外での構内歩行や雨などの水濡れはキャスター接地面損傷又は本体のサビや変色の原因となり故障につながります。

3. 日常のお手入れ

- 日常のお手入れは、柔らかい布でから拭きして下さい。
- 汚れを落とす場合は、下記の手順で行って下さい。
 - ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いて下さい。
 - ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取って下さい。
 - ③乾いた柔らかい布で残った水分を拭き取って下さい。
- シンナー、ベンジン、ガソリンなどは使用しないで下さい。
変色・変質するおそれがあります。

4. 故障かな？と思ったら

“故障かな？”と思っても、調べてみると故障ではないこともあります。
修理をご依頼になる前に、ここに記載の内容をお確かめください。
尚、症状が改善されない場合は、ご使用を中止頂き、お買い求め先の弊社代理店までご連絡をお願いします。

症 状	考えられる原因	処置又は、確認内容
移動時、製品が重い (キャスターの転がりが悪い)	・キャスターの車輪 ロックレバーがロック 状態になっている	・キャスターのロック を解除して下さい
	・キャスターにごみや 糸くず等が絡まっている	・ごみや糸くず等を取り 除いて下さい
昇降レバーを操作しても 天板が昇降しない	・天板位置が最高に なっている ・天板位置が最低に なっている ・昇降レバーを押し下 げている	・両手を天板の左右に 添えながら昇降レバー を握って、動かしたい 方向に昇降して下さい

5. 仕様

材質	本体/スチール(ポリエステル粉体塗装) 天板/メラミン化粧板(エッジ:PVC樹脂) ハンドル/アルミニウム(ナイロン塗装) トレイ/PP サイドネット(Nタイプのみ)/スチール(PEコーティング) キャスター/エラストマー
サイズ	全体サイズ:(幅)480×(奥行)560×(高さ)785~1055mm 天板有効サイズ:(幅)445×(奥行)478mm ユーティリティ棚有効サイズ:(幅)385×(奥行)80×(高さ)90mm ユーティリティBOX有効サイズ:(幅)390×(奥行)250×(高さ)55mm トレイ有効サイズ:(幅)325×(奥行)225×(高さ)75mm サイドネットサイズ(Nタイプのみ):300×400mm キャスター:φ100mm(2輪ストッパー付)

※本製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※トレイを交換される場合は「収納トレイ(7-4575-01~03・11)」をお求めください。

6. 保証について

保証規定	保証書																
<p>(1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。</p> <p>(2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・誤使用、不当な修理・改造による故障。 ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。 ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。 ・接続している他の機器が原因による故障。 ・車両・船舶等での使用による故障。 ・消耗部品、付属部品の交換。 ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。 <p>(3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。</p> <p>(4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。</p>	<p>本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。</p> <table border="1"> <tr> <td>品名</td><td></td></tr> <tr> <td>型式</td><td></td></tr> <tr> <td>保証期間</td><td>お買い上げ日より1年間</td></tr> <tr> <td>お買い上げ日</td><td>年 月 日</td></tr> <tr> <td>お名前</td><td>様</td></tr> <tr> <td>ご住所</td><td>TEL.</td></tr> <tr> <td>取り扱い店名</td><td>担当者印</td></tr> <tr> <td>住所</td><td>TEL.</td></tr> </table>	品名		型式		保証期間	お買い上げ日より1年間	お買い上げ日	年 月 日	お名前	様	ご住所	TEL.	取り扱い店名	担当者印	住所	TEL.
品名																	
型式																	
保証期間	お買い上げ日より1年間																
お買い上げ日	年 月 日																
お名前	様																
ご住所	TEL.																
取り扱い店名	担当者印																
住所	TEL.																

アズワン株式会社

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません。

MADE IN JAPAN
2019年11月第2版作成