


## 床頭台 MNB80・MNB160

この度は、本商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
 ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。また、  
 お読み頂きました後も大切に保管してください。

## 1. 各部名称

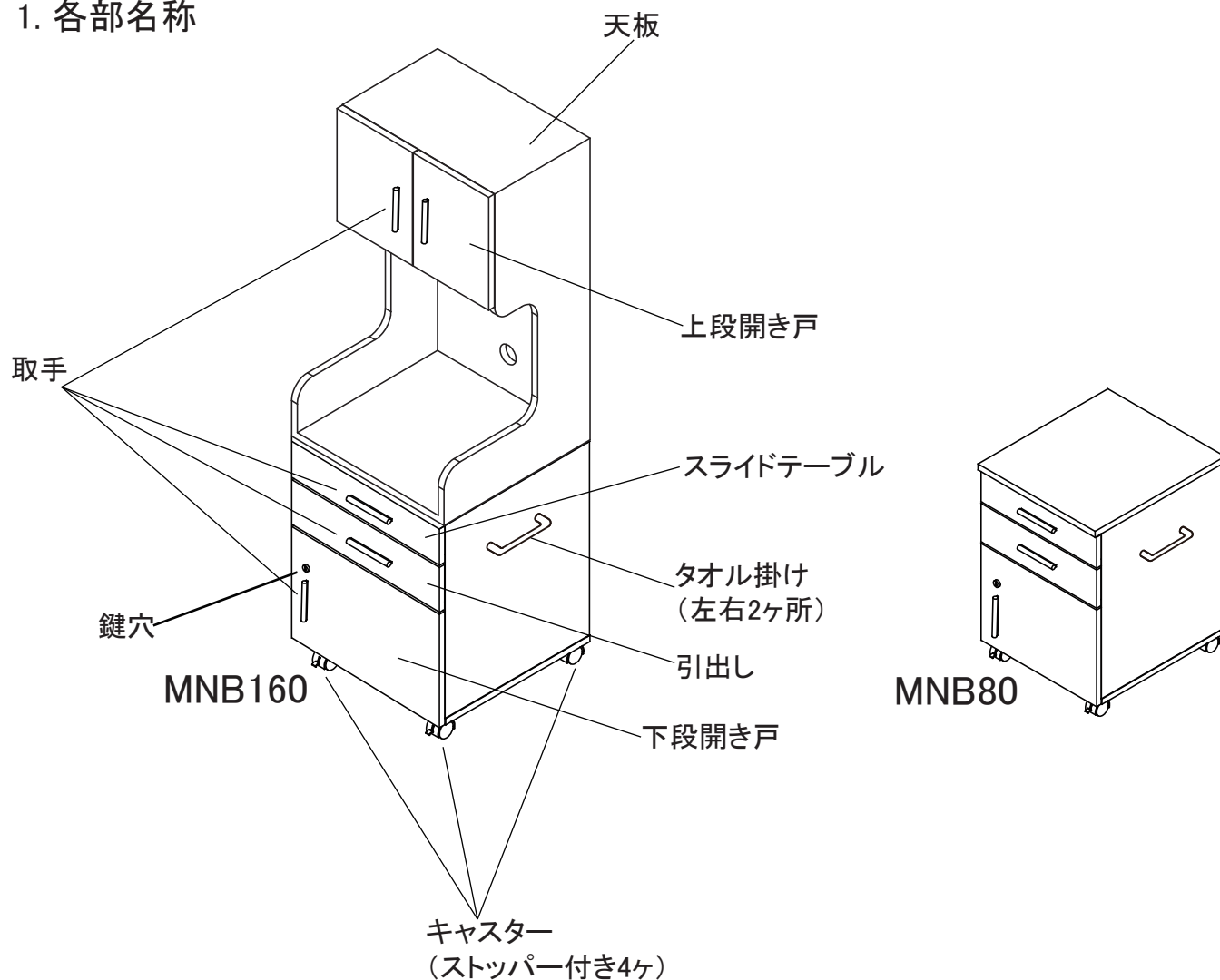


## 2. 使用上の注意

- 本製品を床頭台以外の用途で使用しないでください。歩行器や手すり等の目的で使用すると、転倒してケガをしたり、床頭台が破損、変形したりする恐れがあります。
- 天板の上に物を載せたまま、移動をさせないでください。
- 床面が平坦なところで使用してください。凸凹のある床面で使用されますと、本体やキャスターなどの部品が破損する原因になります。
- エレベーター等の乗降りの際は、キャスターが隙間に落ちないようにご注意ください。
- 無理な荷重は転倒や破損の原因になります。
- 使用時は各部のネジがしっかり固定されていることを確認してください。
- 天板の上に液体などがこぼれた場合、すみやかに拭き取ってください。天板表面の剥がれやシミの原因になる恐れがあります。
- 使用中に変形や曲がり、ネジのゆるみなどによるガタツキや異音が出た場合は、直ちに使用を中止し、購入された販売店にご相談ください。そのまま使用されますと、本体の破損やキャスターの脱落によりケガをする恐れがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 可動部のすきまに手をいれないでください。ケガをすることがあります。
- 危険物(易損物・生き物など)を収納しないでください。
- 扉の開閉時には、扉の動く範囲に人がいないか、物が置かれていないか確認してください。
- 電気製品などを収納する場合は、十分に隙間をあけて通気性をよくしてご使用ください。電気製品の故障や火災の原因になります。
- 引出しや天板の上に乗ったり、腰かけたりしないでください。横転してケガをすることがあります。
- 局所的に荷重がかからないようご注意ください。床頭台が倒れたり、破損して思わぬケガをすることがあります。
- 汚れのひどい時は薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、水を浸した布で洗剤液をよく拭き取ってください。その後乾いた布で軽く拭き、自然乾燥させてください。シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。
- 本商品は屋内専用ですので、屋外では使用しないでください。

## 3. 付属品 ※必要な付属品が揃っているかご確認ください。

鍵

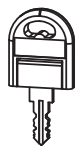

×2本

※タオル掛けに  
梱包

※鍵番号は1台ずつ異なります。  
紛失しないようご注意ください。  
紛失された場合は、裏面のラベルに記載されている  
鍵番号を元に鍵をご注文ください。

取扱説明書  
(本書)

## 4. 使用方法

### 《 1. 設置 》

- 本体は平坦な場所に設置してください。
- 水のかかる場所でのご使用は避けてください。故障の原因となります。
- 直射日光やストーブの熱などが直接当たらないようにしてください。変形、変色の原因となります。

### 《 2. 引出し 》

- 引出しを引き出す際には、ゆっくりと引いてください。引出しが飛び出して怪我をすることがあります。
- 引出しを開閉する際には指などを挟まぬよう、取手を持って開閉してください。怪我をすることがあります。
- 引出しをいっぱい引き出すと、抜け落ちてケガや破損をする場合があります。また、安全のため、もたれかからないでください。

### 《 3. 開き戸 》

- 開き戸を開閉する際には指などを挟まぬよう、取手を持って開閉してください。
- 開き戸を閉める際にはしっかりと扉を閉めてください。しっかりと閉めなかった場合、開いた扉につまずいたり、ぶつかったりして、思わぬ事故の原因となります。
- 必要に応じて鍵をかけてください。(下段のみ)

### 《 4. スライドテーブル 》

- 開き戸をいっぱい引き出すと、抜け落ちてケガや破損をする場合があります。また、安全のため、もたれかからないでください。

## 5. 仕様

型番	MNB80	MNB160
幅×奥行×高さ(mm)	480×460×835	480×460×1635
有効内寸法(mm)	引出し: 380×360×90、下段開き戸: 440×410×480	
上段スペース(mm)	上段開き戸: 440×280×265	
スライドテーブル(mm)	420×300	
キャスター	φ70mmナイロン製(ストッパー付)	
材質	本体: パーティクルボード、メラミン、キャスター: ナイロン	
耐荷重	天板: 20kg、引出し: 8kg、スライドテーブル: 8kg	
重量	30kg	45kg
付属品	鍵×2本	

Made in China

# 製品保証について

## 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は弊社保証規定により修理いたします。

品名	床頭台
型式	MNB80、MNB160
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL

### 保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・ 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
  - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
  - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
  - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
  - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。



商品についてのお問い合わせは カスタマー相談センター TEL 0120-711-875 FAX 0120-700-763 問合せ専用URL <a href="https://help.as-1.co.jp/q">https://help.as-1.co.jp/q</a>	修理・校正についてのお問い合わせは 修理窓口 TEL 0120-788-535 FAX 0120-788-763 問合せ専用E-mail <a href="mailto:repair@so.as-1.co.jp">repair@so.as-1.co.jp</a>
---	---

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

第1版 2019年11月作成