

# 取扱説明書

Instruction Manual

## 手動式白血球分類計数器

DBC-2 3-6135-01


DBC-6 3-6135-02

DBC-9 3-6135-03

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。



### 各部名称

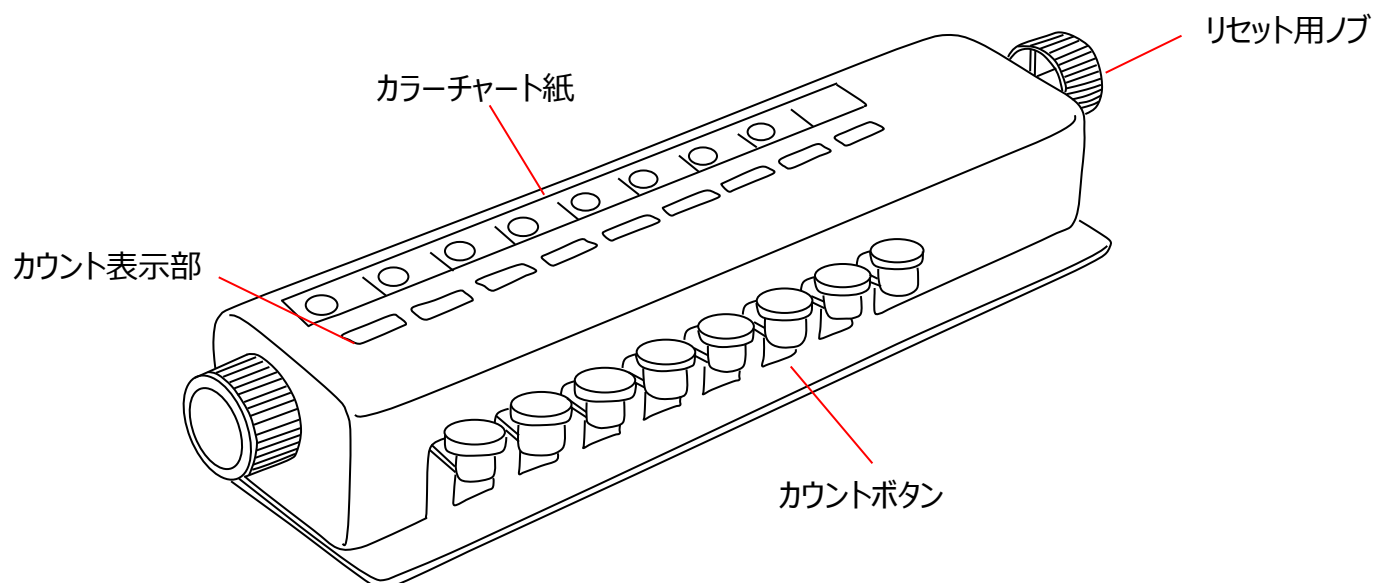

## 使用方法

### ◆ カウント方法

白血球の各画像（カラーチャート）に対応した赤と白のカウントボタンを押すと、カウント表示部の値が1プッシュにつき「1」増加します（同時打ち不可）。各カウントは、最大999まで使用可能です。

※ ボタンをしっかりと下に押してください。押し方が軽すぎる場合、空打ちになりカウンターが回らず正常にカウントできない可能性があります。また、同時にボタンを打つことはできません。1回ずつ押してください。

### ◆ リセット方法


カウントをリセットする場合は、本体両端の赤いノブを反時計回りに数回 回すことで、全てのカウント表示部の値を「0」に戻すことができます。なお、「1だけ値を減らす」ことはできません。

### ◆ 音

3-6135-02,-03のみ、総計（TOTAL）の値が「100」になるとお知らせ音が鳴ります。

## カラーチャート紙

枠に白血球分画のカラーチャート紙が入っています。カラーチャート紙は簡単に取り外しができます。ご使用方法に応じて、お客様で作成された紙を入れることも可能です。

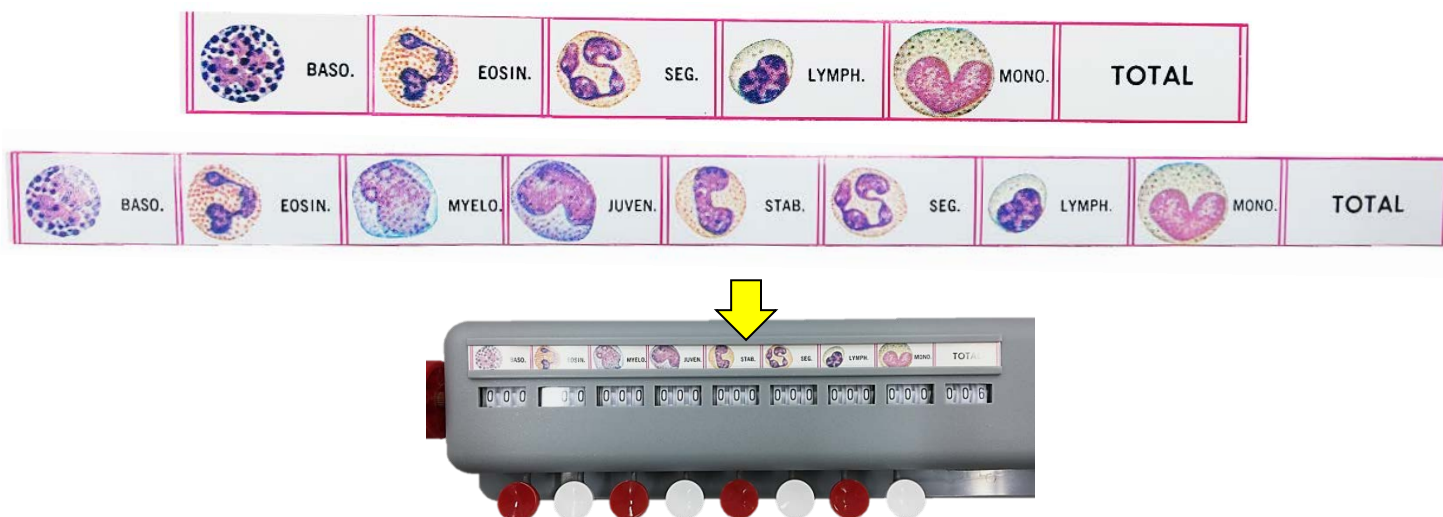

## 仕様

| 品番      | 3-6135-01       | 3-6135-02       | 3-6135-03       |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 型番      | DBC-2           | DBC-6           | DBC-9           |
| 表示部数    | 2               | 6               | 9               |
| 幅×奥行×高さ | 10 × 8 × 5 (cm) | 25 × 8 × 5 (cm) | 32 × 8 × 5 (cm) |
| 重量      | 200 g           | 500 g           | 700 g           |
| 材質      | ABS樹脂           |                 |                 |

商品についてのお問い合わせは  
カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

Made in Taiwan

**アズワン株式会社**

受付時間：午前9時～午後5時30分まで  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

第1版 2019年 8月 作成