


非接触体温計 NC200 クイックマニュアル

(体温測定モード・アラーム音オフの場合)


① START ボタンを PUSH !



①START ボタンを押してください

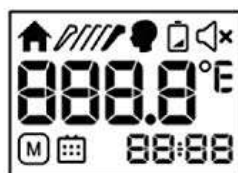

②緑色のバックライトが点灯
ディスプレイは全表示します

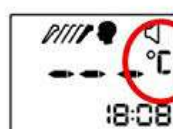

③ディスプレイの°Cマークと
LED ライトが青く点灯、
【℃】表示で準備完了です




② 5cm 以内まで額に近づける



①センサーと額の距離を
5cm 以下になるように
ゆっくり近づけます

5cm 以下
になると…

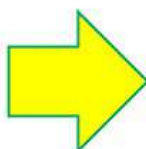

【自己測定補助ライト】
が緑色に光ります

②自動で測定！！

結果表示



測定後、ディスプレイに
結果が表示されます

37.2°C以上だと…



赤色のバックライトで表示！

※繰り返し測定する場合は、再度 START ボタンを押す必要はありません。
測定結果表示後に自動的に次の測定を開始します。

測定終了後は **START ボタンを約 3 秒間長押し**して電源を切ってください