

# 取扱説明書

Instruction Manual

## カラフル注射台/上肢台、 抗菌・難燃注射台/上肢台(ネスティングタイプ)

GS-P 8-8270-11

GL-P 8-8271-11

SAF-BK 7-6527-01

GS-B 8-8270-12

GL-B 8-8271-12

LFK-BK 7-6528-01

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

また、お読み頂きました後も大切に保管してください。



スタンドは積み重ね(ネスティング)可能で、  
スペースを節約できます。



## 注意事項

取扱いを誤ると、人身事故・製品破損の原因となることがあります。

- ご使用前に、各パーツや動きに問題がないかご確認ください。
- 持ち運びの際は、マット部分ではなくシリンダー部分を持って移動させてください。
- 本来の用途以外の使用はしないでください。

## 使用方法

### ■ マットを上げる

マットの角を握りながら、昇降レバーを上握ってください。

ガス圧で自動的に上限まで上がってきますので、マット天面に体重をかけながら下に押し、任意の高さに調節し、昇降レバーを離して設定してください。

### ■ マットを下げる

マットの角を握りながら、昇降レバーを上握ってください。

マット面に体重をかけながら下に押し、任意の高さに調節し、昇降レバーを離して設定してください。

### ■ ネスティングについて

下記に示す商品は、積み重ね(ネスティング)できるスタンドのため、省スペースで保管可能です。

- 注射台 : 8-8270-11,-12 / 7-6527-01
- 上肢台 : 8-8271-11,-12 / 7-6528-01
- イリガードル台 : 8-8289-01,-02 / 8-8290-01,-02

## ■ お手入れ方法

中性洗剤を布に浸し、固く絞ってから汚れを拭き取ってください。

アルコールでの清拭は可能ですが、塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム等）を用いた清拭は、マット表面の色を薄くする場合がありますのでお控えください。

## 仕様

品番	8-8270-11	8-8270-12	7-6527-01	8-8271-11	8-8271-12	7-6528-01
商品名	カラフル注射台		抗菌・難燃 注射台	カラフル上肢台		抗菌・難燃 上肢台
色	ピンク	ブルー	ブラック	ピンク	ブルー	ブラック
型番	GS-P	GS-B	SAF-BK	GL-P	GL-B	LFK-BK
マットサイズ	240×185×50mm			450×200×50mm		
サイズ	ベース径×全長　＝　φ465 × 560～800mm					
重量	約4.3kg			約5.3kg		
材質	スタンド／PP、マット／PVC（表面）・ウレタン（中身） ※7-6527-01,7-6528-01のみ、マット表面に抗菌・難燃加工					

Made in Taiwan

### 保証規定

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
  - 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - 接続している他の機器が原因による故障。
  - 車両・船舶等での使用による故障。
  - 消耗部品、付属部品の交換。
  - 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定1に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品名	カラフル注射台/上肢台、 抗菌・難燃注射台/上肢台
品番	8-8270-11,12/8-8271-11,12 7-6527-01/7-6528-01
保証期間	お買い上げ日より1年間
ご購入日	年 月 日
お名前	様
ご住所	TEL.
取扱店名	担当者印
住所	TEL.

 **アズワン株式会社**

### 商品についてのお問い合わせは カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875  
FAX 0120-700-763  
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

### 修理・校正についてのお問い合わせは 修理窓口

TEL 0120-788-535  
FAX 0120-788-763  
問合せ専用E-mail [repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間：午前9時～午後5時30分まで  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

第2版 2020年1月作成