

取扱説明書

Instruction Manual

アルミ製松葉杖

HC2080 0-6617-11
HC2081 0-6617-12
HC2082 0-6617-13
HC9003 0-6617-21


HC9013 0-6617-22
HC9023 0-6617-23
HC9051 0-6617-07
HC9110 0-659-34

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

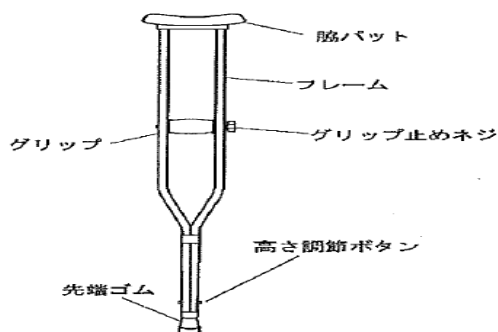

△ ご注意

- 本製品の使用時は、周囲の状況に十分ご注意ください。
- 周辺への注意を怠ると思わぬ段差に引っ掛かって転倒し、大怪我をする恐れがあります。
- フレームが変形した場合は、絶対に使用しないで下さい。突然の破断により転倒し、大怪我をする恐れがあります。
- 定期的に(少なくとも1ヶ月に一度)各部に割れや破損がないことを点検して下さい。
- 本製品を椅子がわりとして使用しないで下さい。
- 松葉杖は歩行補助として使用されるものです。それ以外の目的では使用しないで下さい。
- 専門の医師や指導員の指示に従って正しくご使用下さい。

△ ご使用前に

- 各部のネジがしっかり締まっていることを確認して下さい。
- 本説明書の＜調節方法＞に従って、適切な長さに調節して下さい。
- 先端ゴムに摩耗や損傷が無いことを確認して下さい。

摩耗や損傷があるまま使用されますと、転倒の原因となる恐れがあります。

＜先端ゴム交換方法＞

先端ゴムをねじりながら引っ張ると、取り外せます。

交換用先端ゴムを取付ける際も、ねじりながら確実に奥まで差し込んで下さい。

調節方法


※専門の医師や指導員の指示に従って、適切な高さに調節して下さい。

＜全長調節方法＞

1. 左右の高さ調節ボタンを押しながら先端を引っ張り、高さを調節します。
2. 直立した状態で、脇パットの高さが脇の下3～5cmくらいが適切な高さです。

＜グリップ位置調節方法＞

1. グリップ止めネジを反時計方向に回して、取り外します。
 2. グリップ内部の固定軸を抜き取ります。
 3. グリップの高さを調節します。
- ※グリップを握った際に肘がやや曲がる程度が適切です。
1. 固定軸を差し込み、グリップ止めネジを取り付けて、確実に固定します。

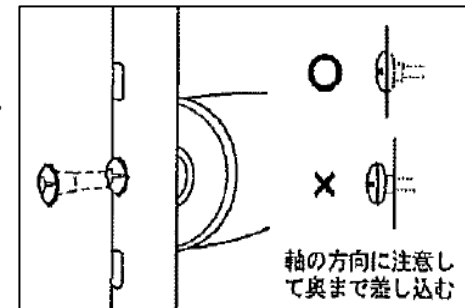

※本体の穴の形に合わせて、固定軸を奥まで確実に差し込んで下さい。(右図参照)

※グリップ止めネジを固定軸に対して真っ直ぐに取り付け、ねじ込んだ後ガタツキが無いことを確認してから使用して下さい。

仕様

品番	0-6617-11	0-6617-02	0-6617-13
型番	HC2080	HC2081	HC2082
タイプ	低身長用	中身長用	高身長用
適応身長 (cm)	137～157	157～178	178～198
全長 (cm)	94～114	112～132	132～152
材質	アルミニウム		
シャフト先端径	Φ22mm		
高さ調節	8段階(25mmピッチ)		
重量 (g)	1600	1700	1800
色	シルバー		
入り数	2本		

交換用オプション

品名	脇パット	グリップ	先端ゴム	グリップ止めネジ	中芯
品番	0-6617-21	0-6617-22	0-6617-23	0-6617-07	0-659-34
型番	HC9003	HC9013	HC9023	HC9051	HC9110
色	グレー				
材質	PVC(特殊塩化ビニル)		天然ゴム	スチール+PP	PP
備考			穴径Φ20×55mm	スチール心棒付	グリップ内芯

保証規定

1. 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
2. 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
3. ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定1に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品 名	
品 番	
保 証 期 間	お買い上げ日より 1年間
お買い上げ日	年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住 所	TEL.



商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875
FAX 0120-711-763
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535
FAX 0120-788-763
問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません