

取扱説明書

繃帯交換車	320	(0-1173-01)
繃帯交換車	300	(0-221-01)
繃帯交換車	301	(0-221-02)

取扱い上の注意

- ① 平坦な床でご使用下さい。
- ② エレベーター等の乗り降りの際にキャスターが隙間に落ちないようにご注意願います。
- ③ 板・パイプの切断面には直接手を触れないでください。
- ④ 棚板一段につき耐荷重は30kgですのでそれ以上は載せないで下さい。
- ⑤ 上段だけに荷重がかかり過ぎた状態で移動を行いますと、バランスを崩し転倒する恐れがありますのでご注意願います。
- ⑥ 付属の引出し・汚物缶・洗面器等を引き出したままの状態では移動しないで下さい。ケガや破損の原因になります。
- ⑦ 補助板だけに荷重がかかると転倒する恐れがありますのでご注意下さい。
また、補助板の出し入れ時に体の一部や衣服等を挟む恐れがありますのでご注意願います。(300, 301, 320)
- ⑧ 樹脂製引き出しは落としたり、強い衝撃を与えると割れる恐れがあります。(320)
- ⑨ 引き出しは必要以上に強く引っ張り出さないで下さい。抜け落ちる恐れがあります。

 アズワン株式会社		
商品に関するお問い合わせは カスタマー相談センター		
フリーダイヤル	 0120-711-875	
	F A X	0120-700-763
問合せ専用URL	http://help.as-1.co.jp/q	
受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません		