

取扱説明書

Instruction Manual

車いす用ウロバッグホルダー

7-3565-01 U-Bag

お買い上げ誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管して下さい。

使用上のご注意

●取扱注意事項

- ・使用方法が不適切な場合等において、生命、身体に重大な影響を及ぼす恐れがございますので、医師、専門家とご相談の上、ご使用下さい。
- ・かゆみ、かぶれ、発疹、肌荒れ等皮膚に異常を感じた際は、直ぐ使用を中止して下さい。

●特長

- ・車いすに装着して使用できるウロバッグホルダーです。防水加工の生地を使用しています。
- ・バックルベルトのため、車いすに簡単に装着できます。
- ・ベルトは長さ調節が可能です。



●洗濯方法/洗濯時の注意

- ・洗濯が可能です。(水温30℃まで)
- ・塩素系漂白剤のご使用はお避け下さい。蛍光増白剤を含む洗剤を使用されますと、色ムラや変色の恐れがございますのでご注意下さい。
- ・縮み、変形、破損の原因となりますので、高温乾燥機のご使用はお避け下さい。
- ・アイロン仕上げはできません。


●材質：ナイロン 100% (防水加工)

●入り数：1個

●寸法


縦：34 cm × 横：42 cm × 厚さ：4 cm

商品仕様

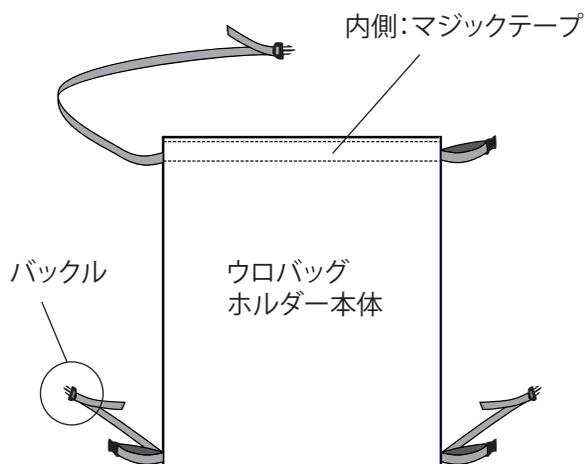

●取り付け方法

バックルベルトは車いすのパイプに取り付けて、ご使用下さい。

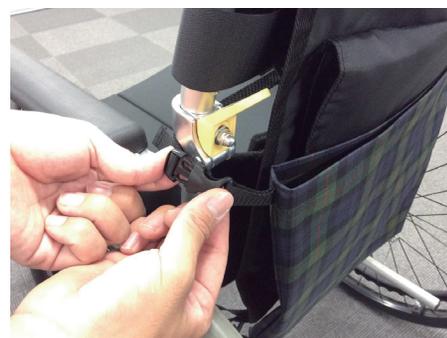

アズワン株式会社

AS ONE

商品に関するお問い合わせは
カスタマー相談センター

TEL：0120-711-875 FAX：0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません