

取扱説明書

Instruction Manual

折りたたみ式コンパクトウォーカー

4060AB 0-8087-01

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、未永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。




⚠ 注意事項

- ご使用者の状態により、医療機関などの専門家にご相談の上ご使用ください。自主歩行ができない方は使用しないでください。
- 本製品の使用時は、周囲の状況に十分ご注意ください。周囲への注意を怠ると、思わぬ段差に引っ掛かって転倒し、大怪我をする可能性があります。
- 本製品を使用・移動する際は、平らな場所で使用し、段差などに十分注意して静かに移動させてください。滑りやすい場所や、段差などに引っ掛かると、転倒し事故に繋がる場合があります。
- 脚は4脚すべて同じ高さにしてください。高さが異なると、ぐらつきや転倒の原因となります。
- 交換用先端ゴムを交換する際には、4個同時に交換してください。1個だけ交換すると、ぐらつきや転倒の原因になる恐れがあります。（交換用脚ゴムを希望の際は、ご購入頂いた販売店にお問い合わせください。）
- 使用中に変形や曲り、ネジの緩みなどによるガタツキや異音が生じた場合には、直ちに使用を中止してください。そのまま使用されますと、怪我の原因となります。
- ご使用前（少なくとも1ヶ月に1度）は、固定部の緩みや各部の変形、傷み、ガタツキなどの異常がないかご点検ください。
- 誤った使用方法や無理な加重は、変形・損傷の原因になりますのでおやめください。
- 折り畳み状態から展開する際に、手や指などを挟まないようご注意ください。
- 本製品を改造しないでください。保証の対象外となります。

高さ調節方法

プッシュボタンを押し込み、脚ゴムがついている方の支柱をスライドさせて、任意の高さにある穴にプッシュボタンをはめ込みます。カチッと音が鳴り、しっかりプッシュボタンが穴にはまっていることをご確認ください。


※ 脚の高さ（使用する穴の位置）は4本ともすべて同じにしてください。

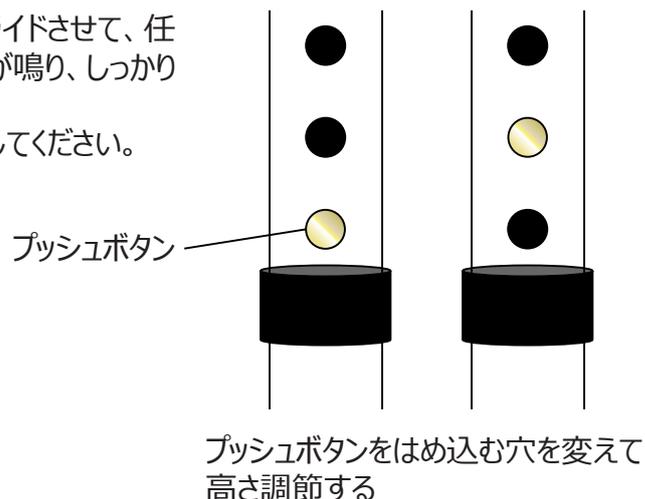


使用方法




① 折り畳みレバーを押し倒して歩行器を展開します。（閉じる際は、レバーを押し上げます）

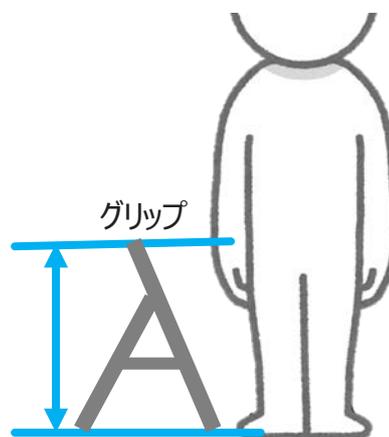

② 歩行器の高さを、使用者が直立したとき上になる方のグリップが手首の高さに来るように調節してください。

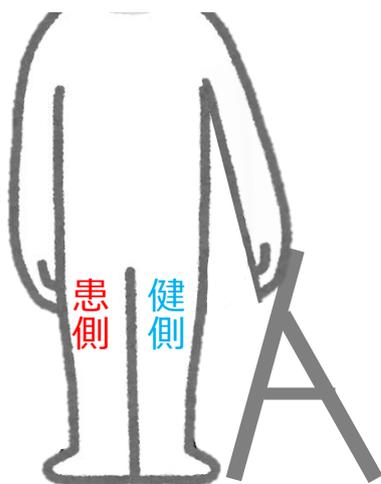

③ 健側(障害がない方)に歩行器を持ちます。歩く際は、まず歩行器を進行方向に出し、次に患側(障害がある方)を前に出してから、健側を前に出して前に進みます。この動作を繰り返して歩きます。

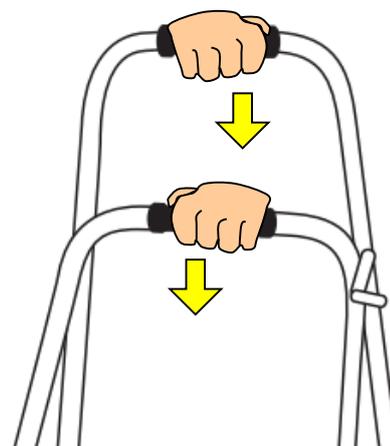

グリップを握って下に押すようにして立ち上がる

④ 立ち上がりの補助に使用する場合は、体の正面に歩行器を置き、上下のグリップをそれぞれ握って下に押すようにして立ち上がります。歩行器を体に近すぎる位置に置いてしまうと立ち上がりにくくなってしまいますのでご注意ください。

仕様

材質	本体フレーム／アルミニウム、グリップ／ウレタン、脚ゴム／天然ゴム
幅×奥行×高さ	450×380×740～865 mm (25mm間隔・6段階調節)
折りたたみ時サイズ	450×80×775～900 mm (25mm間隔・6段階調節)
脚部パイプ径	Φ19mm
重量	1.5kg
耐荷重	100kg
備考	グリップは本体フレームにリベット止めされているため、交換対応ができません。

Made in Taiwan

商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

 **アズワン株式会社**

受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

第2版 2020年1月 作成