

「らくらく点眼」「らくらく点眼Ⅲ」適合表

2016年10月現在 自社調べ（製造販売元が適合を保証するものではありません。）

商品名	製造販売元	らくらく点眼	らくらく点眼Ⅲ
ミケラン®点眼液1% / 2%	大塚製薬	○	○
ミケラン®LA点眼液1% / 2%	大塚製薬	○	○
リザベン®点眼液0.5%	キッセイ薬品工業	○	○※2, 3
ハイバジール®コーワ点眼液0.25%	興和	○	○※2
グラナテック®点眼液0.4%	興和	○	○※2
アレジオン®点眼液0.05%	参天製薬	○	○
カリーユニ®点眼液0.005%	参天製薬	○	○
クラビット®点眼液0.5% / 1.5%	参天製薬	○	○
コソプト®配合点眼液	参天製薬	○	○
サンコバ®点眼液0.02%	参天製薬	○	○
サンピロ®点眼液0.5% / 1% / 2% / 3% / 4%	参天製薬	○	○
ジクアス®点眼液3%	参天製薬	○	○
ソフトサンティア®	参天製薬	○	○
タブロス®点眼液0.0015%	参天製薬	○	○
タリビッド®点眼液0.3%	参天製薬	○	○
チモトール®点眼液0.25% / 0.5%	参天製薬	○	○
チモトール®XE点眼液0.25% / 0.5%	参天製薬	○	○
トルソプト®点眼液0.5% / 1%	参天製薬	○	○
ヒアレイン®点眼液0.1% / 0.3%	参天製薬	○	○
フルメロン®点眼液0.02% / 0.1%	参天製薬	○	○
プロラノン®点眼液0.1%	参天製薬	○	○
点眼・点鼻用リンデロン®A液	塩野義製薬	○	○
リンデロン®点眼液0.01%	塩野義製薬	○	○
リンデロン®点眼・点耳・点鼻液0.1%	塩野義製薬	○	○
レスキュラ®点眼液0.12%	スキャンボファーマ	○	○※3
アイファガン®点眼液0.1%	千寿製薬	○※1	○※3
オドメール®点眼液0.02% / 0.05% / 0.1%	千寿製薬	○	○
カタリン®点眼用0.005%	千寿製薬	○※1	○※4
カタリン®K点眼用0.005%	千寿製薬	○※1	○※4
ガチフロ®点眼液0.3%	千寿製薬	○※1	○※3
人工涙液マイティア®点眼液	千寿製薬	○	○
ティアバランス®点眼液0.1%	千寿製薬	○※1	○※3
ティアバランス®点眼液0.3%	千寿製薬	○	○※2
ニフラン®点眼液0.1%	千寿製薬	○※1	○※3
プロナック®点眼液0.1%	千寿製薬	○※1	○※3
ベストロン®点眼用0.5%	千寿製薬	○※1	○
ルミガン®点眼液0.03%	千寿製薬	○※1	○※3
ロメフロン®点眼液0.3%	千寿製薬	○	○
オフロキシ®点眼液0.3%	東亜薬品	○※1	○※2
ヒアロンサン®点眼液0.1% / 0.3%	東亜薬品	○※1	○※2
ジクロスター®点眼液0.1%	ニッテン	○	○※2
トラメラス®点眼液0.5%	ニッテン	○	○※2
ジクロスター®PF点眼液0.1%	日本点眼薬研究所	○※1	×
アゾルガ®配合懸濁性点眼液	日本アルコン	○	○
エイゾプト®懸濁性点眼液1%	日本アルコン	○	○
ザジテン®点眼液0.05%	日本アルコン	○	○
デュオトラバ®配合点眼液	日本アルコン	○	○※3
トラバタンズ®点眼液0.004%	日本アルコン	○	○※3
パタノール®点眼液0.1%	日本アルコン	○	○
ベガモックス®点眼液0.5%	日本アルコン	○	○
キサラタン®点眼液0.005%	ファイザー	○	○
ザラカム®配合点眼液	ファイザー	○	○
リボスチン®点眼液0.025%	ヤンセンファーマ	○	○

○：適合

※1：取り付けられますが、点眼瓶が少し不安定になります。

（点眼瓶が抜けないようしっかり支えながら点眼してください。）

※2：取り付けられますが、キャップを締めた状態で点眼瓶の保管ができません。

（キャップをはずしたり締めたりする際は、本体から点眼瓶を取り出してください。）

※3：取り付けられますが、点眼瓶の厚みが薄いため、そのままでは滴下できません。

（点眼瓶を取り付ける際にティッシュなどを点眼瓶とスライドの間に敷き、厚みを調節してください。）

※4：点眼瓶が大きいので、そのままでは取り付けられません。

（点眼瓶を取り付ける際にスライドを取り外してください。）

×：適合しません

●一般用（市販）点眼液、および一部の処方せん点眼液に使用できない可能性があります。

●点眼液の製造販売元が点眼瓶の仕様を変更する場合があります。