

# 取扱説明書

## Instruction Manual

# ポジショニングクッション

お買い上げ誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管して下さい。

7-3453-01	三角（ショート）
7-3453-02	三角（ロング）
7-3453-03	半円形
7-3453-11	三角（ショート） 替えカバー
7-3453-12	三角（ロング） 替えカバー
7-3453-13	半円形 替えカバー

## 使用上のご注意

### ●取扱注意事項

- ・使用方法が不適切な場合等において、生命、身体に重大な影響を及ぼす恐れがございますので、医師、専門家とご相談の上、ご使用下さい。
- ・かゆみ、かぶれ、発疹、肌荒れ等皮膚に異常を感じた際は、直ぐ使用を中止してください。

### ●特長

- ・中が固く、外側は身体にフィットするように柔らかい素材で、身体をしっかり支えます。
- ・クッション自体は防水の内カバーで覆っているので、汚れる心配がありません。
- ・外側のカバーは肌触りのよいパイル素材（吸汗速乾加工）を使用しています。

### ●洗濯方法/洗濯時の注意

- ・外側のカバーのみ取り外して洗濯していただけます。クッション本体は洗えません。
- ・塩素系漂白剤のご使用はお避け下さい。蛍光増白剤を含む洗剤を使用されますと、色ムラや変色の恐れがございますので注意下さい。
- ・縮み、変形、破損の原因となりますので、高温乾燥機のご使用はお避け下さい。
- ・ご使用前に一度洗ってからご使用いただくと、より効果が発揮されやすくなります。

### ●材質

クッション：ウレタン  
内カバー（防水）：ポリエステル 100%  
外カバー（パイル地）：ポリエステル 100%


### ●入り数：1個

### ●クッション寸法 [長さ × 幅 × 高さ]


- ・三角（ショート）：40×24×12cm
- ・三角（ロング）：80×24×12cm
- ・半円形：45×20×11cm

## 商品仕様

### ●三角

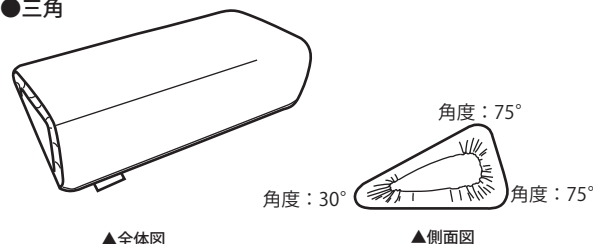


### ●半円形

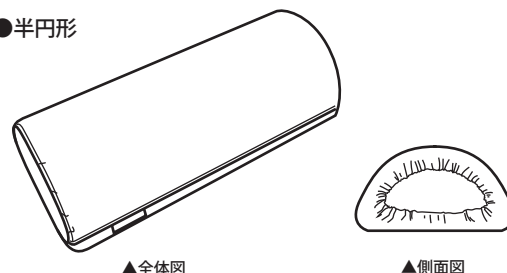

### ●ご使用方法

カバーを取り付け、体位変換時や床ずれが気になる部位に当てて、お使い下さい。

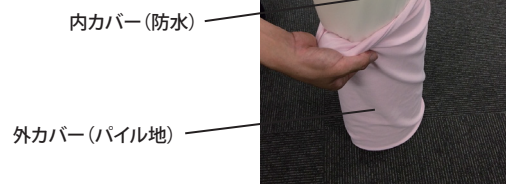

**アズワン株式会社**

商品に関するお問い合わせは  
カスタマー相談センター

TEL: 0120-711-875 FAX: 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません