

取扱説明書

Instruction Manual



頸椎固定カラー (ソフト)



OH-002

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
 ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
 また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

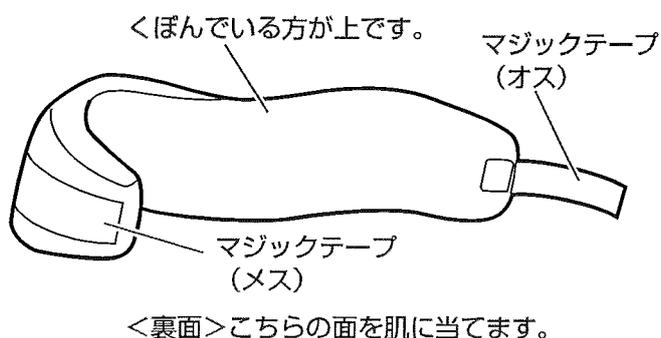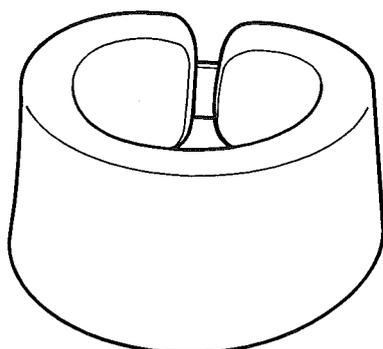

注意 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- 装着の際は医師または医療従事者の指示に従ってください。
- 本製品は頸椎固定を目的に開発されています。その他の用途には使用しないでください。
- 着脱時などマジックテープで他の衣服やお肌を傷つけないようご注意ください。
- 使用中の皮膚に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 品質保持のため、高温多湿や直射日光の当たる場所を避けて保管してください。

特長

- 吸湿性が良く、ソフトな肌触りです。
- クッション性、通気性に優れたウレタンフォームで快適にご使用いただけます。
- 着脱が簡単なマジックテープ式です。

装着方法

<p>① カラー中央のくぼみが正面にくるように首に当てます。</p>	<p>② 首のサイズに合わせて後ろでマジックテープを合わせます。</p>	<p>③ きつすぎたり緩すぎないか確認してください。</p>
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

洗濯方法

- マジックテープを閉じて洗濯してください。
- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、軽く押し洗いしてください。
- 漂白剤・アイロン・乾燥機の使用やドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後は弱く手絞りし、乾燥は陰干しにしてください。

仕様

材質 芯材/ウレタンフォーム、カバー/レーヨン

規格

品番	サイズ	適用範囲	全長×高さ
8-1833-01	S	25～30cm	43×10cm
8-1833-02	M	30～35cm	47×10cm
8-1833-03	L	35～40cm	52×10cm
8-1833-04	LL	40～45cm	56×10cm

Made in TAIWAN

販売元：アズワン株式会社 大阪市西区江戸堀2-1-27

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

 0120-711-875 (フリーダイヤル)

 0120-700-763 (フリーダイヤル)

 <http://help.as-1.co.jp/q>

 **アズワン株式会社**