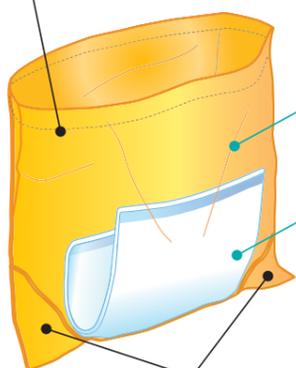
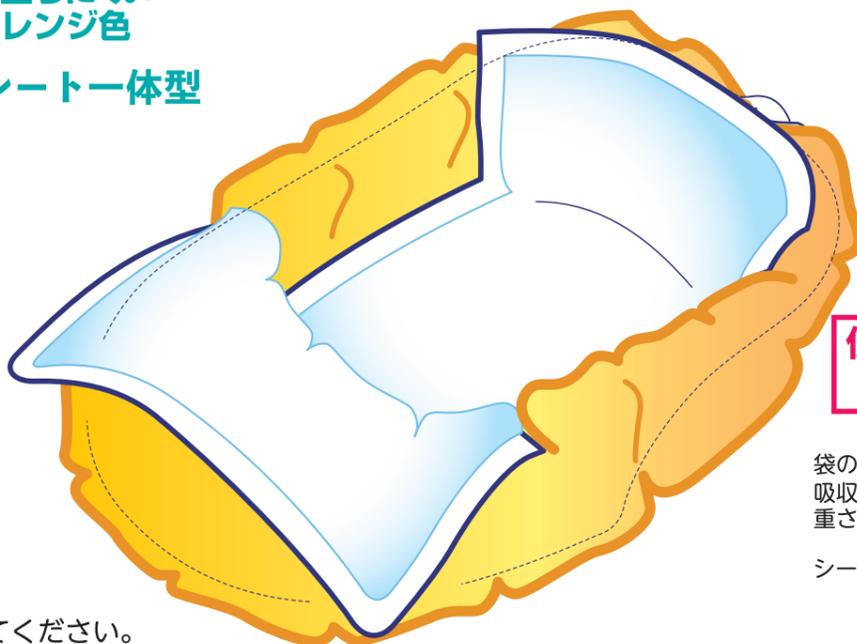


navis\*

差し込み便器・ベッドパン用

## 差し込み便器 処理袋

差し込み便器  
ベッドパンに 袋をかぶせるだけミシン目から切取って  
結び紐になります。中身が  
目立ちにくい  
オレンジ色  
シート一体型ヒートシール〈尿だまり防止加工〉  
袋の両端にし尿がたまりません。30  
枚入・いつもキレイで清潔です！  
・取付けも処理も簡単！便や尿、陰部洗浄の洗浄水を  
素早く吸収・凝固袋のサイズ : 幅 550 mm × 高さ 420 mm  
吸収シートのサイズ : 幅 300 mm × 長さ 500 mm  
重さ : 約 57g  
シート吸収量 : 約 500ml (人工尿)  
: 約 1300ml (水道水)

最後は結び紐で結んで処理してください。

差し込み便器  
でのご使用方法袋の下辺を便器に  
差し込みます。袋の口を広げ便器  
を包み込みます。袋がズレないように  
注意して、腰の  
下に差し込みます。使用後は排泄物を  
内側に包み込み静  
かに引き抜きます。結び紐を切り取  
り、空気を抜い  
て結びます。

材質：袋 / LDPE、シート / 不織布・吸水パルプ・高分子ポリマー

使用後の本品は、紙オムツと同様に処理ができます。

navis\*

差し込み便器・ベッドパン用

## 差し込み便器 処理袋

30  
枚入

- 差し込み便器処理袋は、便や尿などの水分を凝固し、防臭・抗菌効果にすぐれ、焼却処理ができますので衛生的です。
- ほとんどの差し込みトイレ、ポータブルトイレ等にセットして使えます。
- 陰部洗浄時の洗浄水も吸収できます。
- 白い吸収シートで、排泄物の色が良く見えます。
- 介護する方、受ける方の心理的な負担を軽くします。
- 大便はトイレに捨ててください。  
(尿だけの時はそのまま捨ててください。)

日本製

商品に関するお問い合わせは

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875  
FAX 0120-700-763  
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>  
月曜～金曜 午前9時～午後5時30分まで  
※土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

紙台紙 袋: PE



4 589638 282577