

取扱説明書

Instruction Manual

カレンカート点滴処置

TSC-T1P
TSC-T1BL

目次

安全上のご注意	2
設置上の安全に関する注意	2
使用上の安全に関する注意	3
各部の名称	4
ゴミ箱枠取付けについて	4
ハンガーパイプの取付けと高さ調節	5
お手入れについて	6
仕様	6
製品保証について	7



お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み
になって、正しくお使い下さい。
『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ
ところに添付して下さい。

アズワン株式会社

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上、特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

	警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		特定しない一般的な使用者の行為

< 設置上の安全に関する注意 >

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。


 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 60 以上の高温物体（乾燥機等）に近接しないところでご使用下さい。本体が変形する恐れがあります。
 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水平で安定したところでご使用下さい。本製品が転倒したり、収納物が、転倒、落下する恐れがあります。 ・ 直射日光のあたらないところでご使用下さい。製品が変色、変形、劣化する恐れがあります。

この製品は、屋外で使用することはできません。

< 使用上の安全に関する注意 >

 警告	
	<ul style="list-style-type: none">・本製品のトレイボックスはプラスチック製ですから、乱暴に扱わないでください。破損してケガをする恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	<ul style="list-style-type: none">・トレイボックスや棚板に足を掛けたり、本製品の上に乗らないで下さい。転倒したり、破損してケガをする恐れがあります。・ハンガーパイプを持って、本体を移動させないでください。取付け部が破損したり、パイプが曲がる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">・補助天板使用の際は、ゆっくりと動かして下さい。手をはさむ恐れがあります。
 注意	
	<ul style="list-style-type: none">・本製品は防振機能を備えておりません。移動の際、段差を乗り越える時や、曲がる時はゆっくり行い、転倒しない様十分注意してください。また、静止している時はキャスターのストッパーを必ずかけて下さい。・スロープなどの傾斜している所では停止しない様にして下さい。やむを得ず停車する場合は、必ずストッパーをかけ、転倒しない様十分注意して下さい。・ハンガーパイプの固定は、固定用ボルトをパイプの穴に通すようにして確実に固定して下さい。

< 各部の名称 >

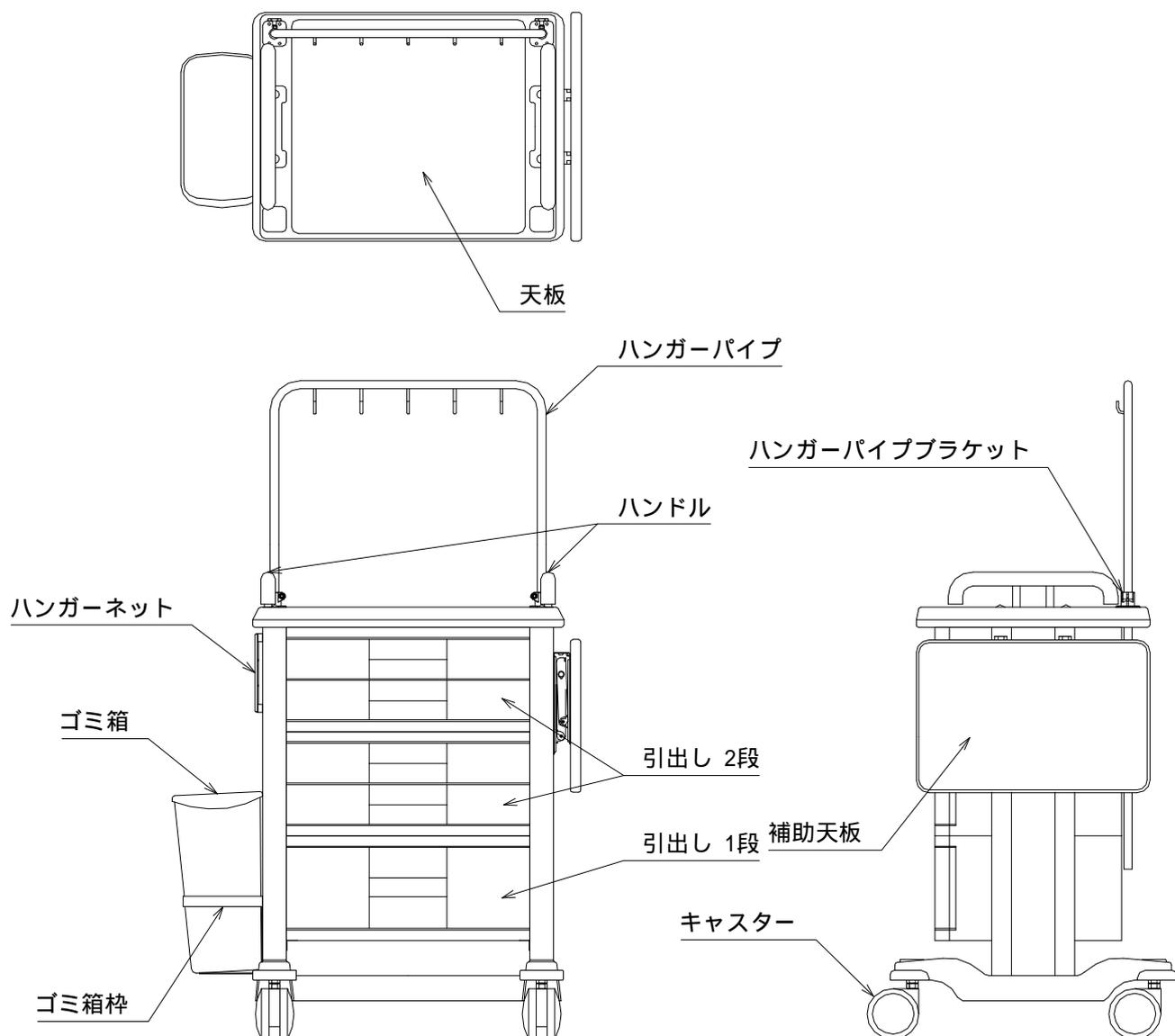

< ゴミ箱枠取付けについて >

工場出荷の際には、ゴミ箱枠を取付けておりません。


付属の固定用ビスを使用し、アルミ支柱にお取付けください。

ゴミ箱枠は他の物との、衝突に十分注意して下さい。へこみ、歪みの原因になります。

<ハンガーパイプの取付けと高さ調節>

工場出荷時にはハンガーパイプは固定しておりません。

付属の黒い部品（ブッシュ）をハンガーパイプブラケットに差込んでから、ハンガーパイプをブラケットに差込み、付属の六角レンチを使用して任意の高さに調節・固定してご使用ください。

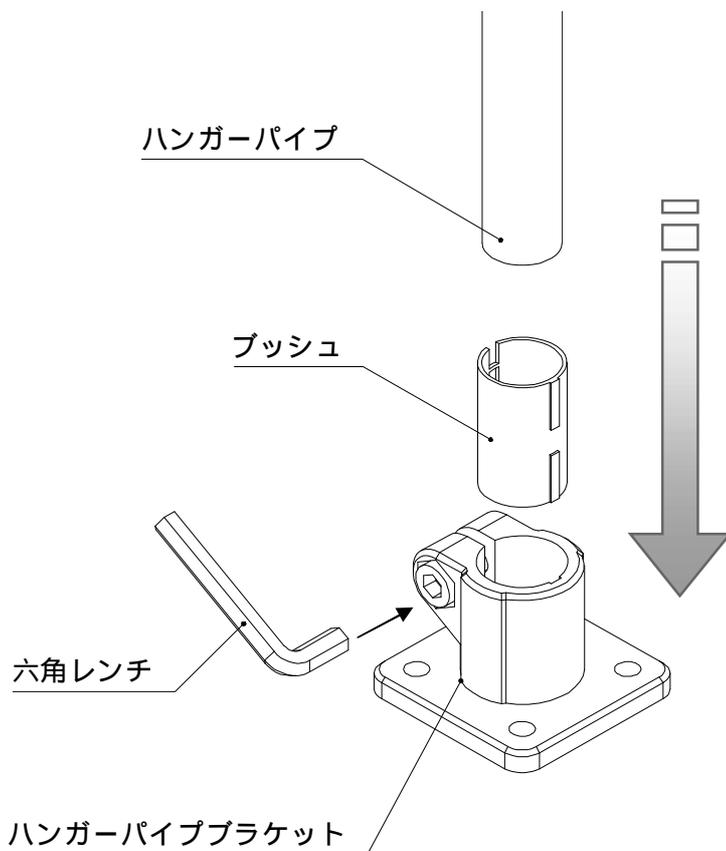

⚠ 注意




- ・ブラケットに固定の際は六角レンチを使用してしっかりと固定してください。固定が不十分ですと、ハンガーパイプが急に下がる恐れがあります。
- ・ハンガーパイプの高さ調節をおこなう際にはブラケット内側のブッシュが外れないように注意してください。ブッシュが外れたままの状態ですと固定が不十分となりハンガーパイプが急に下がる恐れがあります。

<お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

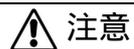

・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

<仕様>

外寸法（mm）	W600×D450×H850（取手等突起部含まず）
天板（mm）	W600×D450 ポリプロピレン製
キャスター	100 ナイロン/ウレタン巻車
引出し	A3トレイボックス 2段タイプ 2個
引出し	A3トレイボックス 1段タイプ 1個
ゴミ箱	13L 1個
補助天板	メラミン化粧合板 ソフトエッジ巻
ハンガーパイプ	フック5ヶ付 SUS304製

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定(1)に基づき正常な使用状態での故障の節は下記保証規定により修理いたします。

品名	_____
型式	_____
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL. _____
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL. _____

▲アズワン株式会社

<保証規定>

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

第2版 2016年11月作成