




ワイヤーバスケット

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

ご使用前に、本取り扱い説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

同梱品

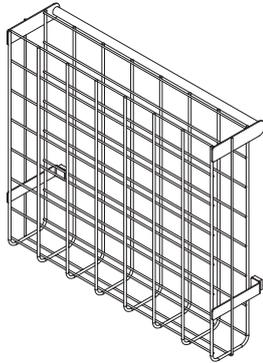

ワイヤーバスケット

(made in Japan)



製品仕様

外寸法	332×83×304mm
内寸法	325×50×300mm
材質 / 処理	ステンレス / 電解研磨
耐荷重	4kg
製品重量	約 680g
樹脂フック (別売、7-8366-12、4個入り)	

使用方法

- ①20×13の角フレームにフック(別売り)を2つ取りつけてください
- ②上部の丸棒をフックに上から落としてください。
- ③下部のスポンジがフレームに当たっていることを確認してください。

※対応機種：ライトな昇降式回診車(7-8366-01)・ライトなアルミカルテワゴン(7-8367-01)
ライトなおむつ交換車(7-8368-01)

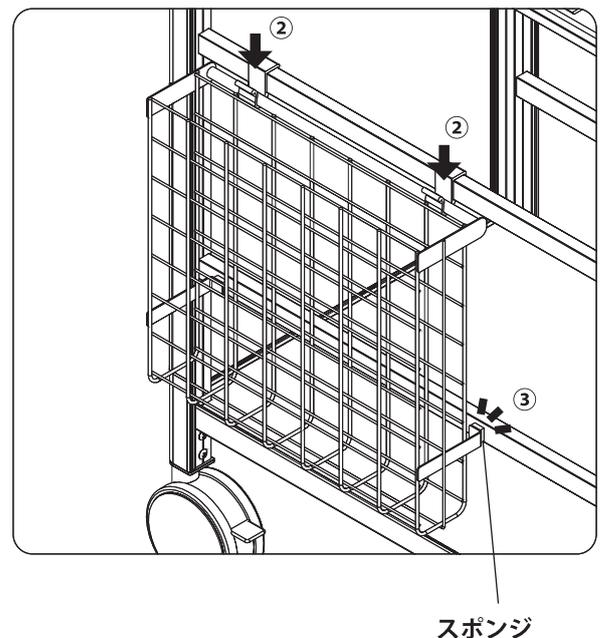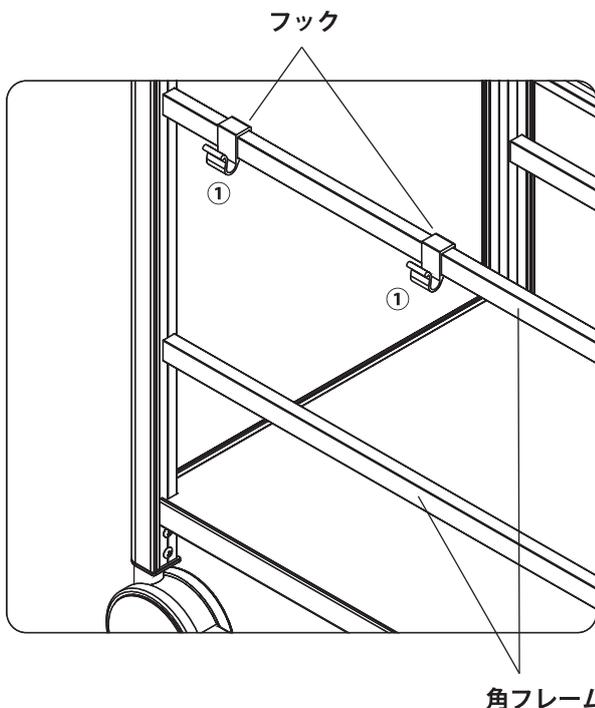

商品についてのお問い合わせは

アズワン株式会社 カスタマー相談センター

TEL. 0120-711-875

FAX. 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間 午前9時～午後5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

made in Japan

2019年10月 初版作成