


カーテンスクリーン

取扱説明書

0-2113-01~06
0-2114-01~06
0-2115-01~06
0-3263-01~06
0-3264-01~06
0-3265-01~06

このたびは、カーテンスクリーンをお買いあげ下さいましてありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
この説明書は大切に保管して下さい。

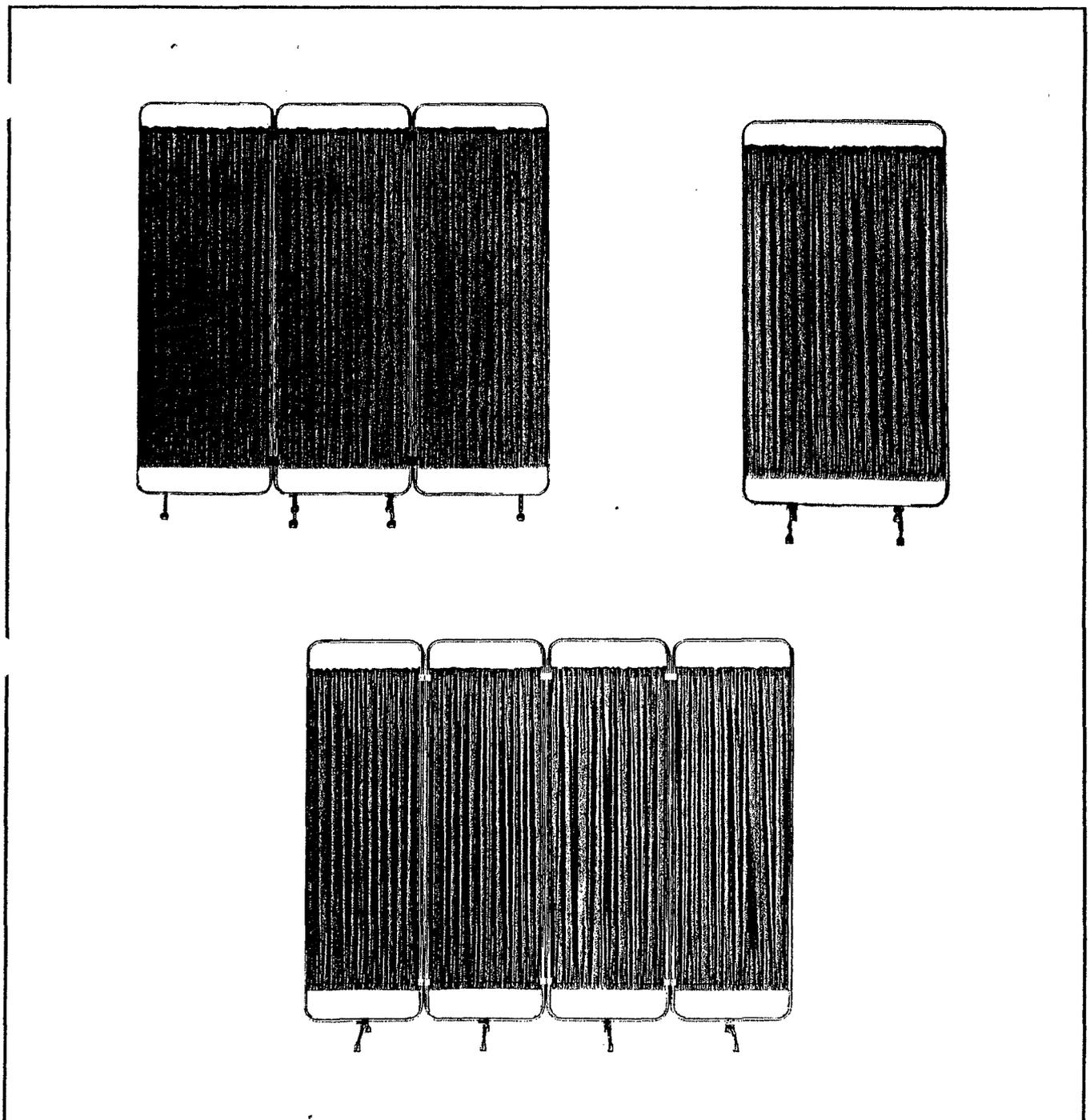

<移動方法>

本体キャスターにて移動させる場合は、以下の2点をお守り下さい。

- 必ず折りたたんで手を添えてゆっくり動かして下さい。
- 移動する方向に人がいないか確認してから、移動して下さい。

<手入れ方法>

- 日常の手入れとして、布地のヒダ山や谷にたまったホコリを、ハタキ等でいねいにはたき出して下さい。
 - 油汚れなどひどい汚れは、中性洗剤を含んだ白布で軽く拭き上げた後、同様に固く絞った白布で洗剤が残らないように水拭きして下さい。
 - やむなく洗濯をする時は、必ずドライクリーニングをして下さい。
 - 有機溶剤等（ベンジン・シンナー）を使用しないで下さい。
 - ドライヤー・アイロン等を使用しないで下さい。
- （注：本体を長く使って頂くために、手入れ方法に従った使い方をおすすめします。）

※布地の別売りも致しておりますのでご照会下さい。

⚠ 注意

- 本体によりかからないで下さい。倒れてきてけがをすることがあります。
- 可動部のすきまに手を入れないで下さい。けがをすることがあります。
- 著しく段差・傾斜のある床面に設置しないで下さい。倒れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないで下さい。破損やけがをすることがあります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使わないで下さい。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したままで使わないで下さい。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 用途以外で使わないで下さい。けがをすることがあります。
- 直射日光の当たる場所やストーブのそばでの使用はさけて下さい。変色や変形することがあります。
- 火のそばに近づけて使わないで下さい。火災になることがあります。