

取扱説明書

Instruction Manual

スケルトンカート TS - SA

スケルトン救急カート TS - SE

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

目 次

使用上のご注意	1
お手入れ方法	1
施錠・解錠方法	1
サイドハンガーネット取付け方法	1
製品仕様について	2
製品保証について	2

使用上のご注意

本製品を目的以外の用途で使用しないでください。破損や怪我をする恐れがあります。

床面が平滑なところで使用してください。凹凸のある床面で使用されますと、本体やキャスターなどの部品が破損する原因になります。

エレベーター等の乗降の際は、キャスターが隙間に落ちないようにご注意ください。

無理な荷重は転倒や破損の原因になります。

商品の性質上、本体パネルや引出し等の大部分が樹脂製となっております。引出しの操作等、乱暴に扱うと破損して怪我をする恐れがありますので、丁寧に取り扱ってください。

引出しは必要以上に強く引っ張り出さないでください。抜け落ちて怪我をする恐れがあります。

引出しや天板、ハンドルに荷重がかかり過ぎますと、バランスを崩して転倒する恐れがあります。

本体に薬品などが付着しましたらすぐに拭き取ってください。長時間放置しますと変色する恐れがあります。

もし使用中に変形や曲がり、破損、ねじの緩みなどによるガタツキや異音がした場合には、直ちに使用を中止し、購入された販売店にご相談ください。そのまま使用されますと、本体の破損やキャスターの脱落により怪我をする恐れがあります。

お手入れ方法


本製品が汚れた際は、乾拭きするか硬く絞った柔らかい布で拭き取ってください。

汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤かOA機器クリーナーを使用してください。

漂白剤、クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸類、及びこれに類するものは使用しないでください。変色したり塗装が剥がれる恐れがあります。

施錠・解錠方法

本製品は、ストップバーで全ての引出しをトータルロックさせることができます。ストップバーに付いているシリンダー錠の操作方法は下図のとおりです。

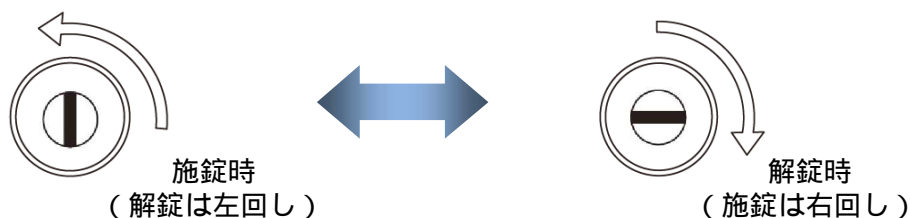

サイドハンガーネット取付け方法


本製品のアルミフレームは、ヨーロピアンカート用インサートナット（0-7898-25、別売）に対応しておりますので、別売のサイドハンガーネット（0-798-13～14）を取り付けることができます。

カートのサイドバーのスリットに、インサートナット（0-7898-25）をセットします。（右図参照）

ドライバーの先などで位置を調整します。

サイドハンガーネット（0-7898-13～14）をインサートナットに付属のネジで留めます。この際、緩みやガタツキが無いよう増し締めしてください。

取り付けしたサイドハンガーネットに対し、別売の鉗子立てやホルダーを引っ掛けてご使用ください。

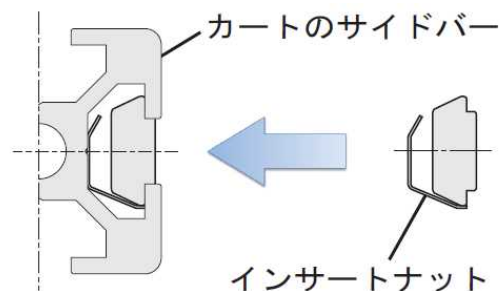

製品仕様について

品番	型番	本体サイズ	天板サイズ	引出数	キャスター
8-9917-01	TS-SA	幅 490 (570.5) × 奥行 490 × 高さ 836 (845.5) mm () 寸法はハンドルを含めた外寸	490 × 490 mm	5 段	100 mm (2 輪ストッパー付)
8-9918-01	TS-SE				

【材 質】天板・側板・引出し / PVC 樹脂、フレーム / アルミニウム、ハンドル / ステンレス

【オプション】TS-SA・-SE 共通・・・トレイ A・B・C (8-9917-11～13)

TS-SE のみ……………ガードル棒 (0-3591-11) ボンベ架台 (0-3591-12)
蘇生板 (0-3352-01)

製品保証について

保証規定	保証書																
<p>(1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。</p> <p>(2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・誤使用、不当な修理・改造による故障。 ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。 ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。 ・接続している他の機器が原因による故障。 ・車両・船舶等での使用による故障。 ・消耗部品、付属部品の交換。 ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。 <p>(3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。</p> <p>(4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。</p>	<p>本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。</p> <table border="1"> <tr> <td>品 名</td><td></td></tr> <tr> <td>型 式</td><td></td></tr> <tr> <td>保 証 期 間</td><td>お買い上げ日より1年間</td></tr> <tr> <td>お買い上げ日</td><td>年 月 日</td></tr> <tr> <td>お 名 前</td><td>様</td></tr> <tr> <td>ご 住 所</td><td>TEL.</td></tr> <tr> <td>取り扱い店名</td><td>担当者印</td></tr> <tr> <td>住 所</td><td>TEL.</td></tr> </table>	品 名		型 式		保 証 期 間	お買い上げ日より1年間	お買い上げ日	年 月 日	お 名 前	様	ご 住 所	TEL.	取り扱い店名	担当者印	住 所	TEL.
品 名																	
型 式																	
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間																
お買い上げ日	年 月 日																
お 名 前	様																
ご 住 所	TEL.																
取り扱い店名	担当者印																
住 所	TEL.																

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-711-875
FAX 0120-700-763
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル ☎ 0120-788-535
FAX 0120-788-763
問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

2015 年 9 月 初版作成