


取扱説明書

シャワーいす可動ひじかけ折りたたみタイプ


(CODE)0-8073-03(TYPE)HS8130

この度は、当製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をお読みください。

外観図

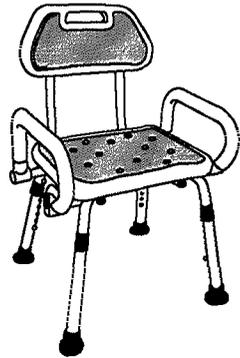

<組立方法>

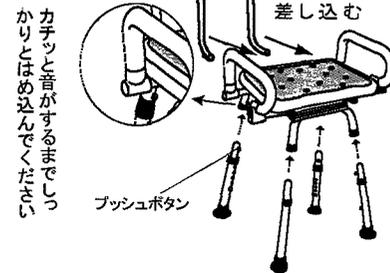

背もたれと脚パイプを座部のパイプに差し込みます。このとき脚パイプのプッシュボタンが、座部のパイプにある穴にしっかりとまるように差し込んでください。

部品と数量

脚パイプ		背もたれ、座部	
数量	4本	数量	1個

<オプション> 交換用先端ゴム; 品番HS9010(CODE番号0-6629-01)


△ ご注意

- 本品は浴室用の椅子です。それ以外の用途では使用しないでください。
- 座面以外の部分に腰をかけないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 誤った使用方法や無理な荷重は変形・損傷の原因になりますのでおやめください。
- 使用中に変形やネジのゆるみによりガタツキが生じた場合はすぐに使用を中止してください。そのまま使用されるとケガの原因となります。

使用方法

● 折りたたみ


下図のように背もたれと脚部を前後に押しながら折りたたんでください。

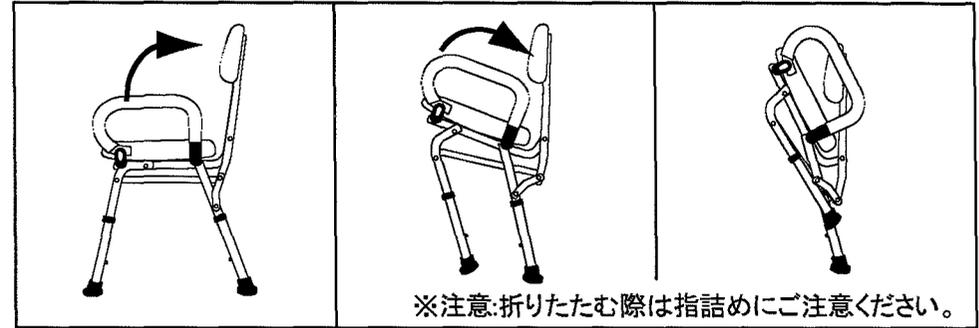

※注意: 折りたたむ際は指詰めにご注意ください。


● 高さ調整

高さ調整ボタンを押し込み4本とも希望する同じ高さに合わせてください。

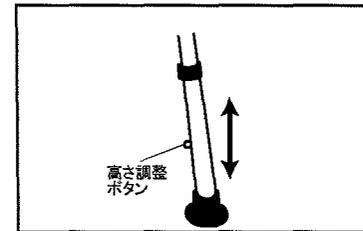

● ひじかけ

ロックボタンを押すとひじ掛けが可動できるようになります。

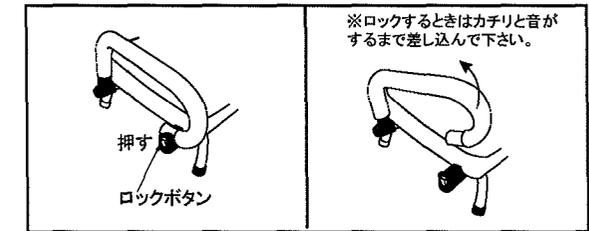

※ロックするときはカチリと音がするまで差し込んで下さい。

<特徴>

- 折りたたみタイプですので収納に場所をとりません。
 - からだの曲線にそった背もたれが、背中を優しくサポートします。
 - 差し込むだけで簡単に組立ができますので工具は不要です。
 - マット付きですので、お尻をヒヤリとさせません。
 - 簡単操作でひじ掛けが上下に可動します。
- ※注意: ひじ掛けロックボタンを操作する際、指詰めにご注意ください。

仕様

商品名	品番(CODE)	型番	材質	座面サイズ: 410×330mm 座面の高さ: 450~520mm 5段階調節可能(25mmピッチ)	重量	パイプ 先端径
シャワー椅子 可動ひじかけ 折りたたみタイプ	0-8073-03	HS8130	座部: ポリエチレン 背もたれ: ポリエチレン パイプ: アルミニウム マット部: EVA樹脂		4.1kg	φ28mm

■ 商品についてのお問い合わせは フリーダイヤル 0120-711-875
FAX 0120-700-763
E-mail: q@so.as-1.co.jp

カスタマー相談センター

受付時間: 午前9時~12時、午後1時~5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません