

- オゾン殺菌ロッカー（品番 3-6669-01・02）
- 車いす殺菌庫（品番 7-8391-01）

オゾン発生装置（品番 3-6652-01）の取替え方法

- ① 本製品の AC コードのプラグをコンセントから取り外してください。
- ② 本製品の正面から見て右上にある操作部を止めているネジ（赤○で囲った 4 ヶ所）をプラスドライバー（No.2）でゆるめ、押さえ金具を外します。



- ③ 本製品の内側の天井付近にあるオゾン発生装置を載せている台座の下から、オゾン発生装置を止めているネジ 4 本をプラスドライバー（No.1、No.2 より小さい）でゆるめ、オゾン発生装置を外します。

※オゾン発生装置を落下させないようにご注意ください。

- ④ 台座から外れたオゾン発生装置の側面にあるジャックから、AC コードのプラグ（接続端子）を取り外してください。
- ⑤ 新しいオゾン発生装置を④→③→②→①の手順で取り付けてください。



オゾン殺菌ロッカー



車いす殺菌庫