

訂 正

本機は、機能拡張され iPhone との通信が可能となりました。それに伴い、説明書の一部が変更となりますのでここに訂正いたします。本体の通信設定を切り替えることで、iPhone との通信がおこなえます。


□対応機種…iPhone7、iPhone7 Plus、iPhone8、iPhone8 Plus、iPhoneX、iPhoneXR、iPhoneXS、iPhoneXS Max □対応 OS…iOS12.2 以降

初期設定 (体重・身長・性別・年齢・カレンダー・時刻を設定する)

※Web サイトに初期登録するときに、時計とカレンダーは自動で設定されます。

ここでは、手動による設定方法をご説明します。

電池投入後、システムリセットスイッチを押すと「体重」が点滅します。

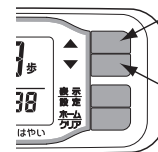


「体重」設定



▲/▼スイッチを押して「体重」をあわせませす。表示スイッチを1回押すと「体重」が確定され「身長」が点滅します。
・設定範囲は 20.0~155.0kg【155.0kg を越えると 20.0kg に戻る】
・早送りは 0.5kg 単位

「身長」設定

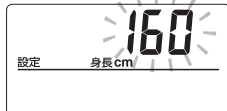

▲/▼スイッチを押して「身長」をあわせませす。表示スイッチを1回押すと「身長」が確定され「性別」が点滅します。
・設定範囲は 100~200cm【200cm を越えると 100cm に戻る】
・早送りは 5cm 単位

「性別」設定



▲/▼スイッチを押して「性別」をあわせませす。表示スイッチを1回押すと「性別」が確定され「年齢」が点滅します。

「年齢」設定



▲/▼スイッチを押して「年齢」をあわせませす。表示スイッチを1回押すと「年齢」が確定され「メッツ」が点滅します。
・設定範囲は 5~120 歳【120 歳を越えると 5 歳に戻る】
・早送りは 5 歳単位

「メッツ」設定



▲/▼スイッチを押して「メッツ」をあわせませす。表示スイッチを1回押すと「メッツ」が確定され「FLCA」が点滅します。
・設定範囲は 1.1~20.0 メッツ【20.0 メッツを越えると 1.1 メッツに戻る】
・早送りは 0.5 メッツ単位
・この値はアクティブ歩数や、アクティブ時間のしきい値になります。

「通信モード」設定



▲/▼スイッチを押して「FLCA」または「ndEF」をあわせませす。表示スイッチを1回押すと「FLCA」または「ndEF」が確定され「年」が点滅します。
・iPhone との通信には通信モードを「ndEF」に切り替える必要があります。
・PC 等で通信の際はモードを「FLCA」に切り替えてください。

「年」設定



▲/▼スイッチを押して「年」をあわせませす。表示スイッチを1回押すと「年」が確定され「月」が点滅します。
・設定範囲は 2017~2040 年【2040 年を越えると 2017 年に戻る】・早送りは 1 年単位

「月」設定



▲/▼スイッチを押して「月」をあわせませす。表示スイッチを1回押すと「月」が確定され「日」が点滅します。
・設定範囲は 1~12 月【12 月を越えると 1 月に戻る】・早送りは 1 ヶ月単位

「日」設定



▲/▼スイッチを押して「日」をあわせませす。表示スイッチを1回押すと「日」が確定され「時」が点滅します。
・設定範囲は 1~31 日【31 日を越えると 1 日に戻る】・早送りは 1 日単位
※カレンダーに存在しない日は設定できません。

「時」設定



▲/▼スイッチを押して「時」をあわせませす。表示スイッチを1回押すと「時」が確定され「分」が点滅します。
・設定範囲は 0~23 時【23 時を越えると 0 時に戻る】・早送りは 1 時間単位

「分」設定



▲/▼スイッチを押して「分」をあわせませす。表示スイッチを1回押すと「分」が確定され再び「体重」が点滅します。
・設定範囲は 00~59 分【59 分を越えると 00 分に戻る】
・早送りは 1 分単位

設定終了

ホームスイッチを1回押すと設定を終了します。

設定の変更

設定スイッチを2秒以上押すと「体重」が点滅して、設定値の変更ができます。

※設定途中に1分以上放置すると、設定を終了して歩数表示に戻ります。初めから設定し直してください。

※通信で設定項目の変更ができます。

- ・FeliCa™ は、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・FeliCa™ は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
- ・iPhone は Apple inc. の米国、日本における商標または登録商標です。
- ・その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

！ 参考

- ・▲▼スイッチを長押しすると数値を早送りできます。