


GS300 LED ライト

-  取扱説明書参照
-  注意：高照度
-  屋内使用
-  電源 オン/オフ

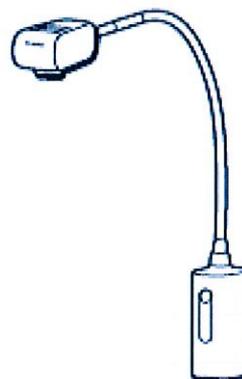

警告及び注意

 **警告** 製品使用前に取扱説明書を修読して下さい。製品の使用方法を誤ると、使用者や患者さんが怪我をされたり、機器を損傷したりする場合があります。

 **警告** 可燃性麻酔剤や他の可燃物とともに本機器を使用しないで下さい。爆発の恐れがあります。

警告 本機器は高照度の光を発します。操作中に光源を見つめないで下さい。眼に有害です。
 への光学的放射被害を最小限にするため、光源や反射鏡を直接見ないようにし、瞳孔異常や嫌悪感が起きないように防御して下さい。

警告 12～20 インチ (30.5～50 センチ) の標準作業距離で本機器を使用して下さい。標準
 作業距離より近い場所での照射は皮膚に有害となる場合があります。皮膚への光学的放射被害を最小限にするため、皮膚を検査する場合は光量および照射時間をできるだけ少なくして下さい。麻酔剤の使用又は損傷のある皮膚で、皮膚の反応、変化が認められた場合はさらなる予防措置を講じて下さい。

警告 病院や診療所の環境では無線通信に対して有害な妨害を及ぼすことがありますので、必要
 に応じて適切な対策を行って下さい。

 **注意** 修理用交換部品はありません。

 **注意** 使用方法を修得した方のみ、ご使用いただけます。


適用

GS300 LED ライトは、診療所や病院等での様々な用途に用いられるようデザインされた製品です。遠隔診断や手術用ではありません。

取付け


- ⚠ **警告** テーブル/ウォールマウントをテーブルまたは壁にしっかりと固定して下さい。モバイルスタンドはしっかりと組み立てて下さい。ライト本体は、以下の図で示した方法に従い、テーブル/ウォールマウント又はモバイルスタンドにしっかりと固定して下さい。機器上に物を置いたりぶら下げたりしないで下さい。

テーブル/壁への取り付け

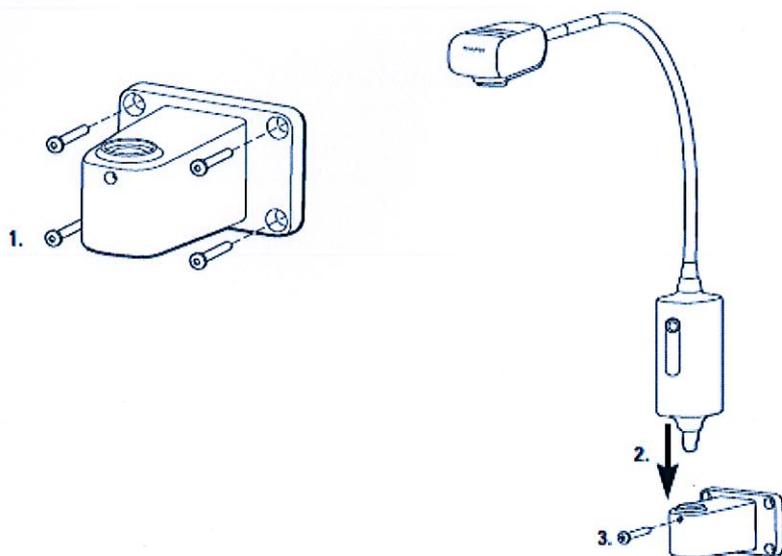


モバイルスタンドの組み立て

- ⚠ **警告** 一度組み立てたモバイルスタンドは分解できません

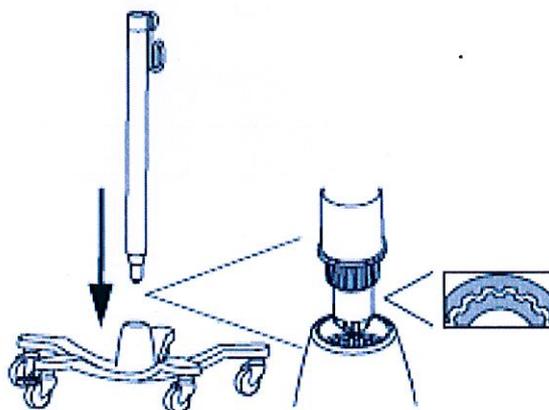

モバイルスタンドへの取り付け

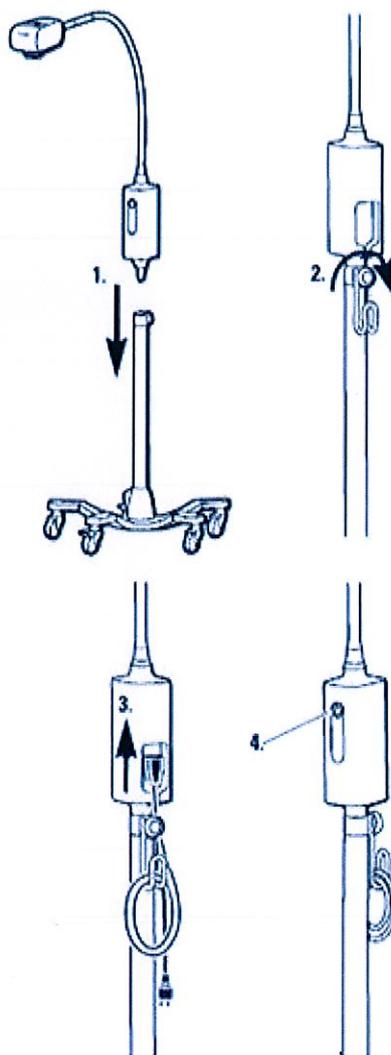

クリーニング

⚠ 警告 機器電源コードをコンセントから抜いて、行って下さい。

ライトヘッドおよびコントロールパネル



中性洗剤を含むぬるま湯に浸してよく絞った布で清拭するか、次の溶液を清潔な布に含ませて清拭し、乾かします。

- ・ 70%イソプロピルアルコール
- ・ 10%に希釈した漂白剤

トラブルシューティング

	考えられる原因	対応
 <p>グリーンライトが点いてない</p>	<p>電源の問題 ライトに電源が供給されていない</p>	<p>全てのケーブルが正しく接続されているか確認する</p>
 <p>グリーンライトは点いている</p>	<p>ライトが適切に機能していない</p>	<p>ウェルチ・アレン修理センターに連絡する</p>



ウェルチ・アレン 処置・診断用照明機器

規格

定格


入力電力：100-120V、50/60Hz、0.35A Max

環境条件

操作時



輸送/保管時

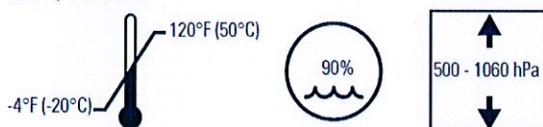

電撃に対する保護

クラス I 機器

適合規格



注意：

この機器は電磁気障害に関する規格に適合しており他の機器に影響を及ぼすこと、他の機器により影響を受けることはありません。しかしながら、予防的処置として、他の機器の前に接するようにして使用することは避けて下さい。



一般廃棄物として廃棄出来ません。