

取扱説明書

歩行車

navis*

8-7561-21 NC862

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図



⚠ 注意

- 歩行補助以外の目的でご使用にならないでください。
- 本製品に異常が認められた場合は、すぐに使用を中止してください。
- ご使用になるときは、毎回レバーがしっかりと固定されているか確認してください。また、ハンドルの向きが本体に対して垂直になるように固定してください。
- 本製品は、硬くて平坦な場所でのみご使用ください。
- 歩行中は左右のハンドルグリップを握って操作してください。バランスを崩して怪我をする恐れがあります。
- ハンドルブレーキをかけるときは、両方をゆっくり握ってください。
- 停止するときは、ループブレーキをかけてください。
- 凍結、積雪、濡れている場所では使用しないでください。ブレーキの利きが悪くなり、大変危険です。
- 腰掛ける場合は、ループブレーキをかけてから垂直に座ってください。斜めに腰掛けたり、もたれるとバランスを崩し転倒する恐れがありますのでおやめください。

組立方法

- 1** 後輪を広げ、ハンドル部①と前部バー②を本体パイプに差込み、十字ネジで床面と平行に固定して下さい。ハンドルの高さを調整してください。
- 2** 収納部を座面の内側、もしくは外側に掛けてください。



1:ハンドル部①左右取り付け
ください。



2:前部バー②を取り付けて
ください。



3:収納部⑥を取り付けて
ください。



→



4: 座面を閉めて完成です。 収納部を座面の外側に掛ける
こともできます。

ブレーキの操作方法

※ブレーキ力は、タイヤの減り具合によって変わります。

- 1** ハンドルブレーキ：
ハンドル下のループブレーキレバーを握っている間は、ブレーキが利きます。歩行中に使用するのに有効です。(図1)
- 2** ループブレーキ：
ループブレーキレバーをしっかりと下げると、ブレーキが固定します。シートに腰掛けるときに使用します。(図2)
- 3** ループブレーキ（解除）：
ループブレーキレバーを引き上げると、ブレーキは解除されます。(図3)

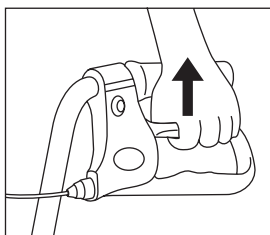


図 1

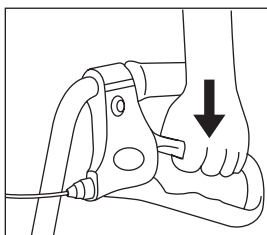


図 2

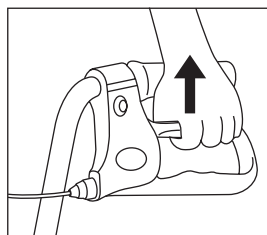


図 3

ご使用の前に・操作方法

ご使用になる前に、ハンドルグリップ下のレバーがしっかりと締まっているか確認してください。また、左右のハンドルの高さが同じか確認してください。

座面に座る時は、平坦で硬い地面の上に歩行車を置き、ループブレーキレバーを下ろしてブレーキを固定します。歩行車が安定して、滑らないのを確認してから腰掛けてください。座面に対し、垂直に腰掛けてください。転倒する危険があるので、決して斜めに座らないでください。

※座面が閉まっていることを確認してから腰掛けてください。

ブレーキの利きが悪くなった時の調整方法

A



①矢印の方向へブレーキ調整部（１）を半時計回りにまわします。ワイヤーの張力が増し、ブレーキレバーの遊びが少なくなります。

②ロックナットをブレーキ調整部（１）に接触させます。このナットは、調整したブレーキ調整部（１）がずれないようにするための部品です。



ブレーキ調整部（１）

B

Aのブレーキ調整では十分でない場合、Bのブレーキ調整もしてください。



ブレーキ調整部（２）

矢印の方向へブレーキ調整部（２）を半時計回りに回します。ワイヤーの張力が増し、ブレーキレバーの遊びが少なくなります。

折りたたみ方

- 1 ブレーキを解除します。
- 2 座面内側にある取手を引き上げながら（図1）、後輪上のパイプを前に押し出します。（図2）



図 1



図 2

お手入れと保管方法

- 湿らせた柔らかい布に中性洗剤を含ませ、フレームと車輪を拭きます。その後乾かしてください。
- パイプの中に、水や中性洗剤を入れないでください。タイヤは常に清潔で正常な状態で使用ください。
- 直射日光のあたる場所、ストーブの周囲など高温になる場所、湿気が多い場所または雨のあたる場所には保管しないでください。

仕様

| | |
|-----------|--------------------------|
| 品番 | 8-7561-21 |
| 型番 | NC862 |
| 幅×奥行×高さ | 610×640×710～820mm |
| ハンドルまでの高さ | 約710～820mm |
| 座面までの高さ | 470mm |
| 折りたたみ時寸法 | 約560×495×835mm |
| キャスター径 | φ約150mm：ナイロン製（前輪自在・後輪固定） |
| 材質 | 脚部：アルミニウム 座面：ビニールレザー製 |
| 重量 | 7kg |
| 耐荷重 | 約110kg |
| 十字ネジ | M6×（ピッチ）1.0×（長さ）43mm |

*改良のため仕様および外観を予告なく変更することがあります。

Made in China

保証規定

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送等による落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

| | |
|---------|-------------|
| 品 名 | 歩行車 |
| 型 式 | NC862 |
| 保 証 期 間 | お買い上げ日より1年間 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お 名 前 | 様 |
| ご 住 所 | TEL. |
| 取り扱い店名 | 担当者印 |
| 住 所 | TEL. |

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません