


取扱説明書

Instruction Manual

エスマルヒ駆血帯

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために、『取扱説明書』をお読みになって正しくお使いください。またお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに保管してください。

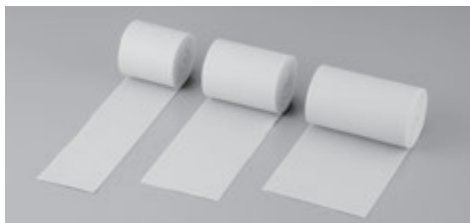

製品特長

- 優れた耐熱性と伸縮性を兼ね備えた使いやすい駆血帯です。
- ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーがある方にもお使いいただけます。
- オートクレーブで135℃での滅菌が可能です。

ご使用時の注意事項

- 本製品は駆血帯としての本来の用途以外での使用は控えてください。
- 頻回な滅菌は製品劣化の原因となります。本製品を繰り返し使用される際には、洗浄・滅菌の際に傷、裂け目、変色、割れなどがないかを確認し、異常が認められた場合は使用を中止してください。
- 滅菌の際は滅菌物に対してサイズに余裕がある滅菌バッグを使用し、バッグを立てた状態で滅菌してください。
- 材質の特性上、滅菌するとエスマルヒ同士がくっつきやすくなります。滅菌される際には下図の様に付属品のパイプにテンションがかからないようゆるく巻いた状態で滅菌してください。



製品仕様

品番	7-7707-01	7-7707-02	7-7707-03
型番	60mm	80mm	100mm
幅×長さ	60mm×3.5m	80mm×3.5m	100mm×3.5m
材質	エラストマー		
付属品	パイプ		

商品についてのお問い合わせは

アズワン株式会社

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

MADE IN JAPAN
2020年8月第2版作成