


製品の構成及び仕様

製品の構成

体重計本体、電池、取扱説明書兼保証書

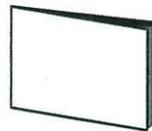

CR2032

取扱説明書兼保証書

仕様

モデル	X1
最大計量	150kg
測定範囲	4 ~ 150 kg
最小表示	100g
外寸法 (mm)	280×280×15.5mm
ガラスの厚さ (mm)	6
LCD大きさ (mm)	33
乾電池	3V CR2032 1個
特徴	自動電源ON機能
	自動電源OFF節電機能
	自動ゼロ補正
	使用範囲超過Err表示
	乾電池交換時期Lo表示

計量精度

計量範囲	0kg以上~75kg以下	75kg超え
精度	±200g	±300g

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されており、万一保証期間内に下記保証規定(1)に基づき正常な使用状態で故障の際は下記保証規定により修理いたします。

品名			
型式			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL		
取扱い名	担当者印		
住所	TEL		

アズワン株式会社

＜保証規定＞

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より1年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - 火災、天災、異常電圧、公害、地震等外部要因による故障。
 - 接続している他の機器が原因による故障。
 - 車両・船舶等での使用による故障。
 - 消耗部品、付属部品の交換。
 - 本保証書の字跡を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により派生される問題は、ご容赦ください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター
フリーダイヤル ☎ 0120-711-875
FAX 0120-700-763
問合せ専用URL <http://hebas-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター
フリーダイヤル ☎ 0120-788-535
FAX 0120-788-763
問合せ専用E-mail tech@f.s08s-1.co.jp

受付時間 午前9時~12時、午後1時~5時30分 土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

本社 〒550-8527
大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

MADE IN CHINA

第1版 2015年12月作成

製造番号について(製品本体裏面記載)

15 A 00001

製造年 製造月 製造通し番号

製造月を要します。
フルアラビア数字でL
例: 15-A
01-12-01

低床スケール(X1)

取扱説明書

商品コード: 7-1244-01

CAS

※本製品は取引又は証明に使用することはできません。

安全上の注意事項

▲ 注意	
平らな所で使用してください。	体重計の端に立たないでください。
体重計にものを投げないでください。	ガラスの破損にご注意ください。
許容重量を超過して計量しないで下さい。	足が濡れている等すべりやすい状態では使わないでください。

▲ 警告	
分解、改造、修理は絶対しないでください。	体重計を引っ張らないでください。
急激な温度変化又は振動が激しい所では使用しないでください。	製品に水をかけたり、温度の高い所で使用しないでください。
激しい電磁波が発生する所で使用しないでください。	ストーブなどの熱い物の近くに置かないでください。

初めてのご使用の際には

電池(内側のホルダが電池です。外側のホルダはダミーですので外さないでご使用ください。)の通電防止テープを剥がしてからご使用ください。



1. 本体裏面の電池カバーを外します。矢印方向に沿って強く押しながらあけます。
2. 乾電池カバー外した後、透明のテープを剥がしてください。

使用方法

体重計の使用法



1. 体重計の裏側の電池ケースを開け、電池があるか確認し、使用前に通電防止テープを除去してください。



2. 体重計を平らで丈夫な台の上に置き、そっと上に立ってください。



3. しばらくすると体重計に体重が表示されます。

→ 58.5 → +58.5




4. 体重計から降りると、自動的に電源がオフになります。

ご使用時の注意事項


Lo

電池の交換時期になると表示部にLoが表示されます。

電池の交換方法

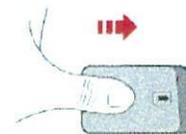

1. 本体裏面の電池カバーを外します。矢印方向に沿って強く押しながらあけます。
2. 乾電池カバー外した後、古い電池のホルダのくぼみに細く折れにくい棒状のものを用いて古い電池を取り外してください。

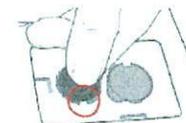

3. 新しい電池 (CR2032) の+側を上に向け、図のように、電池固定用突起部の下に電池を挿入します。
4. 指でカチッと音がするまでホルダに押し込んでください。カチッと音がすれば取付完了です。再度電池カバーを取り付けてください。

使用範囲超過表示

Err

最大使用範囲(150kg)を超過した場合表示部にErrが表示され、製品に異常が発生する恐れがありますので、ご注意ください。

位置補正機能

体重計の位置を移動させた場合、重さに変動のある場合があります。移動後2回以上測定した上でご使用ください。